


SISTEMA DE CLIPS HEMOLOCK

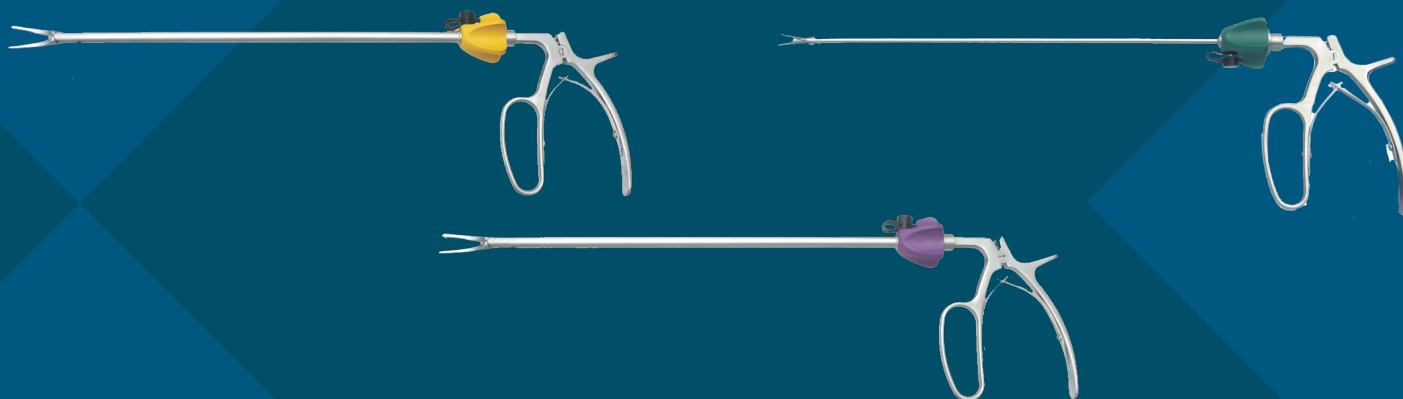

Nombre producto: CLIP HEMOLOCK

Marca: LOMI

Registro sanitario: INVIMA 2021DM-0023002

Importado por: Todo Ortopédico SAS

Material: Polímero

Empaque: Cartuchos por 6 clips, caja por 14 cartuchos.

Esterilización: Estéril en OE.

Uso: Adelgace suficientemente la estructura a ligar, con un instrumento de disección para permitir que el mecanismo de seguro del clip quede sin tejido.

El clip es apto en general para vasos y estructuras tisulares (ver diámetros en la tabla).

Coloque el clip alrededor del tejido que va a ligar de tal modo que se cuente con una visualización clara del mecanismo de seguro.

Comprima totalmente el gatillo aplicador de tal modo que se cierren las bocas y se trabe el clip. Un chasquido audible confirmará que se ha cerrado bien el clip.

Contraindicaciones: No utilice este insumo para oclusiones tubáricas (trompas de falopio), como método anticonceptivo.

- Los clips están contraindicados para su uso en la ligadura de la arteria renal durante la nefrectomía laparoscópica de donantes.



XL



S



L

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	LONGITUD
805621	XL	Dorado	7 mm - 16 mm
805622	L	Morado	5 mm - 13 mm
805623	S	Verde	2 mm - 7 mm