



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Termómetro Digital MC-101

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

Wuxi Exanovo Medical Instrument CO, LTD

USOS:

Se utiliza para medir la temperatura del cuerpo humano, adecuado para uso oral, axila y ano

VIDA ÚTIL:

3 años

PRESENTACIÓN:

- Empaque Unitario en Caja de Cartón

ALMACENAMIENTO:


Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz.

INSTRUCCIONES DE USO:

USO	FUNCIÓN
ORAL	COLOQUE EL TERMÓMETRO DEBAJO DE LA LENGUA, CIERRE LA BOCA Y RESPIRE UNIFORMEMENTE POR LA NARIZ PARA EVITAR QUE LA MEDICIÓN SE VEA AFECTADA POR AIRE INHALADO/EXHALADO TEMPERATURA NORMAL: 35.7°C - 37-3°C
RECTAL	LUBRIQUE LA PUNTA DE LA SONDA DE PLATA CON VASELINA PARA UNA FÁCIL INSERCIÓN. INSERTE SUAVEMENTE EL SENSOR APROXIMADAMENTE 1 CM EN EL RECTO TEMPERATURA NORMAL: 36.2°C - 37.7°C
AXILA	SEQUE LA AXILA. COLOQUE LA SONDA EN LA AXILA Y MANTENGA EL BRAZO PRESIONADO FIRMEMENTE DESDE UN PUNTO DE VISTA MÉDICO. TEMPERATURA NORMAL: 35.2°C - 36.7°C

SISTEMAS:

- Electrónico
- Subsistemas:
- *Probe*: Punta de Toma de Prueba en acero inoxidable
- *LCD*: Pantalla en cristal líquido
- Botón ON/OFF
- Tapa de la Batería y Baterías

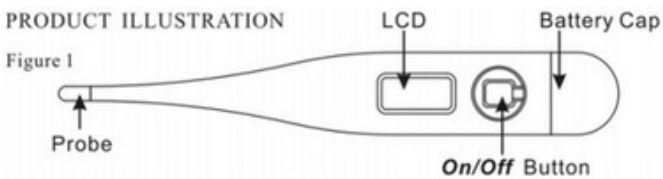

GARANTÍA:

El termómetro está garantizado por un año a partir de la fecha de compra. Si el termómetro no funciona correctamente debido a componentes defectuosos o mano de obra deficiente, lo repararemos o reemplazaremos sin cargo.

Todos los componentes están cubiertos por esta garantía, excepto la batería. La garantía no cubre daños a su termómetro debido a un manejo inadecuado. Para obtener el servicio de garantía, se requiere un original o una copia del recibo o factura de compra del minorista ORIGINAL.

WUXI HANNOVO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

TIPO DE RIESGO:

- IIA