

NOMBRE DEL PRODUCTO

**TAPABOCAS QUIRÚRGICO
DESECHABLE**

REGISTRO SANITARIO

2021DM-0023321

Vigencia: 13/04/2031

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tapabocas diseñado para el cuidado del personal de la salud evitando infecciones y proteger de salpicaduras. Es una barrera eficiente contra los microorganismos.

- Capa externa: TNT Azul 30 g/m²
- Capa central: TNT Blanco 30 g/m²
- Capa interna: TNT Blanco 25 g/m²

NORMA TÉCNICA DE REFERENCIA:

NTC 3852:1996 - NTC 1733:2020

CONTACTO

TELÉFONO:
(604) 444 4815 – 320 7839163

DIRECCIÓN:
Cra 66 #43-46 Medellín Colombia.

CORREO ELECTRÓNICO:
ventas@powermedical.co



INDICACIONES DE USO

Se usa como protección del personal de la salud y pacientes en áreas médicas y/o quirúrgicas. Minimiza el paso de sangre y fluidos orgánicos.

Es una barrera eficiente contra los microorganismos.

Consta de tres capas: Una externa que permite repeler fluidos, una central que filtra partículas y una interna que absorbe la humedad.

1. Retirar accesorios y joyas.
2. Visualizar la capa interna que irá hacia el rostro: Blanco, sosteniendo el tapabocas de las bandas elásticas.
3. Ubicar de tal manera que cubra nariz y boca, ajustando a las orejas con las bandas elásticas y a la nariz con el alambre de ajuste doblándolo con ligera presión, también debe cubrir mentón.
4. Terminado su uso retirar usando las bandas elásticas.

COMPONENTES Y MATERIALES

Elaborado en Tela no tejida SMS en tres capas, elástico circular blanco y alambre. Con 2 bandas elásticas laterales para ajuste en orejas.

Medidas: 17.5x17.5 cm.

PRESENTACIÓN

No estéril, caja o display por 50 unidades.

Estéril, empacado en papel mixto de grado médico, por unidad.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa.

No exponer a humedades, calor intenso o flamas.

T°: 15-30°C - Humedad relativa: 45-70%

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

Usar solo una vez. Usar dentro del tiempo válido. No usar si el empaque está dañado.

No usar si presenta olor o humedad u otra desviación de calidad.

Su disposición final será en doble bolsa negra para uso doméstico y bolsa roja en ámbitos clínicos.

RIESGO Y VIDA ÚTIL

Riesgo I. No invasivo. Vida útil de 5 años. Se garantiza siempre y cuando el empaque permanezca intacto y se mantengan las condiciones de almacenamiento.