

VERSAJET II ♦ sistema de hidrocorugía



Descripción

VERSAJET es un sistema de limpieza y desbridamiento quirúrgico que se enmarca dentro de la "hidrocirugía". La hidrocirugía consiste en la utilización de chorros de agua a alta velocidad en herramientas quirúrgicas eléctricas. Este sistema produce un chorro de fluido a alta velocidad que crea una corriente de vacío en el extremo de la pieza de mano que aspira los tejidos blandos y que se adapta a todo tipo de heridas.



El sistema de hidrocirugía de VERSAJET II permite al cirujano extirpar el tejido desvitalizado y detritus de forma muy precisa, preservando al máximo el tejido sano y viable, en comparación con otras técnicas de desbridamiento quirúrgico. Se puede desbridar en un solo paso y con un solo instrumento.

Indicaciones

El sistema de hidrocirugía VERSAJET II está indicado para el desbridamiento de heridas (quemaduras y heridas agudas y crónicas), el desbridamiento de tejido blando desvitalizado y la limpieza de la zona quirúrgica en intervenciones que, a criterio del médico, requieran un desbridamiento preciso.

Precauciones

Este dispositivo debe usarse con particular cuidado en:

-Pacientes con hemofilia.

- Pacientes con medicación anticoagulante. Usar los ajustes más altos de la consola con precaución cerca de tejidos sensibles, como los haces neurovasculares.

Características

- Corta, extripa y elimina todo tipo de tejido en heridas, en un solo paso y con un solo instrumento.
- Demostrada reducción del tiempo y coste de desbridamiento.
- Fácil de usar
- 10 niveles de velocidad, permiten desbridamiento suave a más agresivo.
- Reduce la carga bacteriana en la herida
- El pedal permite al cirujano controlar directamente la activación de la consola.

Instrucciones de uso

Ver la guía del usuario que se entrega con el producto.

Composición

Unidad de pieza de mano desechable.	Pieza de mano: con un mango ergonómico que contiene el tubo de entrada (blanco): se conecta a una bolsa de solución salina; cartucho de la bomba (naranja): se acopla con la interfaz de la consola; tubo de alta presión: un tubo que transporta solución salina presurizada hasta la punta distal de la pieza de mano; tubo de evacuación de residuos (extremo azul) transporta los líquidos evacuados a un contenedor de los residuos.
Consola eléctrica	Dispositivo eléctrico que impulsa el fluido a través de la pieza de mano, mediante el giro continuo del cartucho introducido en la consola
Interruptor de pedal	Proporciona control a distancia de la consola eléctrica.

Especificaciones técnicas

Alimentación	100-240V. 3A. 50/60 Hz
Dimensiones	Consola: 45,7 x 33,0 x 20,3 cm Interruptor de pedal: 7,6 x 22,9 x 6,4 cm
Peso	Consola: 12,7 Kg Interruptor de pedal: 1,12 Kg
Alimentación / Transporte	Consola: - 20 a + 55 °C
Temperatura de funcionamiento	4 a 38 °C
Protección de descarga a tierra	Clase 1
Protección paciente	Tipo BF

VERSAJET II ♦ sistema de hidrocorugía

Presentación

Código Producto	Descripción	
66800039	Consola (Incluye Pedal)	

VERSAJET II EXACT sistema de hidrocirugía

66800040	Dispositivo 15° / 14 mm	
66800041	Dispositivo 45° / 14 mm	
66800042	Dispositivo 45° / 8 mm	

VERSAJET II PLUS sistema de hidrocirugía

66800043	Dispositivo 15° / 14 mm	
66800044	Dispositivo 45° / 14 mm	
66800045	Dispositivo 45° / 8 mm	

Re. San.: INVIMA 2011EBC-0006918 R2

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE 01520 ClaseCE Consola: IIb Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001:2008 		Pieza de mano estéril:  Consola Versajet: No estéril 	 24 meses   *Únicamente para los dispositivos del sistema	 Smith & Nephew Medical Limited Hull HU3 2BN England. Distribuidor Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos

	No contiene látex		Producto esterilizado por irradiación
	Caducidad		No reutilizar
	Manténgase en lugar seco		Temperatura de almacenamiento
	No exponer el producto a la radiación solar		No utilizar si el envase está abierto o dañado
	Fabricante		

Smith&Nephew Colombia
SAS Calle 100 N° 7-33 Torre
1 Piso 3, Bogotá
Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

♦ Marca registrada
Smith&Nephew