

Ficha Técnica

RENASYS[®] -F/AB con Soft Port, kits de espuma para la aplicación de terapia de presión negativa.



Indicaciones:

El kit de apósitos abdominales RENASYS[™]-F/AB está diseñado para utilizarlo conjuntamente con los depósitos y dispositivos RENASYS[™] EZ y RENASYS[™] EZ PLUS como sistema completo de tratamiento de tratamiento de heridas con presión negativa (NPWT) para tratar heridas abdominales. RENASYS[™] -F/AB está indicado en la aplicación de la técnica de puente temporal en aberturas de pared abdominal en las que no puede practicar el cierre primario y/o son necesarias entradas abdominales repetidas.

Se ha diseñado para usarse en heridas abdominales abiertas con vísceras expuestas, incluido, entre otros el síndrome compartimental abdominal.

RENASYS[™] -F/AB se ha diseñado para usarse según criterio médico en pacientes monitoreados en salas de traumatología, cirugía general, cirugía plástica etc, y debe aplicarse en el quirófano.

Descripción

• Los kits contienen:

- RENASYS[®] Soft Port con sistema de sellado, de doble lumen, resistente a la flexión y a la compresión.
- Capa protectora de órganos fenestrada.
- Espuma de poliuretano (Foam).
- Film transparente.

Estos kits han sido diseñados para utilizarse con las consolas RENASYS[™] EZ y RENASYS[™] EZ PLUS y RENASYS TOUCH de Smith & Nephew.

Contraindicaciones

Contraindicado en pacientes con:

- Fístulas no exploradas.
- Tejido necrótico (escaras).
- Osteomielitis no tratada.
- Pacientes con riesgo de hemorragia o fuga intestinal
- Heridas malignas (excepto para mejorar la calidad de vida).
- Cuando no se utiliza una capa protectora de órganos (CPO) para proteger estructuras u órganos vitales.

No permita el contacto de la espuma con intestinos, arterias, venas, órganos o nervios expuestos.

Utilice la CPO siempre que use RENASYS -F/AB.

Precauciones

Debe conseguirse la hemostasia antes de aplicar el apósito y deben controlarse con especial atención a los pacientes tratados con RENASYS[™] -F/AB por si aparecen hemorragias repentinas o incremento en el sangrado. Deben tomarse precauciones con pacientes en los siguientes casos:

- Tratamiento con anticoagulantes o inhibidores de la agregación plaquetaria.
- Pacientes con problemas de hemostasia.
- Sangrado abundante o debilidad en vasos sanguíneos u órganos
- Malnutrición sin tratamiento.
- Pacientes con heridas muy próximas a vasos

Composición

Soft Port con Sistema de sellado:
Lámina de poliuretano, filtro de polietersulfona sobre poliéster no tejido con adhesivo, tejido de poliéster y conectores de polipropileno, termoplástico y nylon.



RENASYS[®] -F/AB con Soft Port, kits de espuma para la aplicación de terapia de presión negativa.

Capa protectora de órganos fenestrada: Poliuretano	
Film Transparente: Poliuretano de adhesivo acrílico Permeabilidad vapor de agua a 37°C (g/m2/24hrs): 600 mínimo. Adhesión al acero (kgf/cm): 250- 500. Resistencia a la tracción (kgf/cm): 0,75 mínimo. Extensibilidad (kgf/cm): 0,2 máximo. Alargamientos y rotura (%): 500 mínimo.	
Espuma (Foam): Poliuretano 400-600μ, no genera residuo al cortar la esponja -600	

Contenido del Kit Renasys F/ AB

Capa protectora de órganos fenestrada	1 unidad de 89 cm x 56 cm
Drenaje y sistema de sellado	Sí
Film transparente	6 films de 20 cm x 30,5 cm
Espuma (Foam) perforada	2 piezas de 43x30x2,5cm

Presentación

Código Producto	Descripción	Unid. Envase	Unid. Embalaje	Código EAN
66800980	RENASYS™ F/ AB	1	5	0040565125916

Re. San.: INVIMA 2021DM-0007065-R1

Certificación	Composició	Esterilidad	Conservación	Fabricsn
ON n° 0297 CE n° 404394 MR2 Clase CE IIb Smith & Nephew, ISO 9001:2008	LATEX FREE	STERILE EO	 12 meses  	Smith & Nephew, Inc. 970 Lake Carillon Drive. Suite 110 St. Petersburg, Smith & Nephew Medical Limited Hull HU3 2BN, England UK. Distribuidor Smith & Nephew, S.A.U

Leyenda símbolos

LATEX FREE No contiene látex



Caducidad



Manténgase en lugar seco



No utilizar si el envase está abierto o dañado



Fabricante

STERILE EO



Producto esterilizado con óxido de etileno



No reutilizar

Temperatura de almacenamiento

EC REP

Representante autorizado

Smith&Nephew Colombia SAS

Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, Bogotá

Tel: 57 (1) 605 7373

www.smith-nephew.com

Nephew

™ Marca registrada de Smith &