

Ficha Técnica

ALLEVYN[®] Ag ADHESIVE, apósito hidrocelular trilaminar adhesivo con plata.



Características

- No se adhiere al lecho de la lesión.
- Elevada capacidad de absorción: gracias a su capa central hidrocelular.
- Promueve la cicatrización de la lesión.
- Conformable, fácilmente adaptable a cualquier zona del cuerpo.
- Minimiza el riesgo de maceración de la piel.
- Suave y anatómico, gran confort para el paciente.
- Adhesivo de alta tolerancia cutánea.
- Bordes sellados y forma redondeada: protege frente a fugas de exudado y proporciona mayor adaptabilidad.
- Película exterior impermeable: actúa como barrera bacteriana previniendo la contaminación de la lesión.
- Mínimos cambios de apósito, puede permanecer en la lesión hasta 7 días según criterio clínico.
- Fácil de aplicar y retirar.

Instrucciones de uso

1. Limpiar la lesión según los protocolos locales.
 2. Seleccionar el apósito un poco más grande que la lesión.
 3. Preparar y limpiar la piel perilesional secando cualquier exceso de humedad. Para asegurarse el contacto con la lesión, deberá retirarse el exceso de vello alrededor de la misma, si fuera necesario.
 4. Sacar el apósito de su envase original mediante una técnica aséptica
 5. Retirar el papel protector del apósito ALLEVYN Ag ADHESIVE
 6. Colocar el apósito alisándolo encima de la lesión y retirar el papel protector restante.
 7. ALLEVYN Ag ADHESIVE puede cortarse, especialmente para la curación de heridas en rodillas, codos y otras zonas de difícil acceso
 8. Si aplica ALLEVYN[™] Ag SACRUM, colocar la porción más estrecha a 2 cm, como mínimo, del esfínter anal. Posteriormente continuar con la aplicación del apósito en la zona.
- Léase detenidamente las instrucciones de uso contenidas en el envase antes de su aplicación.

Composición

Película exterior: Film de poliuretano.

Capa central: Capa hidrocelular de poliuretano con sulfadiazina argéntica.

Capa de contacto: Capa de poliuretano microperforada. Masa adhesiva: Acrílica.

Especificaciones técnicas

Dimensiones: nominal + 0,5 cm.

Peso: 500 – 700 g/m².

Capacidad de absorción: mín. 30 g/100 cm².

Permeabilidad al vapor de agua: 700 – 4000 g/m² 24 horas.

Adhesividad al acero: mín. 1 N/cm

Descripción

ALLEVYN Ag ADHESIVE es un apósito hidrocelular, trilaminar, antimicrobiano y absorbente, que consiste en un capa central hidrocelular con capacidad de absorción, que contiene sulfadiazina argéntica, situada entre una capa adhesiva de poliuretano microperforada de contacto con la lesión y una película de poliuretano externa impermeable. El apósito proporciona una barrera eficaz contra la contaminación microbiana, protegiendo la lesión contra microorganismos patógenos invasivos, ayudando de esta manera a una curación más rápida. La sulfadiazina argéntica es efectiva contra los microorganismos presentes en el apósito y en la lesión. En presencia de exudado el apósito ayuda a mantener un ambiente húmedo en la herida.

Indicaciones

ALLEVYN Ag ADHESIVE es un apósito antimicrobiano absorbente para la cicatrización por segunda intención de lesiones exudativas crónicas y agudas, de espesor total, parcial o superficiales con tejido de granulación, tales como: úlceras por presión, úlceras venosas, úlceras diabéticas, quemaduras, zonas donantes, úlceras fungosas/malignas y lesiones quirúrgicas dehiscentes. ALLEVYN Ag ADHESIVE puede utilizarse en lesiones infectadas. Cuando el producto se utilice en lesiones infectadas, éstas deben tratarse según el protocolo clínico local.

Contraindicaciones

No utilizar en pacientes con hipersensibilidad conocida a la sulfadiazina argéntica o a las sulfonamidas. Debido a que las sulfonamidas causan kernicterus, no utilizar ALLEVYN Ag ADHESIVE en mujeres en avanzado estado de gestación o en periodo de lactancia, en bebés prematuros o en recién nacidos durante los primeros meses de vida.

ALLEVYN[◇] Ag ADHESIVE, apósito hidrocélular trilaminar adhesivo con plata.

Presentación

Código Producto	Descripción	Unidades / Envase	Unidad mínima de venta
66800073	ALLEVYN Ag ADHESIVE 7,5 x 7,5 cm	10	10
66800075	ALLEVYN Ag ADHESIVE 10 x 10 cm	10	10
66800078	ALLEVYN Ag ADHESIVE 12,5 x 12,5 cm	10	10
66800081	ALLEVYN Ag ADHESIVE 17,5 x 17,5 cm	10	10
66800097	ALLEVYN Ag ADHESIVE Sacro 22.5 x22.1cm	10	10

Re. San.: INVIMA 2013DM-0010162

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON nº 0086 CE nº CE 00356 Clase CE III, estéril Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001:2008 			 24 meses     	 Smith & Nephew Medical Limited Hull HU3 2BN England. Distribuidor Smith & Nephew, SAU

Legenda símbolos

 No contiene látex	 Producto esterilizado por irradiación
 Caducidad	 No reutilizar
 Manténgase en lugar seco	 Temperatura de almacenamiento
 No exponer el producto a la radiación solar	 No utilizar si el envase está abierto o dañado
 Fabricante	

Smith&Nephew Colombia SAS
Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso
3, Bogotá
Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

◇Marca registrada
Smith&Nephew