

ALLEVYN[◇] Ag GENTLE BORDER, apósito hidrocelular trilaminar con plata y adhesivo de silicona.



Descripción

ALLEVYN Ag GENTLE BORDER es un apósito hidrocelular, trilaminar, antimicrobiano y absorbente, que consiste en una capa central hidrocelular con capacidad de absorción, que contiene sulfadiazina argéntica, situada entre una capa de poliuretano microperforada de contacto con la lesión con adhesivo de silicona y una película de poliuretano externa impermeable. El apósito proporciona una barrera eficaz contra la contaminación microbiana, protegiendo la lesión contra microorganismos patógenos invasivos, ayudando de esta manera a una curación más rápida. La sulfadiazina argéntica es efectiva contra los microorganismos presentes en el apósito y en la lesión. En presencia de exudado el apósito ayuda a mantener un ambiente húmedo en la herida.

Indicaciones

ALLEVYN Ag GENTLE BORDER es un apósito antimicrobiano absorbente para la cicatrización por segunda intención de lesiones exudativas crónicas y agudas, de espesor total o parcial, superficiales, con tejido de granulación, tales como: úlceras por presión, úlceras venosas, úlceras diabéticas, quemaduras, zonas donantes, úlceras fungosas/malignas y lesiones quirúrgicas dehiscentes.

ALLEVYN Ag GENTLE BORDER puede utilizarse en lesiones infectadas. Cuando el producto se utilice en lesiones infectadas, éstas deben tratarse según el protocolo clínico local.

Contraindicaciones

No utilizar en pacientes con hipersensibilidad conocida a la sulfadiazina argéntica o a las sulfonamidas. Debido a que las sulfonamidas causan kernicterus, no utilizar ALLEVYN Ag GENTLE BORDER en mujeres en avanzado estado de gestación o en periodo de lactancia, en bebés prematuros o en recién nacidos durante los primeros meses de vida.

Características

- Propiedades anti-microbianas, efectivo contra un amplio espectro de microorganismos patógenos presentes en la lesión. Liberación sostenida de plata en el lecho de la lesión.
- No se adhiere al lecho de la lesión.
- Puede retirarse y colocarse: sin perder las propiedades adherentes.
- Elevada capacidad de absorción: gracias a su capa central hidrocelular.
- Promueve la cicatrización de la lesión.
- Conformable, fácilmente adaptable a cualquier zona del cuerpo.
- Minimiza el riesgo de maceración de la piel.
- Suave y acolchado, gran confort para el paciente.
- Adhesivo de silicona de alta tolerancia cutánea que asegura la retirada atraumática
- Mínimos cambios de apósito, puede permanecer en la lesión hasta 7 días según criterio clínico.
- Fácil de aplicar y retirar.

Instrucciones de uso

1. Limpiar la lesión según los protocolos locales.
2. Seleccionar el apósito un poco más grande que la lesión.
3. Preparar y limpiar la piel perilesional secando cualquier exceso de humedad. Para asegurarse el contacto con la lesión, deberá retirarse el exceso de vello alrededor de la misma, si fuera necesario.
4. Sacar el apósito de su envase original mediante una técnica aséptica
5. Retirar el papel protector del apósito ALLEVYN Ag GENTLE BORDER
6. Colocar el apósito alisándolo encima de la lesión y retirar el papel protector restante.
7. Puede cortarse, especialmente para la curación de heridas en rodillas, codos y otras zonas de difícil acceso Léase detenidamente las instrucciones de uso contenidas en el envase antes de su aplicación.

Composición

Película exterior: Film de poliuretano.

Capa central: Capa hidrocelular de poliuretano con sulfadiazina argéntica.

Capa de contacto: Capa de poliuretano microperforada. Masa adhesiva: Silicona

Especificaciones técnicas

Dimensiones: nominal + 0,5 cm.

Peso: 500 – 700 g/m².

Capacidad de absorción: mín. 30 g/100 cm².

Permeabilidad al vapor de agua: 700 – 4000 g/m² 24 horas.

Adhesividad al acero: mín. 1 N/cm.

ALLEVYN[◇] Ag GENTLE BORDER, apósito hidrocélular trilaminar con plata y adhesivo de silicona.

Presentación

Código Producto	Descripción	Unidades / Envase	Unidad mínima de venta	Código EAN
66800460	ALLEVYN Ag GENTLE BORDER 7,5 cm x 7,5 cm	10	10	05000223465964
66800462	ALLEVYN Ag GENTLE BORDER 12,5 cm x 12,5 cm	10	10	05000223466022
66800463	ALLEVYN Ag GENTLE BORDER 17,5 cm x 17,5 cm	10	10	05000223466053

Re. San.: INVIMA 2013DM-0010162

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE 00356 Clase CE III, estéril Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001:2008 		STERILE EO	 24 meses     	 Smith & Nephew Medical Limited Hull HU3 2BN England. Distribuidor Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos

	No contiene látex		Producto esterilizado por irradiación
	Caducidad		No reutilizar
	Manténgase en lugar seco		Temperatura de almacenamiento
	No exponer el producto a la radiación solar		No utilizar si el envase está abierto o dañado
	Fabricante		