

Ficha técnica

ELECT[◇] IV

Apósito de poliuretano estéril con marco de aplicación para fijación de catéteres.



Características

- Película transpirable que permite intercambio de vapor, humedad y oxígeno.
- Apósito transparente.
- La película es una capa protectora.
- Puede durar puesto hasta 7 días según criterio clínico.
- Con marco de aplicación
- El producto está esterilizado.
- Adaptable y flexible.
- Costo efectivo

Descripción

ELECT IV es un apósito transparente hecho de película de poliuretano ultra delgada, impregnado con un adhesivo hipoalergénico, para generar una adecuada fijación de catéteres protegiendo la piel circundante.

Indicaciones

- Fijación del catéter.
- Fomento de ambiente húmedo en heridas superficiales.

Beneficios

- Puede reducir los riesgos de maceración de la piel.
- Permite una inspección y visualización continua del sitio.
- Puede reducir el riesgo de infecciones secundarias.
- Permite reducir los cambios de apósito.
- Permite que el apósito se aplique de una manera rápida y aséptica.
- Reduce el riesgo de contaminación bacteriana.
- Fácil de usar.

Instrucciones de uso

- Realice asepsia y antisepsia según protocolos clínicos locales.
- Abra el papel del empaque y saque el producto.
- Remueva el papel de liberación del respaldo en uno de los lados, aplique el producto a la herida o péguelo al punto fijo del catéter y después retire el papel de liberación del marco de aplicación.
- Con cuidado presione los bordes del apósito en la piel del paciente para que haya un mejor contacto.
- Al remover el apósito: con suavidad y cuidado hale y estire la película de forma paralela a la piel para prevenir lesiones.

Contraindicaciones

Ninguna.

Presentación

Código Producto	Medida	Unidades por Caja
53IV0607	6 cm x 7 cm	100
53IV1012	10 cm x 12 cm	50

Re. San.: INVIMA 2017DM- 0016128

Números EAN

Código Producto	Código barras de bolsa	Código barras de cartón
53IV0607	6937935310055	6937935340021
53IV1012	6937935310062	6937935340038