

Ficha Técnica

ALLEVYN[◇] GENTLE BORDER HEEL, apósito hidrocelular trilaminar con adhesivo de silicona.



Características

- Diseñado para adaptarse a cualquier zona anatómica del cuerpo y zonas de difícil fijación y aplicación.
- Uso en prevención: contribuye a la reducción del riesgo de úlceras por presión.
- Elevada capacidad de alivio de presión y absorción: gracias a su capa central hidrocelular.
- No se adhiere al lecho de la lesión.
- Promueve la cicatrización de la lesión.
- Suave, minimiza el trauma durante los cambios de apósito.
- Puede retirarse y colocarse: sin perder las propiedades adherentes, permitiendo valorar piel cuando se usa en prevención
- Conformable, fácilmente adaptable a cualquier zona del cuerpo.
- Minimiza el riesgo de maceración de la piel.
- Película exterior impermeable, actúa como barrera bacteriana previniendo la contaminación de la lesión.
- Adhesivo de silicona de elevada tolerancia cutánea.
- puede permanecer en la lesión hasta 7 días, según criterio clínico.
- Fácil de usar y retirar.

Descripción

El apósito ALLEVYN[™] GENTLE BORDER HEEL es un apósito hidrocelular, trilaminar con adhesivo de silicona, compuesto por una capa absorbente hidrocelular entre una capa adhesiva de silicona perforada de contacto con la lesión y una capa exterior impermeable altamente transpirable.

Modo de acción

El apósito hidrocelular trilaminar ALLEVYN[™] GENTLE BORDER HEEL facilita el control de la presión y el fluido proporcionando el entorno húmedo más óptimo para la lesión lo que da como resultado una cicatrización más rápida y reduce al mínimo el riesgo de maceración. La capa de contacto a la piel y la lesión de ALLEVYN[™] GENTLE BORDER HEEL está recubierta de un adhesivo de silicona suave que asegura la retirada sin trauma durante los cambios de apósito. ALLEVYN[™] GENTLE BORDER HEEL puede quitarse y volverse a colocar sin perder sus propiedades adherentes, es por tanto reposicionable y fácil de aplicar y retirar.

Indicaciones

Prevención: ALLEVYN[™] GENTLE BORDER HEEL contribuye al protocolo de reducción de la presión cuando se utiliza conjuntamente con dispositivos de alivio de la presión y las medidas estándar según los protocolos locales.

Tratamiento: Heridas agudas o crónicas, moderadamente exudativas, en talón, codo, rodilla, sacro y otras zonas difíciles. ALLEVYN[™] GENTLE BORDER HEEL puede utilizarse en combinación con INTRASITE Gel para el tratamiento de lesiones con tejido desvitalizado. ALLEVYN[™] GENTLE BORDER HEEL está indicado para su uso en pieles frágiles.

Instrucciones de uso:

1. Preparar la piel (en prevención) o el lecho de la herida según protocolo local.
2. Seleccionar el tamaño de apósito adecuado.
3. Preparar y limpiar la piel alrededor de la lesión, quitando el exceso de humedad. De ser posible retirar el exceso de vello para optimizar adherencia.
4. Retirar los papeles protectores según se indica en el sobre, empezar retirando el papel posterior de protección de ALLEVYN[™] GENTLE BORDER HEEL y fijar la capa adhesiva del apósito sobre la piel.
5. Seguir las instrucciones de aplicación tal como se indica en el sobre.
6. Alisar el apósito sobre la lesión, retirando el resto de papel posterior de protección y comprobar que el apósito se ha adherido completamente alrededor de la lesión.
7. ALLEVYN[™] GENTLE BORDER HEEL puede cortarse especialmente para uso en prevención y permite adaptarse en zonas difíciles (codos, rodilla, sacro, hombro etc).

Precauciones

No utilizar los apósitos ALLEVYN Non-Adhesive con agentes oxidantes tales como soluciones de hipoclorito o peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), ya que éstos pueden destruir su componente de poliuretano absorbente. El enrojecimiento de la piel periulesional después de utilizar ALLEVYN Non-Adhesive es poco frecuente. En algunos casos esto está relacionado con la irritación de la piel frágil, en otros puede deberse a que el exudado de la lesión permanece en contacto con la piel normal durante períodos prolongados de tiempo.

En algunos casos, muy infrecuentes se ha descrito sensibilidad al apósito. Si se produce enrojecimiento o sensibilidad, discontinuar su uso.

ALLEVYN™ GENTLE BORDER HEEL, apósito hidrocelular trilaminar con adhesivo de silicona.

Composición

Película exterior: Film de poliuretano.
Capa central: Capa hidrocelular de poliuretano.
Capa de contacto autoadherente: Capa de poliuretano microperforada.
Masa adhesiva: Silicona.

Especificaciones técnicas

Peso del apósito: mín. 400 g/m² (almohadillado).
180 – 260 g/m² (masa adhesiva).
Capacidad de absorción: mín. 35 g/100 cm².
Extensibilidad: 5,6 N/cm
Permeabilidad al vapor de agua: 1000 – 3500 g/m² 24hrs a 37°C.

Presentación

Código Product	Descripción	Unid / env	Und. Mín venta	Código EAN
66800506	ALLEVYN GENTLE BORDER HEEL 23 cm x 23,5	5	5	0500022346524

Re. San.: INVIMA 2012DM-0001719-R2
INVIMA 2020DM-0021584

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricant
ON n° 0086 CE n° CE 00356 Clase CE IIb, estéril Smith & Nephew, ISO 9001:2008 			 24 meses   	 Smith & Nephew Wound Management- UK Distribuidor Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos

 No contiene látex	 Producto esterilizado con óxido de etileno
 Caducidad	 No reutilizar
 Manténgase en lugar seco	 Temperatura de almacenamiento
 No exponer el producto a la radiación solar	 No utilizar si el envase está abierto o dañado
 Fabricante	

Smith&Nephew Colombia SAS

Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3,
Bogotá
Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

™Marca registrada
Smith&Nephew