

Ficha Técnica

ALLEVYN™ NON ADHESIVE, apósito hidrocelular trilaminar sin adhesivo.



Características

- Elevada capacidad de absorción, gracias a su capa central.
- Bordes sellados para evitar filtración de exudado.
- Mantiene su capacidad de absorción incluso bajo elastocompresión.
- Promueve la cicatrización de la lesión.
- No adhesivo.
- No se descompone con el exudado.
- Textura suave que proporciona gran confort para el paciente.
- Mínimos cambios de apósito, puede permanecer en la lesión hasta 7 días según criterio clínico.
- Fácil de aplicar y retirar
- Contribuye al protocolo de alivio de la presión.

Descripción

El apósito ALLEVYN™ NON ADHESIVE es un apósito hidrocelular, trilaminar sin adhesivo, compuesto por una capa absorbente hidrocelular entre una capa no adhesiva microperforada de contacto con la lesión y una capa exterior altamente transpirable.

Modo de acción

El apósito hidrocelular trilaminar ALLEVYN™ NON ADHESIVE facilita el control de la presión y el fluido, gracias a la capa central formada por cavidades hidrocelulares de poliuretano se consigue una rápida absorción inicial. El exudado se absorbe primero por capilaridad y posteriormente por osmosis pasando el fluido desde los espacios intercelulares hacia el interior de las cavidades hidrocelulares, proporcionando el entorno húmedo más óptimo para la lesión lo que da como resultado una cicatrización más rápida y reduce al mínimo el riesgo de maceración. La capa de contacto a la piel y la lesión de ALLEVYN™ NON ADHESIVE no contiene adhesivos, asegurando la retirada sin trauma durante los cambios de apósito. Es fácil de aplicar y retirar.

Indicaciones

Prevención: ALLEVYN™ NON ADHESIVE contribuye al protocolo de reducción de la presión cuando se utiliza conjuntamente con dispositivos de alivio de la presión y las medidas estándar según los protocolos locales.

Tratamiento: heridas agudas o crónicas, moderadamente exudativas, en cualquier zona del cuerpo.

ALLEVYN™ NON ADHESIVE puede utilizarse en combinación con INTRASITE™ Gel para el tratamiento de lesiones con tejido desvitalizado y está indicado para su uso en pieles frágiles.

Instrucciones de uso:

1. Preparar el lecho de la herida según protocolo local.
2. Preparar y limpiar la piel alrededor de la lesión, quitando el exceso de humedad.
3. Aplicar la superficie blanca del apósito sobre la zona a proteger o sobre el lecho de la herida, para este caso, fije con cintas adhesivas de forma lateral (nunca circular, para evitar efecto torniquete), vendaje suave, malla elástica, etc. Puede utilizarse bajo elastocompresión.
4. ALLEVYN™ NON ADHESIVE puede cortarse especialmente para uso en prevención y permite adaptarse en zonas difíciles.

Precauciones

No utilizar los apósitos ALLEVYN Non-Adhesive con agentes oxidantes tales como soluciones de hipoclorito o peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), ya que éstos pueden destruir su componente de poliuretano absorbente. El enrojecimiento de la piel perilesional después de utilizar ALLEVYN Non-Adhesive es poco frecuente. En algunos casos esto está relacionado con la irritación de la piel frágil, en otros puede deberse a que el exudado de la lesión permanece en contacto con la piel normal durante períodos prolongados de tiempo. En algunos casos, muy infrecuentes se ha descrito sensibilidad al apósito. Si se produce enrojecimiento o sensibilidad, discontinuar su uso.

ALLEVYN™ NON ADHESIVE, apósito hidrocelular trilaminar sin adhesivo.

Composición

Película exterior: Poliuretano.
Capa central: Capa hidrocelular de poliuretano.
Capa de contacto no adherente: Poliuretano microperforado.

Especificaciones técnicas

Peso del apósito: mín. 600g/m2.
Grosor: 0,5 – 0,7cm.
Capacidad de absorción: mín. 60 g/100 cm2.
Permeabilidad al vapor de agua: mín. 1000 g/m2 24hrs a 37°C..

Presentación

Código Product	Descripción	Unidades/envase	Unidad mínima de venta	Código EAN
66007637	ALLEVYN NON ADHESIVE 10 cm X 10 cm	1	10	5000223076375
66000093	ALLEVYN NON ADHESIVE 15 cm X 15 cm	1	10	5000223412210
66007638	ALLEVYN NON ADHESIVE 20 cm X 20 cm	1	10	

Re. San.: INVIMA 2012DM-0001719-R2
INVIMA 2020DM-0021584

Certificación	Composici	Esterilidad	Conservación	Fabrica
ON n° 0086 CE n° CE 00356 Clase CE IIb, estéril Smith & Nephew, ISO 9001:2008 			 24 meses    	 Smith & Nephew Wound Management- UK Distribuidor Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos

	No contiene látex		Producto esterilizado con óxido de etileno
	Caducidad		No reutilizar
	Manténgase en lugar seco		Temperatura de almacenamiento
	No exponer el producto a la radiación solar		No utilizar si el envase está abierto o dañado
	Fabricante		

Smith&Nephew Colombia SAS

Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso
3, Bogotá
Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

™Marca registrada
Smith&Nephew