

Ficha Técnica

ALLEVYN[◇] GENTLE BORDER, apósito hidrocelular con adhesivo de silicona.



Características

- Uso en prevención: reduce el riesgo de úlceras por presión.
- No se adhiere al lecho de la lesión.
- Promueve la cicatrización de la lesión.
- Suave, minimiza el trauma durante los cambios de apósito.
 - Puede retirarse y colocarse: sin perder las propiedades adherentes, permitiendo valorar piel cuando se usa en prevención
- Conformable, fácilmente adaptable a cualquier zona del cuerpo.
- Minimiza el riesgo de maceración de la piel.
- Película exterior impermeable, actúa como barrera bacteriana previniendo la contaminación de la lesión.
- Adhesivo de silicona de elevada tolerancia cutánea.
 - Puede permanecer en la lesión hasta 7 días, según criterio clínico.
- Fácil de usar y retirar.

Descripción

El apósito ALLEVYN GENTLE BORDER es un apósito hidrocelular trilaminar, compuesto por una capa central hidrocelular absorbente entre una capa perforada de contacto con la lesión cubierta con un adhesivo suave de silicona y una capa exterior impermeable altamente transpirable.

Modo de acción

El apósito de tres capas ALLEVYN GENTLE BORDER facilita el control del fluido proporcionando el entorno húmedo más óptimo para la lesión lo que da como resultado la curación más rápida y reduce al mínimo el riesgo de maceración. En prevención del riesgo de lesiones por presión, disminuye la presión en la zona a proteger. La capa de contacto con la lesión de ALLEVYN GENTLE BORDER está recubierta de un adhesivo de silicona suave, permite la aplicación de apósitos primarios si fuera necesario, y asegura la retirada sin trauma durante los cambios de apósito. ALLEVYN GENTLE BORDER es fácil de aplicar y retirar.

Indicaciones

Prevención: ALLEVYN GENTLE BORDER contribuye al protocolo de reducción de la presión cuando se utiliza conjuntamente con dispositivos de alivio de la presión y las medidas estándar según los protocolos locales. **Tratamiento:** Heridas agudas o crónicas, moderadamente exudativas, en talón, rodilla, sacro y otras zonas difíciles.

Precauciones

No utilizar con agentes oxidantes tales como soluciones de hipoclorito o peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), ya que éstos pueden destruir su componente de poliuretano absorbente.

Instrucciones de uso

1. Prevención: limpiar y secar piel a proteger.
2. Limpiar la lesión según el protocolo local.
3. Seleccionar el tamaño de apósito adecuado. ~
4. Preparar y limpiar la piel alrededor de la lesión, quitando el exceso de humedad. Debe recortarse el exceso de vello de alrededor de la lesión a fin de asegurar el contacto más próximo con la lesión.
5. Empezar retirando el papel posterior de protección de ALLEVYN GENTLE BORDER y fijar la capa adhesiva del apósito sobre la piel.
6. Alisar el apósito sobre la lesión, retirando el resto del papel posterior de protección y comprobar que el apósito se ha adherido completamente alrededor de la lesión.
7. ALLEVYN GENTLE BORDER puede cortarse especialmente para tratar lesiones en el talón, codos y otras zonas difíciles. Cuando corte el apósito utilice siempre técnica aséptica.
8. Puede utilizarse como apósito secundario en combinación con otros apósitos para la cicatrización de heridas.

Composición

Película exterior: Film de poliuretano.

Capa central: Capa hidrocelular de poliuretano.

Capa de contacto autoadherente: Capa de poliuretano micoperforada. Masa adhesiva: Silicona

Especificaciones técnicas

Peso del apósito: mín. 400g/m² (almohadillado)
180-260 g/m² (masa adhesiva)

Capacidad de absorción: mín 35 g/100 cm²

Extensibilidad: 2.2 N/cm

Permeabilidad al vapor de agua: 1000-3500 g/m² 24 horas a 37°C Grosor: 0.4cm

ALLEVYN[◇] GENTLE BORDER, apósito hidrocélular con adhesivo de silicona

Presentación

Código Producto	Descripción	Unidades / Envase	Unidad mínima de venta	Código EAN
66800269	ALLEVYN GENTLE BORDER 7,5 cm x 7,5 cm	10	10	05000223463885
66800270	ALLEVYN GENTLE BORDER 10 cm x 10 cm	10	10	05000223463915
66800272	ALLEVYN GENTLE BORDER 12,5 cm x 12,5 cm	10	10	05000223463977
66800273	ALLEVYN GENTLE BORDER 17,5 cm x 17,5 cm	10	10	05000223464004

INVIMA 2020DM-0021584
INVIMA 2012DM-001719-R2

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE 00356 Clase CE III, estéril Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001:2008 			 24 meses   	 Smith & Nephew Medical Limited Hull HU3 2BN England. Distribuidor Smith & Nephew, SAU Distribuidor Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos



No contiene látex



Caducidad



Manténgase en lugar seco



No exponer el producto a la radiación solar



Fabricante



Producto esterilizado por irradiación



No reutilizar



Temperatura de almacenamiento



No utilizar si el envase está abierto
o dañado

Smith&Nephew Colombia SAS
Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso
3, Bogotá
Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

◇Marca registrada
Smith&Nephew