

Ficha Técnica

ALLEVYN[◇] SACRUM, apósito hidrocelular trilaminar adhesivo.



Características

- Se ajusta perfectamente a la zona sacra.
- Adhesivo de alta tolerancia cutánea.
- No se adhiere al lecho de la lesión.
- Conformable, fácilmente adaptable a los contornos del cuerpo.
- Absorción moderada gracias a su capa central hidrocelular.
- Bordes sellados y con forma redondeada protegen ante fugas.
- Adaptable.
- Película exterior impermeable, actúa como barrera bacteriana.
- Previene la contaminación de la lesión.
- Minimiza el riesgo de maceración.
- Suave y anatómico, ofrece confort al paciente.
- Puede permanecer hasta 7 días, según criterio clínico

Descripción

Apósito hidrocelular con estructura trilaminar compuesto por una capa adhesiva en contacto con la herida, otra central hidrocelular suave y altamente absorbente y una externa impermeable que actúa de barrera bacteriana y permeable al vapor de agua.

Modo de acción

El sacro es la zona más usual para la formación de úlceras por presión. ALLEVYN SACRUM ha sido especialmente diseñado para adaptarse anatómicamente y facilitar el tratamiento de úlceras por presión, combinado con la probada eficacia de Allevyn Adhesive, sobre la zona cra. ALLEVYN SACRUM absorbe el exceso de exudado al mismo tiempo que mantiene un entorno húmedo adecuado para facilitar el proceso de cicatrización. La elevada capacidad de absorción se debe a la capa central formada por hidrocelulas de poliuretano. El exudado se absorbe primero por capilaridad y posteriormente por osmosis pasando el fluido desde los espacios intercelulares hacia el interior de las hidrocelulas. La película exterior es un film impermeable que actúa como barrera bacteriana y protege la lesión de fluidos externos, por lo que previene posibles contaminaciones de la lesión.

ALLEVYN SACRUM está especialmente diseñado para su utilización en lesiones que por su ubicación requieran un apósito adhesivo. El adhesivo se adhiere a la piel sana pero no al lecho de la lesión y ha demostrado ser de bajo riesgo ante la irritación cutánea.

Indicaciones

Úlceras por presión en fase de granulación en zona sacra.

Instrucciones de uso

1. Limpiar la lesión según los protocolos locales.
2. Seleccionar el tamaño del apósito adecuado.
3. Preparar y limpiar la piel perilesional secando cualquier exceso de humedad. Para asegurar el contacto con la úlcera, deberá retirarse el exceso de vello alrededor de la misma, si fuera necesario.
4. Retirar el papel protector del apósito ALLEVYN SACRUM.
5. Colocar el apósito situando la porción más estrecha a 2 cm, como mínimo, del esfínter anal.
6. Alisar el apósito encima de la lesión y quitar el papel protector restante

Composición:

Película exterior: Film de poliuretano.
Capa central: Capa hidrocelular de poliuretano y polietilenglicol (PEG).
Capa de contacto: Capa de poliuretano microperforada. Masa adhesiva: Acrílica.

Especificaciones técnicas:

Capacidad de absorción: mín. 35 g/100 cm². Extensibilidad máx: 35g/cm²

Permeabilidad al vapor del agua: 1000-3500 g/m² 24 horas.

ALLEVYN[®] SACRUM, apósito hidrocélular trilaminar adhesivo.

Presentación

Código Producto	Descripción	Unidad / Envase	Unidad mínima de venta	Código EAN
66000451	ALLEVYN SACRUM 22,5 cm x 22,1 cm	10	10	05000223426743
66000700	ALLEVYN SACRUM 17 cm x 17 cm	10	10	05000223441500

Re. San.: INVIMA 2012DM-001719-R2
INVIMA 2020DM-0021584

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE 00356 Clase CE IIb, estéril Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001:2008 			 24 meses   	 Smith & Nephew Medical Limited Hull HU3 2BN England. Distribuidor Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos

 No contiene látex	 Producto esterilizado por irradiación
 Caducidad	 No reutilizar
 Manténgase en lugar seco	 Temperatura de almacenamiento
 No exponer el producto a la radiación solar	 No utilizar si el envase está abierto o dañado
 Fabricante	

Smith&Nephew Colombia SAS
Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3,
Bogotá
Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

™Marca registrada
Smith&Nephew