

Ficha Técnica

OPSITE[®] FLEXIGRID apósito transparente de poliuretano.



Descripción

OPSITE FLEXIGRID es una película transparente y adhesiva, impermeable al agua y a la humedad, adaptable a cualquier zona y extensible. La película de OPSITE FLEXIGRID está impregnada en una de sus caras con un adhesivo acrílico, protegido por un papel siliconado. Por la otra cara presenta un soporte no extensible, de plástico transparente, para facilitar su manejo. El soporte lleva impreso, una cuadrícula de color verde que permite dibujar el contorno de la herida y controlar su tamaño.

Modo de acción

OPSITE FLEXIGRID retiene el exudado natural que contiene nutrientes vitales necesarios para el crecimiento de las células y glóbulos blancos para prevenir infecciones. La evaporación del exceso de humedad disminuye el riesgo de maceración de la piel. Así se consigue una cicatrización más rápida y menos dolorosa.

Indicaciones

OPSITE FLEXIGRID está indicado para heridas superficiales como rozaduras, quemaduras menores, cortes y abrasiones, profilaxis y protección de lesiones de piel por fricción, protección de piel expuesta a efluentes (por ejemplo piel periestomal), disminución del dolor en heridas neuropáticas.

Características

- Cicatrización más rápida y menos dolorosa.
- Adhesivo acrílico hipoalergénico.
- Impermeable, permite el aseo del paciente.
- Técnica de aplicación sencilla y efectiva.
- Adaptable a zonas difíciles (tobillo, codo o rodilla).
- Sistema único que permite la medición de la herida.
- Mínimos cambios de apósito, según criterio clínico.
- Extremadamente resistente a la rotura.
- Barrera bacteriana.

Instrucciones de uso

- Limpiar y secar la zona de la aplicación de OPSITE FLEXIGRID. Verificar que la piel se encuentra libre de sustancias oleosas. Se recomienda retirar el exceso de vello para asegurar una buena adherencia del producto.
- Retirar el papel siliconado nº1 y situar el apósito sobre la lesión y alisar con la mano para conseguir una buena adherencia separar a continuación la pestaña nº2 y ejercer una suave presión en esta zona.
- En el caso de herida, dibujar sobre el soporte cuadrículado el contorno de la misma.
- Retirar el soporte cuadrículado, Si se ha dibujado en la cuadrícula, se sugiere guardarla para llevar a cabo un control evolutivo de la lesión.

Composición

Soporte: poliuretano
Adhesivo: acrílico

Especificaciones técnicas

Peso del film de poliuretano: 25 - 40 g/m²
Peso del adhesivo: 27-43 g/m²
Adhesividad: 150-800 g/cm²-1
Permeabilidad al vapor de agua: mín. 500 g/m² 24h a 37°C Extensibilidad: máx. 0,3 N/cm

OPSITE◊ FLEXIGRID apósito transparente de poliuretano.

Presentación

Código Producto	Descripción	Unidades Por caja	Unidades Por caja	Código EAN
4628	OPSITE FLEXIGRID 6 cm x 7 cm	100	100	05000223046286
4630	OPSITE FLEXIGRID 12 cm x 10 cm	50	50	05000223046309
4631	OPSITE FLEXIGRID 15 cm x 20 cm	10	10	05000223046316
4632	OPSITE FLEXIGRID 12 cm x 25 cm	20	20	05000223046323

Re. San.: INVIMA 2015DM-001521-R1

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON nº 0086 CE nº CE00356 Clase CE IIa, estéril	LATEX FREE	STERILE EO	5 años Manténgase en lugar seco No exponer el producto a la radiación solar 25°C No reutilizar No utilizar si el envase está abierto o dañado	Smith & Nephew Medical Limited Hull HU3 2B Distribuidor Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos

LATEX FREE No contiene látex Caducidad Manténgase en lugar seco No exponer el producto a la radiación solar Fabricante	STERILE R Producto esterilizado por irradiación No reutilizar Temperatura de almacenamiento No utilizar si el envase está abierto o dañado
--	---

Smith&Nephew Colombia SAS
Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3,
Bogotá
Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

™Marca registrada
Smith&Nephew