

Ficha Técnica

OPSITE[®] POST-OP, apósito impermeable transparente con almohadilla absorbente.



Descripción

OPSITE POST-OP es un apósito compuesto de una película transparente y adhesiva, impermeable al agua y a la humedad, adaptable a cualquier zona y extensible; y un absorbente no adherente.

Modo de acción

OPSITE POST-OP es un apósito de un film de poliuretano translúcido, extensible, resistente al agua y permeable al vapor de agua, impregnado por una de sus caras de un adhesivo acrílico, protegido por dos papeles siliconados solapados; y un apósito absorbente no adherente, constituido por una lámina de tejido no tejido, un acolchado de algodón - fibra acrílica y una lámina de poliéster perforado.

El film de poliuretano presenta en una de sus caras un soporte no extensible de plástico transparente para facilitar el manejo del apósito.

Indicaciones

OPSITE POST-OP está indicado para heridas postquirúrgicas, cortes, laceraciones y abrasiones.

Características

- Elevada capacidad de absorción.
- Adhesivo acrílico hipoalergénico.
- Impermeable, permite el aseo del paciente.
- Elevada tasa de transpiración (MVTR).
- Baja adherencia.
- Bordes redondeados / film delgado.
- Altamente conformable y extensible.
- Barrera bacteriana.

Instrucciones de uso

1. Limpiar y secar la zona antes de la aplicación de OPSITE POST-OP.
2. Retirar el papel protector superior.
3. Colocar el apósito aplicando poca presión.
4. Retirar el segundo papel protector y aplicar OPSITE POST-OP encima de la lesión alisándolo sobre la misma.
5. Retirar el soporte de plástico.

Composición

Soporte: film de poliuretano.

Adhesivo: adhesivo acrílico hipoalergénico.

Apósito: fibras de algodón y acrílicas. Film de poliéster microperforado.

Especificaciones técnicas:

Peso del film de poliuretano: 25 -40 g/m².

Peso del adhesivo: 27- 43 g/m².

Peso del apósito: 150 g/m² mín.

Capacidad de retención de agua: 500 g/m² /14h a 37oC mín.

Proporción de transmisión de agua: 1500 g/m² /24h a 37oC mín.

OPSITE[◇] POST-OP, apósito impermeable transparente con almohadilla absorbente.

Presentación

Código Producto	Medidas	Unidades Envase	Unidad mínima de venta	Código EAN
66000708	6,5 x 5 cm	100	100	05000223441227
66000709	9,5 x 8,5 cm	20	20	05000223441258
66000712	15,5 x 8,5 cm	20	20	05000223441340
66000713	20 x 10 cm	20	20	05000223441371
66000714	25 x 10 cm	20	20	05000223441401
66000715	30 x 10 cm	20	20	05000223441432

Re. San.: INVIMA 2015DM-0003467-R1

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON nº 0086 CE nº CE56481 Clase CE CE I, estéril Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001:2008 			 5 años   	 Smith & Nephew Medical Limited Hull HU3 2BN England. Distribuidor Smith&Nephew Colombia SAS

Leyenda símbolos

	No contiene látex		Producto esterilizado por
	Caducidad		irradiación No reutilizar
	Manténgase en lugar		Temperatura de almacenamiento
seco			No utilizar si el envase está abierto o dañado
	No exponer el producto a la radiación		
	solar Fabricante		

Smith&Nephew Colombia SAS
Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3,
Bogotá
Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

◇Marca registrada
Smith&Nephew