

Ficha Técnica

ELECTOFIX, Apósito adhesivo hipo alergénico en rollo para sujeción



Características

- Capa exterior de tela no tejida, elástica.
- Rollo con adhesivo hipoalergénico
- Fácil de usar
- Excelente fijación
- Suave con la piel

Descripción

Electofix es un apósito de tela no tejida adhesiva en rollo que permite una sujeción firme, durable y mantiene una humedad adecuada; previene la acumulación de transpiración y fluido debajo del apósito primario.

Modo de Acción

Electofix, es un apósito de tela no tejida en rollo, que permite transpiración de la piel debajo del apósito. El adhesivo hipoalergénico minimiza el riesgo de daño en la piel al retirarse si se usa una técnica apropiada, especialmente después de periodos largos.

Este apósito no se encuentra estéril, por lo que su uso debe limitarse a la sujeción de apósitos primarios o dispositivos médicos en piel sana. No debe colocarse directamente sobre heridas o piel lesionada.

Indicaciones

Electofix está indicado para:

- Retención de apósitos primarios de baja adherencia.
- Fijación de sondas, drenes.
- Fijación de drenajes urinarios, etc.

Beneficios

1. Permite el intercambio gaseoso.
2. Presentación en rollo que permite una fijación sencilla.
3. Adhesivo de excelente sujeción que no lastima la piel perilesional.
4. Fácilmente adaptable a cualquier zona del cuerpo.
5. Fácil aplicación.

Composición

- Película exterior: Tela no tejida
- Adhesivo: Acrílico hipoalergénico

Instrucciones

- Preparación

- Utilice los protocolos clínicos existentes para limpiar la piel.
- Seleccione el apósito primario del tamaño y forma adecuados y aplique conforme a las instrucciones del fabricante.
- Si es posible: recorte el exceso de vello de alrededor de la piel, a fin de asegurar el contacto más próximo con la herida.

- Aplicación del apósito:

- Corte el tamaño adecuado según su uso
 - Hale suavemente para desprender el papel protector
 - Retire o despegue el papel protector del adhesivo
 - Aplique el apósito de forma suave sin tensión
- Compruebe que la piel esté limpia, seca y libre de grasas, jabones o detergentes, quitando el exceso de humedad.
- Frecuencia de cambio del apósito
- El apósito se retira por razón necesaria, en función del apósito primario o dispositivo



ELECTOFIX, Apósito adhesivo hipo alergénico en rollo para sujeción

Presentación

Código Producto	Medidas	Unidades / Envase	Código EAN
66801758	5 cm x 10 mts	1	6937935340175
66801759	10 cm x 10 mts	1	6937935340182
66801760	15 cm x 10 mts	1	6937935340199

Re. San.: INVIMA 2018DM-0018379

Certificación	Esterilidad	Conservación	Fabricante
  Tipo de Riesgo IIA	No estéril 	 3 años  	 Shanghai ISO Medical Products Co., Ltd 999 Liu Chen Rd, Pudong New Area Shanghai, P.R. China. Distribuidor Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos

 No contiene látex	 Producto esterilizado por irradiación
 Caducidad	 No reutilizar
 Manténgase en lugar seco	 Temperatura de almacenamiento
 No exponer el producto a la radiación	 No utilizar si el envase está abierto o dañado
 solar Fabricante	

Smith&Nephew Colombia SAS
Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3,
Bogotá
Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

™ Marca registrada
Smith&Nephew