


DYONICS[®] 25, juego de tubos de flujo de entrada y tubos de paciente.

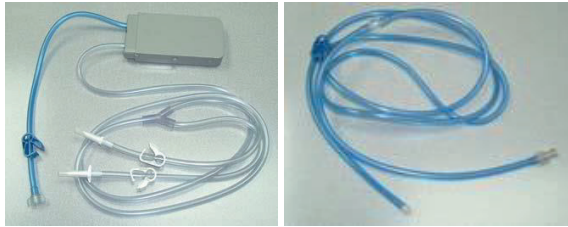

Características

Casete desechable para uso en varias cirugías en una misma jornada quirúrgica, opción coste-efectiva en el caso de 3 cirugías o más en la misma jornada.

Tubo de paciente no reesterilizable, de un solo uso.

Tubo de doble entrada (en Y).

Válvula de no-retorno en el tubo de paciente.

Descripción

El juego de tubos de flujo de entrada diarios y el juego de tubos de paciente ofrecen la posibilidad de cambiar los tubos de paciente entre intervenciones manteniendo el mismo casete y tubo de flujo de entrada de irrigación (Figura 1). El primer tubo tiene una trayectoria desde la bolsa de irrigación hasta el casete (A).

El segundo tubo (azul) (B) transporta el fluido desde el casete, a través de la cánula de irrigación, hasta el espacio de la articulación. Este segundo tubo termina en un conector Luer que permite cambiar el juego de tubos del paciente entre intervenciones (B y C).

Nota: El casete o tubos de flujo de entrada diario DYONICS[®] 25 se debe utilizar sólo para un día de intervención quirúrgica. No reesterilizable. No reutilice el juego de tubos de entrada para más de un día de intervención quirúrgica.

Indicaciones

Indicados para suministrar fluido de irrigación a la articulación en procedimientos quirúrgicos.

Composición

PVC (contiene DEHP, dietil hexil ftalato).

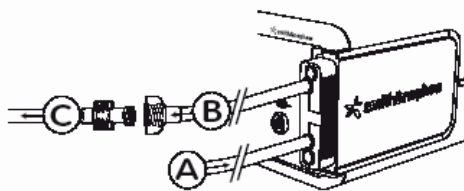


Figura 1: Juego de tubos de entrada y tubos de paciente DYONICS 25.

Presentación

Empaque individual por caja

Disposición Final

Una vez usado, este dispositivo puede constituir un posible riesgo biológico por lo que se deberá manejar de conformidad con los procedimientos médicos aceptados y los requisitos locales y nacionales aplicables. Desechar en contenedores o bolsas de producto contaminado y/o corto-punzante.

DYONICS[®] 25, juego de tubos de flujo de entrada y tubos de paciente.

Presentación

Código Producto	Descripción
7211007	DYONICS 25 Juego de tubos de flujo de entrada diarios (3 Uds.)
7211008	DYONICS 25 Juego de tubos de paciente (12 Uds.)

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE 00356 Clase CE IIa, estéril Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001:2008 	 		 1 año  	 Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA  Smith & Nephew York Science Park Heslington, York. YO10 5DF. UK Distribuidor Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos

	No contiene látex		Contiene DEHP
	Producto esterilizado con óxido de etileno		Caducidad
	No reutilizar		No utilizar si el envase está abierto o dañado
	Fabricante		Representante autorizado

Smith&Nephew Colombia SAS

Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, Bogotá
 Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

Reg. San.: INVIMA 2009DM-0004740
 Smith&Nephew Colombia SAS