

ECTRA II, Sistema endoscópico para la liberación de ligamentos



Características

- Incluye endoscopio/videoartroscopio para túnel carpiano.
- Permite una visualización completa y constante.
- Sistema de herramientas sencillas que eliminan posibles fallos mecánicos.
- También indicado para uso en fasciotomía plantar y liberación lateral extra articular.
- Dispone de un canal definido que limita la zona de corte y asiste al cirujano en la protección de las estructuras neurovasculares.

Descripción

Los sistemas para la liberación de ligamentos Smith & Nephew ECTRA® II permiten el acceso endoscópico al ligamento carpiano, la fascia plantar y el ligamento lateral extra articular, permitiendo su liberación con un control de visualización completo.

La clave de estos sistemas está en su cánula ranurada, que permite el acceso al ligamento a través de dos portales, es decir, el corte se puede realizar desde el extremo distal o proximal. Al mismo tiempo, con una buena circulación de aire, la realización de los 2 portales, disminuye al mínimo el empañamiento de la lente endoscópica optimizando la visualización.

Con las cuchillas/bisturís de un solo uso ECTRA del kit desechable, el cirujano puede elegir tanto la dirección como la profundidad de corte.

La cuchilla de sonda permite extraer la parte distal del ligamento a la vez que se protegen las estructuras neurovasculares palmares, gracias al corte proximal que permite. La parte roma de la cuchilla permite palpar para ayudar a cortar el sinovio y localizar el extremo del ligamento.

La cuchilla triangular realiza un corte en la zona superior para insertar la cuchilla retrógrada. También se utiliza en posteriores cortes que permiten cortar fibras individualmente.

La cuchilla retrógrada corta eficazmente el ligamento sin dañar el *palmaris brevis*. Su diseño pulido de la punta principal superior permite deslizarse entre el ligamento y músculo, mientras que la curva inferior cortante alcanza el ligamento.

También dispone de una almohadilla de mano que mejora el confort y toallitas que permiten limpiar el endoscopio sin quitárselo.

Indicaciones

El sistema está indicado para la liberación de los ligamentos siguientes, con objeto de paliar el dolor o restaurar la estabilidad en la zona circundante.

El sistema ECTRA II está diseñado exclusivamente para la liberación endoscópica del ligamento carpiano, la fascia plantar y el ligamento lateral extraarticular.

Esterilización

Este producto se suministra sin esterilizar. Se debe desarmar, limpiar y esterilizar antes de ser utilizado la primera vez y cada vez que se utilice posteriormente.

Los instrumentos pueden esterilizarse con gas o vapor, a excepción de los endoscopios, que deben esterilizarse en autoclave.


ECTRA II, Sistema endoscópico para la liberación de ligamentos

Presentación

Referencia	Descripción	
Disposable Procedure Kit		
4116	ECTRA II Procedure Kit, single use, disposable Contents: Probe knife, retrograde knife, triangle knife, hand pad, swabs	
4448	Triangle Knife, green, sterile, (box of 6). Disposable Knife	
4447	Probe Knife, beige, sterile, (box of 6). Disposable Knife	
4449	Retrograde Knife, blue, sterile, (box of 6). Disposable Knife	

ECTRA II System and individual components

- 3896 Carpal Tunnel Video Endoscope, 35mm
- 4144 Carpal Tunnel Endoscope
- 4120 Slotted Cannula
- 4432 Detachable Obturator Handle
- 4433 Conical Obturator
- 4434 Boat Nose Obturator
- 4435 Dissecting Obturator
- 4101 Blunt Dissector, curved
- 4452 Ragnell Retractor (2 included with system)
- 3856 Probe
- 4283 Palmar Arch Suppressor
- 4450 Hand Holder and Sterilization Tray with Cover
- 4141 Hand Strap
- 4153 ECTRA II Obturator set contents:
 - 4432 Detachable Obturator Handle
 - 4433 Conical Obturator
 - 4434 Boat Nose Obturator
 - 4435 Dissecting Obturator

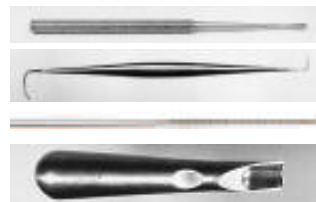

ECTRA II, Sistema endoscópico para la liberación de ligamentos

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE 506114 Clase CE IIA: Endoscopios, Kit desechable I: resto,	LATEX FREE	STERILE R Disposable kit NON STERILE Resto	 4 años: disposable kit  	 Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA EC REP Smith & Nephew Medical limited 101 Hessle Road Hull HU3 2BN Reino Unido Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos



Representante autorizado



No utilizar si el envase está abierto o dañado



Caducidad



No contiene látex



Producto esterilizado por irradiación



Producto no estéril



No reutilizar



Fabricante

Advanced Surgical Devices Division

Smith & Nephew, S.A.U

Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

informacion@smith-nephew.com www.smith-nephew.com