

INDICADOR ENDOBUTTON, instrumental reutilizable para la selección del dispositivo de fijación



Características

- **Ventanas y escala móvil**, permite conocer la longitud del túnel femoral y determinar el tamaño del dispositivo Endobutton CL Ultra.
- **Dispositivos de bloqueo**, permiten mantener de forma segura la escala móvil y el pin pasador en el sitio correcto.
- **Pin pasador calibrado**, incluye una marca claramente identificada para determinar la profundidad del túnel femoral.
- **El pin pasador facilita el paso de la sutura y el dispositivo de fijación.**
- **Compatible con el sistema de perforación flexible Guía CLANCY.**

Descripción

El Indicador ENDOBUTTON es un dispositivo de acero inoxidable reutilizable diseñado para ayudar al cirujano a seleccionar un dispositivo de fijación ENDOBUTTON CL Ultra. El dispositivo se ha diseñado para un uso repetido si se trata y manipula con el cuidado debido.

Indicaciones

El indicador ENDOBUTTON está ideado para el uso durante los procedimientos de reconstrucción ortopédica como la reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA)

Composición

Acero Inoxidable.

Limpieza y esterilización

Para su limpieza se recomienda utilizar detergentes enzimáticos de valor neutro de pH, entre 6,0 y 8,0; que formen poca espuma. No utilice detergentes con valores de pH superiores a 11,0. Lave y aclare con agua desionizada.

Puede esterilizarse mediante óxido de etileno o vapor. Los parámetros de tiempo y temperatura requeridos para la esterilización varían de acuerdo con el tipo de esterilizador, diseño del ciclo y material de embalaje.

Presentación

Código Producto	Descripción
72202544	Indicador Endobutton

Material asociado

Código Producto	Descripción
014508	Pin pasador con punta broca 2,4 mm 15" (cabeza de 2.7) con ojal. En caja de 6 unidades
72202009	Pin pasador con punta broca graduada 2,4 mm 15" (cabeza de 2.7) con ojal. En caja de 6 unidades
7207220	Pin pasador con punta trocar 2,4 mm 17" con ojal
7208678	Pin pasador con punta broca graduada 2,4 mm 15" con ojal.
72201594	Pin pasador flexible 2,4 mm. En caja de 5 unidades.



INDICADOR ENDOBUTTON, instrumental reutilizable para la selección del dispositivo de fijación

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE506114 Clase CE Ila: resto I: Indicador	LATEX FREE	 Indicador  Resto	 5 años: pins  	 Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA EC REP Smith & Nephew Medical limited 101 Hessle Road Hull HU3 2BN Reino Unido Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos



Representante autorizado



No contiene látex



No utilizar si el envase está abierto o dañado



Producto esterilizado por irradiación



Fabricante



No reutilizar



Caducidad



Producto no esterilizado

Advanced Surgical Devices Division

Smith & Nephew, S.A.U

Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

informacion@smith-nephew.com www.smith-nephew.com