


Q-Fix[®], implantes todo sutura

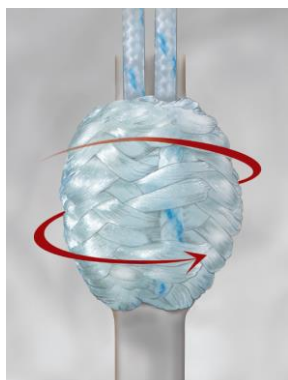

Descripción

El sistema de anclaje de suturas Q-Fix[®] consta de un implante (ancla) y los instrumentos asociados para facilitar la fijación del tejido al hueso.

El implante, disponible en los tamaños de 1,8 mm, 1,8 mm Mini y 2,8 mm, se fabrica con poliéster trenzado con sutura de polietileno de peso molecular ultra-elevado, y está precargado en una herramienta desechable diseñada para facilitar la inserción directa en un orificio del hueso practicando con broca o sacabocados.

Q-Fix utiliza un sistema de implementación activa que puede mejorar el rendimiento mecánico:

- Despliegue del estilo Pepper Grinder.
- Tira de sutura a 140N.
- El despliegue crea una fuerza de extracción y bajo desplazamiento.

Las guías curvas TRUJECTORY[®] es el sistema de perforación curva más preciso, menos de 1° de desviación. El sistema de perforación curvo Q-Fix fue diseñado para trabajar con el anclaje Q-FIX 1.8 mm y Q-FIX 1.8 mm Mini. Este nuevo sistema curvo ofrece un rendimiento líder en el mercado (medido como desviación/precisión del taladro) al tiempo que proporciona al cirujano señales táctiles y visuales únicas e intuitivas que facilitan el posicionamiento de la guía de perforación y la colocación del anclaje.

Características

- **Tecnología íntegramente de sutura**, ofrece los beneficios de los implantes de “todo sutura” con unas características de rendimiento superiores a la de los diseños de anclaje tradicionales.
- **Tamaños:**
 - Implante de carga única de 1,8 mm con hilo de sutura MagnumWire del nº 2.
 - Implante de carga doble de 2,8 mm de 2 hilos de sutura MagnumWire del nº 2.
 - Implante de carga única de 1,8 mm Mini.
- **Sistema de implementación activa.** El anclaje de despliega contra su propio mástil del mango y no contra la cortical del hueso.
- **Sistema de expansión radial**, actúa como un empujador de nudos ofreciendo un despliegue del implante consistente.
- **Sistema de despliegue con tracción automática de sutura**, garantiza el pleno despliegue del implante dentro del orificio del hueso, dando al cirujano un rendimiento de fijación ósea reproducible.
- **Técnica optimizada de despliegue del implante** mediante un giro en el extremo proximal del introductor del implante, simplifica la colocación del implante.
- **Sistema de perforación curvo Q-FIX: diseñado para trabajar con el anclaje Q-FIX 1.8 mm y Q-FIX 1.8 mm Mini.** Facilita el posicionamiento de la guía de perforación y la colocación del anclaje.
- **Guías curvas TRUJECTORY[®]** es el sistema de perforación curva más preciso, menos de 1° de desviación.

Indicaciones

El anclaje de suturas blandas Q-Fix está indicado para su uso en la fijación de tejidos blandos al hueso para:

- **Hombro:** reparación de lesiones de Bankart, reparación de lesiones de tipo SLAP, reparación acromioclavicular, levantamiento de cápsula / reconstrucción capsulolabral, reparación del deltoides, reparación de desgarró en manguito de los rotadores y tenodesis del bíceps.
- **Pie y tobillo:** reparación y reconstrucción lateral y medial, reparación de la parte media y anterior del pie, reconstrucción de la deformidad en valgo del dedo gordo, reparación o reconstrucción del tendón / ligamento metatarsiano y reconstrucción del tendón de Aquiles.
- **Codo:** reconstrucción del ligamento colateral cubital o radial, reparación de la epicondilitis lateral y refijación del tendón del bíceps.
- **Rodilla:** reparación extracapsular del ligamento colateral medial (LCM), ligamento colateral lateral (LCL) y ligamento oblicuo posterior, tenodesis de isquiotibiales (ITB), reparación del tendón rotuliano, avance del vasto interno oblicuo (VIO) y cierre de la cápsula articular.
- **Cadera:** reparación del labio acetabular.

Q-Fix mini es específico para cadera y hombro.

Q-Fix[®], implantes todo sutura

Composición

- Implante: poliéster trenzado.
- Sutura: polietileno de peso molecular ultra-elevado.
- Mango introductor: acero inoxidable de calidad quirúrgica y plástico de calidad médica.

Instrucciones de uso

Ver técnica quirúrgica de Q-Fix.

Especificaciones técnicas

	Q-Fix		Q-Fix Mini
Implantes de	1,8 mm	2,8 mm	1,8 mm
Implante sin desplegar			
Longitud	15,0 mm	20,0 mm	10 mm
Diámetro	1,8 mm	2,8 mm	1,8 mm
Implante desplegado			
Longitud	3,5 mm	4,7 mm	3,3 mm
Diámetro	4,0 mm	5,5 mm	4,1 mm
Preparación del agujero			
Punzón/dilatador roscado/profundidad perforación	22,3 mm	26,8 mm	17,1 mm
Punzón/dilatador roscado/diámetro perforación	2mm	3,5 mm	2 mm

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON nº 0123 CE nº G1 077112 0040 Clase CE: I: instrumental reutilizable IIa: brocas y kits desechables IIb : implantes	LATEX FREE	STERILE EO Implantes STERILE R Brocas y kits desechables NON STERILE Instrumental reutilizable	3 años Desechables/implantes 2 Desechables ☀ No exponer el producto a la radiación solar ☔ Manténgase en lugar seco	ArthroCare Corporation 7000 West William Cannon Drive, Austin, TX 78735, EE.UU. EC REP Smith+Nephew Orthopaedics GmbH Alemannenstraße 14 78532 Tuttlingen, Alemania Distribuidor Smith+Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos

LATEX FREE	No contiene látex	STERILE EO	Producto esterilizado con óxido de etileno
STERILE R	Producto esterilizado por irradiación	NON STERILE	Producto no esterilizado
⌚	Caducidad	2	No reutilizar
☒	No utilizar si el envase está abierto o dañado	☔	Manténgase en lugar seco
☀	No exponer el producto a la radiación solar	EC REP	Representante autorizado
🏭	Fabricante		

Sports Medicine

Smith+Nephew, S.A.U

Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

informacion@smith-nephew.com www.smith-nephew.com

Q-Fix[®], implantes todo sutura

Anclaje Q-Fix

Código producto	Descripción
25-1800	Anclaje todo sutura Q-Fix de 1,8 mm
25-2800	Anclaje todo sutura Q-Fix de 2,8 mm
72290123	Anclaje todo sutura Q-Fix Mini de 1,8 mm

Material asociado

Código producto	Descripción
Desechable	
25-1810	Kit desechable para implante Q-Fix de 1,8 mm. (Incluye broca, guía de broca y obturador)
25-1811	Kit desechable, cadera, para implante Q-Fix de 1,8 mm. (Incluye broca, guía de broca y obturador)
25-2810	Kit desechable para implante Q-Fix de 2,8 mm. (Incluye broca, guía de broca y obturador)
72290125	Kit desechable, cadera, para implante Q-Fix de 1,8 mm Mini. (Incluye broca, guía de broca y obturador)
72290126	Kit desechable XL, cadera, para implante Q-Fix de 1,8 mm Mini. (Incluye broca, guía de broca y obturador)
72290030	Broca desechable Q-Fix 1,8 mm
72290118	Broca flexible curva desechable Q-Fix 1,8 mm
72290031	Broca desechable Q-Fix 1,8 mm
72290124	Broca desechable Q-Fix mini 1,8 mm
Reutilizable	
25-2820	Punzón óseo reutilizable para implante Q-Fix de 2,8 mm
25-1812	Pathfinder [®] reutilizable de 1,8 mm
25-2812	Pathfinder [®] reutilizable de 2,8 mm
72290120	Guía curva reutilizable Q-Fix 1,8 mm
72290119	Guía curva reutilizable XL Q-Fix 1,8 mm
72290032	Guía reutilizable Q-FIX 1,8 mm
72290034	Guía reutilizable Q-Fix XL 1,8 mm
72290035	Guía reutilizable Q-Fix 2,8 mm