

Especificaciones técnicas (continuación)

Subhead not needed, since it is the same as the page header (I thought it looked a little odd...)

Unidad accionada por minimotor DYONICS® (Nº de ref. 7205357)

Longitud: 13,3 cm

Peso: 154 gramos

Equipada con un cable de alimentación reemplazable de 3 metros apto para autoclave.

Palanca de regulación de aspiración

DYONICS POWERMINI® (Nº de ref. 72201503)

Longitud: 13,3 cm

Peso: 142 gramos

Equipado con un cable de alimentación de 3 metros apto para autoclave (no reemplazable *in situ*).

Palanca de regulación de aspiración

Permite insertar cuchillas de motor de artroscopia con la ventana de la cuchilla alineada con la palanca de regulación de aspiración o haciendo un ángulo de 180° con respecto a la palanca.

DYONICS POWERMINI (Nº de ref. 72201500)

Longitud: 13,3 cm

Peso: 142 gramos

Mango estándar con botones de control del motor: avance, retroceso, oscilación, bloqueo de la ventana de la cuchilla.

Equipado con un cable de alimentación de 3 metros apto para autoclave (no reemplazable *in situ*).

Palanca de regulación de aspiración

Permite insertar cuchillas de motor de artroscopia con la ventana de la cuchilla alineada con la palanca de regulación de aspiración o haciendo un ángulo de 180° con respecto a la palanca.

**Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.*

Fecha de fabricación del mango: La fecha se encuentra en la etiqueta de la caja. El número de serie también permite conocer la fecha de fabricación por Smith & Nephew.

Condiciones medioambientales

Condición	Transporte y/o almacenamiento	Uso
Temperatura	De -20 a 60 °C	De -20 a 60 °C
Humedad relativa	10% a 90% (no se permite condensación)	10% a 90% (no se permite condensación)
Presión atmosférica	415 a 760 mmHg	415 a 760 mmHg

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas*

Mango estándar (Nº de ref. 7205355)	Longitud: 19,4 cm Peso: 453 gramos Equipada con un cable de alimentación reemplazable de 3 metros (10 pies) apto para autoclave. Palanca de regulación de aspiración
Mango con control manual (Nº de ref. 7205354)	Longitud: 19,4 cm Peso: 453 gramos Mango estándar con botones de control del motor: avance, retroceso, oscilación, bloqueo de la ventana de la cuchilla y cambio de velocidad. Equipado con un cable de alimentación reemplazable de 3 metros apto para autoclave. Palanca de regulación de aspiración
Mango DYONICS® POWERMAX® (Nº de ref. 7209891)	Longitud: 18,0 cm Peso: 223 gramos Mango ligero con botones de control del motor: avance, retroceso, oscilación, bloqueo de la ventana de la cuchilla y cambio de velocidad. Equipado con un cable de alimentación de 3 metros (10 pies) apto para autoclave (no reemplazable <i>in situ</i>). Palanca de regulación de aspiración
Mangos DYONICS POWERMAX y POWERMAX ELITE® (Nº de ref. 7210542, Nº de ref. 72200616, Nº de ref. 7220617)	Longitud: 18,0 cm Peso: 223 gramos Mango ligero con botones de control del motor: avance, retroceso, oscilación, bloqueo de la ventana de la cuchilla y cambio de velocidad. Equipado con un cable de alimentación de 3 metros apto para autoclave (no reemplazable <i>in situ</i>). Palanca de regulación de aspiración Permite insertar cuchillas de motor de artroscopia con la ventana de la cuchilla alineada con la palanca de regulación de aspiración o haciendo un ángulo de 180° con respecto a la palanca.
Unidad accionada por motor Ultralight (Nº de ref. 7205971)	Longitud: 19 cm Peso: 319 gramos Equipado con un cable de alimentación reemplazable de 3 metros (10 pies) apto para autoclave. Palanca de regulación de aspiración

*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Tabla 1. Funcionamiento del botón de los mangos con control manual

Mango/Nº de ref.	Avance	Retroceso	Oscilación	Bloqueo de la ventana de la cuchilla	Cambio de velocidad
Mangos de tres botones					
DYONICS POWER (Nº de ref. 7205354)	Pulsar >>	Pulsar <<	Pulsar <>	Pulsar y mantener pulsado <>	Pulsar y mantener pulsado >> o <<
DYONICS POWERMAX (Nº de ref. 7209891, 7210542)	Pulsar >>	Pulsar <<	Pulsar <>	Pulsar y mantener pulsado <>	Pulsar y mantener pulsado >> o <<
DYONICS POWERMAX ELITE (Nº de ref. 72200616, 72200672)	Pulsar >>	Pulsar <<	Pulsar <>	Pulsar y mantener pulsado <>	Pulsar y mantener pulsado >> o <<
Mangos de dos botones					
DYONICS POWERMINI® (Nº de ref. 72201500)	Pulsar el botón distal	Pulsar y mantener pulsado el botón distal	Pulsar el botón proximal	Pulsar y mantener pulsado el botón proximal	N/C

Tabla 2. Velocidades programadas de las cuchillas

Mango	Tipo de cuchilla	Avance (RPM)		Retroceso (RPM)		Modo de oscilación 1 (RPM)		Modo de oscilación 2 (RPM)	
		Gama	Valor	Gama	Valor	Gama	Valor	Gama	Valor
DYONICS POWER (Nº de ref. 7205354, 7205355)	Cuchillas largas (rectas y curvas), TURBOWHISKER®	100-3000	2000	100-3000	2000	500-3000	2000	1-9 (1 Rev) 1-8 (2 Rev)	8 (2 Rev)
DYONICS POWERMAX® (Nº de ref. 7210542, 7210586, 7209891)	Cuchilla curva de 3,5 mm	100-3000	2000	100-3000	2000	500-3000	2000	1-9 (1 Rev) 1-8 (2 Rev)	8 (2 Rev)
DYONICS POWERMAX ELITE® (Nº de ref. 72200616, 72200617)	Cuchillas curvas, HELICUT® y Orbit® curvas	100-5000	2000	100-5000	2000	500-3000	2000	1-9 (1 Rev) 1-8 (2 Rev)	8 (2 Rev)
	Recta	100-5000	2000	100-5000	2000	500-3000	2000	1-9 (1 Rev) 1-8 (2 Rev)	8 (2 Rev)
	Minitaladros, minitaladros largos y cuchillas BONECUTTER®	500-8000	4000	500-8000	4000	500-3000	2000	1-9 (1-2 Rev)	9 (2 Rev)
	Minitaladro ELITE *	500-10000	5000	500-10000	5000	500-3000	2000	1-9 (1-2 Rev)	9 (2 Rev)
DYONICS POWERMINI (Nº de ref. 72201500, 72201503)	Curva	100-5000	3500	100-5000	3500	500-3000	3000	1-9 (1-2 Rev)	9 (2 Rev)
	Recta	100-5000	3500	100-5000	3500	500-3000	3000	1-9 (1-2 Rev)	9 (2 Rev)
	Minitaladro y cuchillas BONECUTTER	500-6000	6000	500-6000	6000	500-3000	3000	1-9 (1-2 Rev)	9 (2 Rev)
DYONICS POWER Ultralight (Nº de ref. 7205971)**	Serie Ultra	100-5000	3000	100-5000	3000	500-3000	1000	N/C	N/C
DYONICS Mini Motor Drive (REF 7205357)	Minitaladros y cuchillas	100-3500	2000	100-3500	2000	500-3000	1000	N/C	N/C

* Los minitaladros ELITE sólo funcionan con los mangos POWERMAX ELITE (Nº de ref. 72200616, 72200617).

** Todos los minitaladros estándar funcionan a 5000 rpm cuando se utilizan con el mango Ultralight (Nº de ref. 7205971).