

SISTEMA PARA TRACCIÓN DE MUÑECA TENET



Características

- Diseño de perfil bajo, asegura un excelente acceso del C-arm.
- Incluye un soporte de mano extraíble.
- Ofrece tres tamaños de soportes para los dedos.
- Diseño flexible, permite la desviación cubital y radial y la rotación completa del brazo.
- Permite la colocación intraoperatoria en campo estéril.
- Esterilización por autoclave.
- Fácil de montar, desmontar y almacenar.
- Compatible con la mayoría de las mesas de quirófano.
- Proporciona un reposo de la extremidad estable, hasta 14 kilos.

Descripción

El sistema para tracción de muñeca de Tenet permite una colocación intraoperatoria adecuada y una excelente estabilidad en procedimientos artroscópicos de mano y muñeca.

Indicaciones

Indicado para su uso en intervenciones de mano y muñeca.

Instrucciones de uso

El sistema para tracción de muñeca está diseñado para poder fijarse a cualquier mesa de quirófano. Consulte manual de instrucciones.

Limpieza y esterilización

Retire los componentes desechables y limpie con un detergente/desinfectante suave después de cada intervención. Si utiliza el accesorio de tracción sin esterilidad, deberá limpiarlo, secarlo y guardarlo.

Tipo de Autoclave:	Gravedad	Pre-Vac
Tiempo exposición mín.	10 min.	6 min.
Tiempo exposición mín. (accesorio tracción)	10 min.	3 min.
Temperatura mínima	132 – 134°C	
Dejar enfriar al menos durante 20 minutos a temperatura ambiente		

Presentación

Código Producto	Descripción
72201551	KIT DE ESTABILIZACION PARA MUÑECA MEDIANO
72200675	ABRAZADERAS PARA MESA
72202114	TRACCION MUÑECA TENET SPYDER
7210577	ACCESORIO TRACCION TENET
72200660	ACCESORIO PARA MUÑECA Y SOPORTE DE MANO

Presentación

Empaque individual por caja

Disposición Final

Una vez usado, este dispositivo puede constituir un posible riesgo biológico por lo que se deberá manejar de conformidad con los procedimientos médicos aceptados y los requisitos locales y nacionales aplicables. Desechar en contenedores o bolsas de producto contaminado y/o corto-punzante.

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE 00356 Clase CE I, no estéril Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001 2008 			 	 Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA  Smith & Nephew York Science Park Heslington, York. YO10 5DF. UK Distribuidor Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos

	No contiene látex		Producto no esterilizado
	Manténgase en lugar seco		No exponer el producto a la radiación solar
	Fabricante		Representante autorizado

Smith&Nephew Colombia SAS

Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, Bogotá

Tel: 57 (1) 605 7373

www.smith-nephew.com

Material exclusivo para médicos especialistas.

Reg. San.: INVIMA 2017DM-0017045