

Descripción Técnica: Kit de apósito incisional con espuma de poliuretano para manejo de heridas con terapia por presión negativa.



Fabricante: Pimedica S.A.	
Distribuidor: Logimedica S.A.S.	
Registro INVIMA: 2020DM-0021997	
Vigencia INVIMA: 14/07/2030	
Clasificación según el riesgo: IIB	
Presentación: Unidad esteril	
Materiales: Poliuretano, silicona, Hidrocoloide, PVC	
Método de Esterilización: OE o ETO	
Vida útil en almacenamiento: 3 años	
Tipo de empaque: Papel Tyvek	
Condiciones de almacenamiento	Temperatura (°C) 15-25
	Humedad(%):40-70

Composición:

- Espuma de poliuretano hipoalergénica en medidas S (40 x 5 x 1.5cm) y L (80 x 5 x 1.5 cm), de poros abiertos entre 400 a 600 micrones, fácil adaptabilidad a los contornos de las heridas aumenta la actividad celular y la formación de tejidos de granulación uniforme en las heridas y una mayor absorción del exudado.
- Apósito en conformación con centro en silicona hipoalergénica con características que permiten la conservación óptima de la piel mayormente humectada y el paso de los exudados; cuenta con una alta adherencia por su componente lateral en hidrocoloide de 1.2 mm de espesor, mejorando el aislamiento para la conservación de la presión en la terapia.
- Incluye un sistema de succión PAD que permite el paso de exudados de las heridas con manguera de silicona anticolapsable.
- Película de poliuretano adaptable, con medidas 38.7 x 26.0 cm c/u, cuenta con un adhesivo acrílico que no daña la piel y una alta tasa de permeabilidad de 385 gr/m² lo que permite mantener una adecuada humedad en la herida y a su vez favorecer la transpiración.

Indicaciones:

Manejo avanzado en el tratamiento para heridas incisionales, apósitos que se adaptan a la anatomía, especialmente diseñados para manejar y proteger las incisiones quirúrgicas después del cierre primario.

Precauciones:

Se debe considerar el manejo intrahospitalario y/o a entornos ambulatorios bajo el uso por múltiples cuidadores, con monitoreo constante del paciente para un uso efectivo y seguro de la terapia en los siguientes casos: pacientes con tratamiento anticoagulante y antiplaquetario, diagnóstico de hemorragia, difícil control de la hemostasia, malnutrición sin tratar, exposición de huesos, tendones, nervios y órganos.

Contraindicaciones:

- Osteomielitis o infección de la herida sin tratamiento
- Heridas cubiertas de tejido necrótico
- Heridas malignas
- Fístulas no exploradas
- Zonas con exposición a líquido cefalorraquídeo (LCR)

Sistemas				
Referencia	Dimensiones	Tamaño	Descripción	Películas adhesivas
SANASIN	40X5X1.5 cm	S	Sistema incisional con Espuma de Poliuretano y apósito de hidrocoloide con un centro en silicona	3
SANALIN	80X5X1.5 cm	L	Sistema incisional con Espuma de Poliuretano y apósito de hidrocoloide con un centro en silicona	4