



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

BOLSA SENSURA CERRADA



Coloplast

SenSura Cerrada

Bolsa cerrada de Ostomía con
Filtro de carbón activado



- **Descripción:**

Dispositivo de ostomía formado por una bolsa cerrada y un clipper (cierre hermético no desechable) que asegura la unión entre la barrera y la bolsa. Confíe en la seguridad de la doble capa. SenSura es un sistema de acople mecánico de dos piezas que combina el adhesivo SenSura único de doble capa con un 'click' audible que confirma que la bolsa se encuentra bien sujeta al disco.

- **Composición del Producto:**

Bolsa: La bolsa recolectora está hecha de un suave material "libre de susurros" y a prueba de olor. Tiene una película de 5 capas plásticas que hacen posible soldar la bolsa en conjunto y que hacen que la bolsa sea a prueba de olor. Caras frontal y posterior de EVA protectora de la piel.

Clipper: Polipropileno.

Filtro: PE y carbón activado

- **Características y Acciones del Producto**

- **Filtro:** El filtro consiste en un paquete de filtro y un paquete de espuma. El paquete de espuma incluye una película de PE perforada y la propia espuma. La espuma es una especie de "pre-filtro" que protege el carbón. El paquete de filtro incluye el carbón activado y una membrana de teflón. El filtro también tiene un agujero donde el gas purificado sale.



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

BOLSA SENSURA CERRADA



Coloplast

- **Película de refuerzo (capa anterior y posterior protectora)** Con el fin de hacer un frente anterior y posterior suave y confortable, para proteger la piel del plástico.
- **Diseño**
 - Diseño anatómico, que proporciona la máxima adaptabilidad al contorno corporal.
 - La capacidad es máxima en la parte inferior de la bolsa sin que se desperdicien espacios inútiles en la parte superior de las bolsas
 - Cierre hermético entre la barrera y la bolsa, también cuenta con un Clip que proporciona doble seguridad en la unión entre la bolsa y el disco. Es muy cómodo y fácil de manejar

- **Indicaciones**

Pacientes ostomizados

- Ileostomías
- Colostomías

- **Instrucciones de Uso**

1. Limpie la piel con agua templada, evite usar jabón si no es absolutamente necesario
2. Seque la piel cuidadosamente
3. Mida el estoma (usando la guía) y calque esta medida en el disco adhesivo, a continuación recorte
4. Retire el papel protector de la barrera y colóquela en su sitio
5. Firmemente presione el adhesivo de la barrera a la piel periestomal



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

BOLSA SENSURA CERRADA



Coloplast

6. Asegúrese que el clip de seguridad de la bolsa esté abierto. Presione juntos el aro de la bolsa con el reborde de la barrera, con los dedos haga movimientos de abajo para arriba hasta que escuche un pequeño clic
7. Encaje o cierre el clip de seguridad, cuando escuche el clic la bolsa estará firmemente unida a la barrera

- **Presentaciones**

Diámetros: 70mm. Bolsa opaca compatible con la barrera de ostomía Coloplast POP / SenSura 70mm

Referencia: 101670

Caja: por 30 unidades.

Capacidad: 500ml

- **Datos de Interés General**

- Fabricante: COLOPLAST A/S
- Importador: ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
- País origen: Hungría, Francia, China, Estados Unidos
- Registro Sanitario Invima No. 2017DM-0000362-R1
- Tipo de Dispositivo: No invasivo
- Clasificación de Riesgo: I
- Vida útil: 5 años