



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

ALTERNA 1 PIEZA PEDIÁTRICA



Coloplast

Alterna 1 Pieza Pediátrica

Bolsa POP para Ostomía Pediátrica



- **Descripción:**

Dispositivo de ostomía de 1 pieza, específico para niños, en el que el adhesivo y la bolsa forman un solo elemento. Adherencia 100% a la piel, hidrocoloide flexible para máximo acople a la piel. Bolsas con Clipper (pinza de cierre) incluido. Material resistente a fugas.

- **Composición del Producto:**

Barrera: Espiral marrón: Polisobutileno, polímeros adhesivos

Espiral blanca: Carboximetilcelulosa, polímeros adhesivos

Película de polietileno en su cara externa

Bolsa: Plástico, EVA (cobertura posterior suave al tacto, transpirable).

Clipper: Polipropileno

- **Características y Acciones del Producto**

- La resina marrón, con mayor concentración de polímeros, favorece la adhesividad y fijación
- La resina blanca, con mayor cantidad de hidrocoloides, tiene un elevado poder de absorción, aportando una elevada protección cutánea
- Cubierta suave y resistente, dispuesta en la cara interna que cubre las bolsa hasta el borde y protege la piel al impedir el contacto con el plástico
- Cuatro capas de plástico diferentes, transparentes, y muy resistentes que eliminan los ruidos y los malos olores haciéndolas más discretas y cómodas
- Diseño anatómico, que proporciona la máxima adaptabilidad al contorno corporal. La capacidad es máxima en la parte inferior de la bolsa sin que se desperdicien espacios inútiles en la parte superior de las bolsas
- Film protector de poliuretano con guía de corte



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

ALTERNA 1 PIEZA PEDIÁTRICA



Coloplast

- **Indicaciones**

Niños urostomizados que tengan la piel en buen estado

- Ileostomías
- Colostomías

- **Instrucciones de Uso**

1. Limpie la piel con agua templada, evite usar jabón si no es absolutamente necesario y seque la piel cuidadosamente
2. Mida el estoma (usando la guía) y calque esta medida en el disco adhesivo, a continuación recorte
3. Retire el papel protector de la barrera y colóquela en su sitio
4. Firmemente presione el adhesivo de la barrera a la piel periestomal
5. Enrolle 4 a 5 veces en dirección anterior de la bolsa y por último aplique la pinza asegurándose de cerrar el extremo y la pestaña, en caso de usar la pinza adhesiva desechable retire el adhesivo y pliegue las extremidades de la pinza en dirección a la parte posterior de la bolsa

- **Presentaciones**

Diámetro: 40 milímetros recortable de 10 a 35 mm

Caja por 30 unidades y 30 clips autoadhesivos para el cierre hermético del extremo abierto de las bolsas.

- **Datos de Interés General**

- Fabricante: COLOPLAST A/S
- Importador: ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
- País origen: Hungría, Francia, China, Estados Unidos



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

ALTERNA 1 PIEZA PEDIÁTRICA



Coloplast

- Registro Sanitario Invima No. 2017DM-0000362-R1
- Tipo de Dispositivo: No invasivo
- Clasificación de Riesgo: I
- Vida útil: 3 años