



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

CONVEEN BOLSA DE PIERNA CONTOUR



Coloplast

Conveen Bolsa de Pierna

Bolsa Recolectora de Orina de Pierna Contour
(Multicanal)



- **Descripción:**

Cuando la discreción es la máxima prioridad.

La bolsa de pierna multicanal ofrece la máxima intimidad. Ni la forma ni el sonido revelan su presencia, ofrece también un alto nivel de confort y una fiabilidad absoluta.

- **Composición del Producto:**

Polipropileno, polietileno, PVC, poliéster

- **Características y Acciones del Producto**

- Los multicanales interiores dispersan la orina, de modo que su peso y volumen quedan uniformemente distribuidos
- Los canales mantienen un perfil muy plano y permiten que la bolsa envuelva la pierna, siendo así aún más cómoda y asegurando la isonorización e invisibilidad
- La válvula de descarga proporciona un cierre hermético que no se afloja para evitar sorpresas desagradables, un chasquido audible indica el cierre total
- El tubo está hecho de material transparente y altamente flexible que puede doblarse y torcerse sin interrumpir el flujo de orina, además es recortable
- Dobles soldaduras para doble seguridad
- La válvula antiretorno evita el reflujo, asegurando una mayor higiene
- Unión segura al colector de orina



 Ordenes & Suministros	FICHA TÉCNICA CONVEEN BOLSA DE PIERNA CONTOUR	 Coloplast
--	--	--

- Soporte suave de material no tejido permite la respiración de la piel, asegurando su comodidad
- Disponibles cintas de sujeción ajustables para las bolsas de pierna

- **Indicaciones**

- Incontinencia Urinaria y Ostomías Urinarias

- **Instrucciones de Uso**

1. Recortar el tubo con unas tijeras para elegir la longitud adecuada
2. Unir el conector al tubo
3. Coloque la bolsa de orina sobre la pierna usando las cintas de sujeción Conveen. En las esquinas de la bolsa hay una hendidura a través de la cual puede introducir el botón
4. Selle las cintas de velcro asegurando que la bolsa quede en una posición cómoda y corte el exceso de cinta con unas tijeras
5. Conecte el colector a la bolsa de orina
6. El tubito de vaciado cierra herméticamente, oirá un sonido característico de “click” que indicará el cierre correcto
7. Para vaciar la bolsa levante la palanquita del cierre. El tubo de salida es orientable para facilitar el vaciado en el inodoro

- **Presentaciones**

Bolsa con 600 y 800 ml. de volumen y 45 cm. de longitud del tubo

10 unidades por caja

Cintas para las bolsas de pierna

- **Datos de Interés General**

- Fabricante: COLOPLAST A/S
- Importador: ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
- País origen: Hungría, Francia, China, Estados Unidos
- Registro Sanitario Invima No. 2017DM-0000593 R1



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

CONVEEN BOLSA DE PIERNA CONTOUR



Coloplast

- Tipo de Dispositivo: No invasivo
- Clasificación de Riesgo: I
- Vida útil: 1 año