FICHA TÉCNICA



APÓSITO PROTECTOR DE PIEL CURAGARD



Apósito Curagard Apósito Protector de Piel



Descripción:

Consiste en una sustancia hidrocoloide elástica CURAGARD, autoadhesiva en la cual van insertadas partículas absorbentes de la humedad. Ideal para proteger la piel, reparar lesiones de moderadas a severas de la piel, absorber la humedad de la piel por transpiración. Apósito flexible que facilita su adaptabilidad a cualquier superficie y anatomía, fácil remoción.

Composición del Producto:

Carboximetilcelulosa sódica, Alginato de calcio, gelatina, pectina, elastómero artificial, adhesivo curagard y plastificante artificiales. La capa superior está hecha de una película de poliuretano resistente a fluidos.

Características y Acciones del Producto

- Son apósitos auto-adhesivos delgados, elásticos, suaves y flexibles o
 Absorben la humedad de la piel y previenen activamente las irritaciones y la maceración de la misma
- Impermeables al agua y otros cuerpos extraños No dejan residuo alguno sobre la piel gracias a su alta cohesión ○ Siguen los movimientos de la piel, siendo cómodos de llevar ○ Cada apósito viene individualmente empacado en envases cerrados al vacío y estériles
- Se adhieren firmemente a la piel incluso en el caso de utilizar una bolsa de ostomía
- Se cortan con facilidad al tamaño deseado
- Diferentes tamaños de acuerdo a la necesidad

FICHAS TÉCNICAS COLOPLAST A/S Y ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S. CUALQUIER INQUIETUD COMUNICARSE CON **ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.** CARRRERA 13a No. 77A-49 BOGOTÁ D.C., TELEFONO: 3152661031. O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB <u>www.ordenesysuministros.com</u>

FICHA TÉCNICA



APÓSITO PROTECTOR DE PIEL CURAGARD



Indicaciones

- Ideal para proteger la piel alrededor de estomas, fístulas y drenajes
- Piel donde se han producido daños o donde existe el riesgo de que se produzcan

Instrucciones de Uso

- 1. Irrigue la herida y seque los bordes de ésta
- 2. Escoja el apósito que se ajuste al tamaño de la lesión
- 3. Aplique el apósito suavemente sobre la lesión utilizando la técnica sin tocar que consiste en: retirar el papel protector colocar la cara adhesiva del apósito sobre la lesión y retirar las pestañas
- 4. Frote los bordes del mismo durante 30 segundos
- 5. Asegúrese de que el apósito mantenga un alto grado de flexibilidad después de la aplicación del mismo.

Presentaciones

- o Referencia 3210: Apósitos de 10 x 10 cms
- o Referencia 3215: Apósitos de 15 x 15 cms
- o Referencia 3220: Apósitos de 20 x 20 cms
- Caja por 5 y 10 apósitos, empacados individualmente

Almacenamiento

- o En lugar fresco, seco y limpio
- Protegido de la luz y con humedad relativa menor a 60%
- Temperatura entre 5 a 25 °C

Ordenes & Suministros

FICHA TÉCNICA

APÓSITO PROTECTOR DE PIEL CURAGARD



Datos de Interés General

o Fabricante: COLOPLAST A/S

o Importador: ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.

País origen: Hungría, Francia, China, Estados Unidos
 Registro Sanitario Invima No. 2021DM-0005969-R1

Vigente hasta 12/04/2031Clasificación de Riesgo: I

Vida útil: 3 añosEstéril por radiación.