



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

CONVEEN BOLSA DE PIERNA SECURITY



Coloplast

Conveen Bolsa de Pierna

Bolsa Recolectora de Orina de Pierna Security



- **Descripción:**

Nueva generación de bolsas de orina.

En la elección de una bolsa de orina no hay criterio más importante que la seguridad y discreción que ésta ofrezca, la bolsa **SECURITY +** ofrece esto y mucho más

- **Composición del Producto:**

Polipropileno, polietileno, PVC, poliéster

- **Características y Acciones del Producto**

- Nuevos materiales de peso reducido, más suave y respetuoso con el medio ambiente
- Escala de medición que permite el control detallado del volumen de orina
- La bolsa tiene un canal central que permite que la orina se distribuya en los bolsillos uniformemente permitiendo un perfil muy plano y que la bolsa envuelva la pierna, lo que se traduce en discreción
- La válvula de descarga proporciona un cierre hermético que no se afloja para evitar sorpresas desagradables, un “click” audible indica el cierre total
- El tubo anti-acomodamiento está hecho de material altamente flexible y corrugado que puede doblarse y torcerse sin interrumpir el flujo de orina, además es recortable
- La válvula anti-retorno evita el reflujo, asegurando una mayor higiene





Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

CONVEEN BOLSA DE PIERNA SECURITY



Coloplast

- Dobles soldaduras para doble seguridad
- Unión segura al colector de orina
- Soporte suave de material no tejido permite la respiración de la piel, asegurando su comodidad
- Disponibles cintas de sujeción ajustables para las bolsas de pierna

• Indicaciones

- Incontinencia Urinaria y Ostomías Urinarias

• Instrucciones de Uso

1. Recortar el tubo con unas tijeras para elegir la longitud adecuada
2. Unir el conector al tubo
3. Coloque la bolsa de orina sobre la pierna usando las cintas de sujeción Conveen. En las esquinas de la bolsa hay una hendidura a través de la cual puede introducir el botón
4. Selle las cintas de velero asegurando que la bolsa quede en una posición cómoda y corte el exceso de cinta con unas tijeras
5. Conecte el colector a la bolsa de orina
6. El tubito de vaciado cierra herméticamente, oirá un sonido característico de “click” que indicará el cierre correcto
7. Para vaciar la bolsa levante la palanquita del cierre. El tubo de salida es orientable para facilitar el vaciado en el inodoro

• Presentaciones

Bolsa con 500 y 750 ml. de volumen y 50 cm. de longitud del tubo

10 unidades por caja

Cintas para las bolsas de pierna

• Datos de Interés General

- Fabricante: COLOPLAST A/S
- Importador: ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
- País origen: Hungría, Francia, China, Estados Unidos

 Ordenes & Suministros	FICHA TÉCNICA CONVEEN BOLSA DE PIERNA SECURITY	 Coloplast
--	---	--

- Registro Sanitario Invima No. 2017DM-0000593 R1
- Tipo de Dispositivo: No invasivo
- Clasificación de Riesgo: I
- Vida útil: 1 año