



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

ALTERNA SWISS ROLL PEDIÁTRICA



Coloplast

Alterna Swiss Roll Pediátrica

Barrera para Ostomía Pediátrica



- **Descripción:**

El adhesivo Swiss Roll es una resina mixta de cuarta generación formada por dos resinas sintéticas dispuestas a modo de espiral concéntrica

- **Composición del Producto:**

Barrera: Espiral marrón: Polisobutileno, polímeros adhesivos

Espiral blanca: Carboximetilcelulosa sódica, polímeros adhesivos

Película de polietileno - poliuretano en su cara externa

Aro: Alterna flexible

- **Características y Acciones del Producto**

- La resina marrón, con mayor concentración de polímeros, favorece la adhesividad y fijación a la piel
- La resina blanca, con mayor cantidad de hidrocoloides, tiene un elevado poder de absorción, aportando una elevada protección y regeneración cutánea
- El adhesivo es más grueso en el centro para una mayor capacidad de absorción y más fino en la periferia para una mayor adaptabilidad al relieve cutáneo
- La cara externa del adhesivo tiene una estructura radial para aumentar la flexibilidad del mismo
- Bordes biselados
- Cierre hermético entre la bolsa y la barrera
- Film protector de poliuretano con guía de corte

 Ordenes & Suministros	FICHA TÉCNICA ALTERNA SWISS ROLL PEDIÁTRICA	 Coloplast
--	--	--

- Incorpora una pestaña que favorece la retirada del film protector y del adhesivo sobre la piel

- **Indicaciones**

Niños ostomizados: Ileostomías, Colostomías y Urostomías

- **Instrucciones de Uso**

1. Limpie la piel con agua templada, evite usar jabón si no es absolutamente necesario
2. Seque la piel cuidadosamente
3. Mida el estoma (usando la guía) y calque esta medida en el disco adhesivo, a continuación recorte
4. Retire el papel protector de la barrera y colóquela en su sitio, es más fácil si empieza por adherirla por debajo del estoma y luego hacia arriba
5. Firmemente presione el adhesivo de la barrera a la piel que rodea el estoma, asegurándose que quede bien sellada
6. A continuación, coloque la bolsa

- **Presentaciones**

Diámetros: 40 mm., recortable de 10 a 35 mm.

Cajas por 5 unidades

- **Almacenamiento**

- En lugar fresco, seco y limpio
- Protegido de la luz y con humedad relativa menor a 60%
- Temperatura entre 5 a 25 °C



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

ALTERNA SWISS ROLL PEDIÁTRICA



Coloplast

- **Datos de Interés General**

- Fabricante: COLOPLAST A/S
- Importador: ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
- País origen: Hungría, Francia, China, Estados Unidos
- Registro Sanitario Invima No. 2017DM-0000362-R1
- Tipo de Dispositivo: No invasivo
- Clasificación de Riesgo: I
- Vida útil: 3 años