



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

ALTERNA URO



Coloplast

ALTERNA URO

Bolsa drenable de Urostomía



- **Descripción:**

Dispositivo para personas urostomizadas de 3 piezas, formado por una bolsa de urostomía, un clipper (cierre hermético no desechable) que asegura la unión entre la barrera y la bolsa, y compatibilidad con las barreras con adhesivo Swiss Roll, Extra y Long Wear. Con cobertura posterior suave al tacto (panel que aísla la humedad), transpirable, válvulas antirreflujo para evitar infecciones del tracto urinario por la regresión de la orina, y capacidad de adaptación a sistemas de drenaje urinario.

- **Composición del Producto:**

Bolsa Recolectora: Plástico y EVA. (cobertura posterior suave al tacto, transpirable). Clipper: Polipropileno. Aro Alterna flexible.

- **Características y Acciones del Producto**

- Cubierta suave y resistente, dispuesta en la cara interna, que cubre las bolsas hasta el borde
- Reduce el ruido, no hay sensación de calor o frío, ni hay sensación de humedad
- Película de plástico corrugable de 5 capas que la hace resistente a l material de drenaje
- Diseño anatómico, que proporciona la máxima adaptabilidad al contorno corporal. La capacidad es máxima en la parte inferior de la bolsa sin que se desperdicien espacios inútiles en la parte superior de las bolsas



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

ALTERNA URO



Coloplast

- La bolsa evita que queden residuos urinarios en el fondo de la misma después de vaciarla.
- Además del cierre hermético entre la barrera y la bolsa, ésta cuenta con un Clip que proporciona doble seguridad en la unión entre la bolsa y el disco.

Es muy cómodo y fácil de manejar ○

Válvula anti-reflujo

- Válvula de vaciado seguro y de fácil manejo
- Compatibles con las barreras Swiss Roll, Extra y Long Wear planas y convexas del mismo diámetro



• Indicaciones

Pacientes urostomizados

• Instrucciones de Uso

1. Limpie la piel con agua templada, evite usar jabón si no es absolutamente necesario
2. Seque la piel cuidadosamente
3. Mida el estoma (usando la guía) y calque esta medida en el disco adhesivo, a continuación recorte
4. Retire el papel protector de la barrera y colóquela en su sitio
5. Firmemente presione el adhesivo de la barrera a la piel periostomal
6. Asegúrese que el clip de seguridad de la bolsa esté abierto. Presione juntos el aro de la bolsa con el reborde de la barrera, con los dedos haga movimientos de abajo para arriba hasta que escuche un pequeño clic
7. Encaje o cierre el clip de seguridad, cuando escuche el clic la bolsa estará firmemente unida a la barrera
8. Conecte la bolsa de urostomía a la bolsa recolectora de orina

 Ordenes & Suministros	FICHA TÉCNICA ALTERNA URO	 Coloplast
--	--	--

9. Para vaciar la bolsa levante la válvula del cierre. El tubo de salida es orientable para facilitar el vaciado en el inodoro

- **Presentaciones**

Diámetros: 50 y 60 milímetros

Caja por 20 unidades

- **Datos de Interés General**

- Fabricante: COLOPLAST A/S
- Importador: ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
- País origen: Hungría, Francia, China, Estados Unidos
- Registro Sanitario Invima No. 2017DM-0000362-R1
- Tipo de Dispositivo: No invasivo
- Clasificación de Riesgo: I
- Vida útil: 5 años