



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

PASTA COLOPLAST



Coloplast

Pasta Coloplast

Pasta Periestomal



- **Descripción:**

Forma una película que se extiende y moldea con facilidad ofreciendo así una superficie en la que cualquier dispositivo se puede aplicar y adherir, como una barrera de ostomía, o apósitos protectores de piel. Ideal para rellenar y nivelar irregularidades de la piel periestomal, protegiéndola de las lesiones por fugas. Elaborada en base a componentes hidrocoloides, es resistente a los drenajes corporales.

- **Composición del Producto:**

Carboximetilcelulosa sódica, pectina, en vehículo de alcohol, preservativos. Pala de enrollado plástica.

- **Características y Acciones del Producto**

- Confortable, segura y fácil de utilizar
- Absorbe la humedad de la piel – la zona periestomal se mantiene seca.
- Después de su aplicación, forma una película que se extiende y se moldea con facilidad, además tiene una alta adhesividad y cohesión
- No se pega – aplicación sencilla y rápida
- Protege eficazmente la piel
- Aumenta el tiempo de aplicación de los dispositivos ○ Permanece suave y flexible
- Aporta un sello de seguridad entre la piel y los dispositivos



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

PASTA COLOPLAST



Coloplast

- Se retira con el dispositivo – no es necesario frotar la piel
- Muy suave con la piel
- Se puede utilizar con cualquier dispositivo

- **Indicaciones**

- Nivelar escaras, pliegues e irregularidades cutáneas alrededor del estoma o fístula
- Protección de la piel periestomal de los efluentes o posibles fugas del estoma
- Absorber humedad, permitiendo a la piel alrededor del estoma permanecer seca
- Proteger los adhesivos y aumentar el tiempo de aplicación de los dispositivos

- **Instrucciones de Uso**

1. Irrigue y limpie bien el estoma y seque los bordes de éste
2. Utilizar la llave del tubo para vaciar el tubo por completo
3. Usted elige si desea aplicar la pasta directamente en la piel o en la barrera
4. Aplique la pasta alrededor del estoma o fístula o en la barrera (bordeándolo en anillo)
5. En áreas deprimidas de la piel, retracciones o en cicatrices en las que sea necesaria aplicar varias capas de pasta, espere 30 seg. Aproximadamente entre cada aplicación
6. Coloque el dispositivo adecuado para el estoma, según indicación médica y presione suavemente con el dedo
7. Tape el tubo inmediatamente después del uso



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

PASTA COLOPLAST



Coloplast

- **Presentaciones**

Tubo de 60 gramos 2 oz.

Caja por 12 unidades (tubos)

Referencia: 2650

- **Almacenamiento**

- En lugar fresco, seco y limpio
- Protegido de la luz y con humedad relativa menor a 60%
- Temperatura entre 5 a 25 °C

- **Datos de Interés General**

- Fabricante: COLOPLAST A/S ○ Importador: ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
- País origen: Hungría, Francia, China, Estados Unidos
- Registro Sanitario Invima No. 2021DM-0005170-R1
- Vigencia hasta 18/02/2031
- Tipo de Dispositivo: No invasivo
- Clasificación de Riesgo: IIB
- Vida útil: 2 años
- No estéril.
- No reutilizar. Para un solo uso. La reutilización de este producto de un solo uso podría comportar riesgos para el usuario. El reprocesamiento, la limpieza, la desinfección y la esterilización pueden afectar a las características del producto y exponer al paciente a un riesgo adicional de lesión o infección.
- En caso de reacción alérgica, póngase en contacto con Coloplast para obtener información sobre los componentes.
- En condiciones de uso privado normal, el producto se puede eliminar junto con otros residuos domésticos, a menos que las reglamentaciones locales establezcan requisitos.