



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

COMFEEL PLUS



Coloplast

Comfeel Plus

Apósito Hidrocoloide Semi-oclusivo



- **Descripción:**

El apósito hidrocoloide consta de partículas de celulosa con alginato adicional, que absorben la humedad. Este está encapsulado en una masa adhesiva, elástica y sintética.

- **Composición del Producto:**

Carboximetilcelulosa sódica, Alginato de calcio, elastómero artificial, adhesivo y plastificante artificiales. La capa superior está hecha de una película de poliuretano semipermeable.

- **Características y Acciones del Producto**


El apósito para úlceras **Comfeel plus** es una nueva generación de apósitos hidrocoloides. Sus bordes biselados y adhesivos aseguran que el apósito se pegue de forma segura sin tener que utilizar cintas adhesivas.

Manejo del Exudado: Se mantiene la humedad en la herida durante la fase de cicatrización. Esto se logra a través de una interacción entre la absorción y la evaporación optimizando el crecimiento del tejido de granulación, además de lograr por desbridamiento autolítico la limpieza de la herida. Exudado leve a moderado.

Superficie de Película Semipermeable e Inteligente: La inteligencia consiste en la capacidad de la película de poliuretano para regular la evaporación de acuerdo con el volumen del exudado. Durante los periodos de exudación fuerte los poros de la película se abren ampliamente, durante los periodos de exudación leve los poros se contraen.



Efecto Semáforo: Este efecto facilita conocer cuándo es el momento adecuado para el cambio del apósito, evitando desperdicios. Cuando la guía cambie a color blancuzco y éste a su vez alcance los bordes del apósito es hora de cambiarlo.

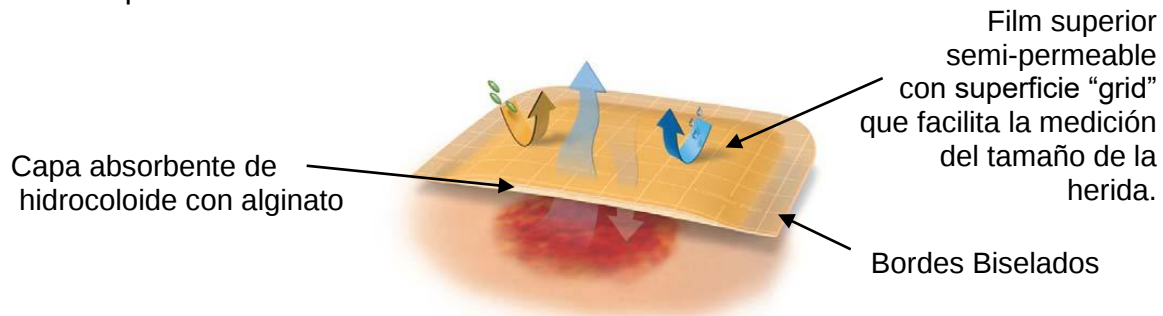

Superficie con Grid Cuadrículado: Permite medir el tamaño de la herida y observar la evolución de la cicatrización.

Fácil de Aplicar y Remover: Una vez saturado, el apósito puede removerse de una sola vez sin dejar residuos en la herida.

Comodidad del paciente: El apósito es antialérgico, suave y flexible. El mejoramiento significa menos cambios de apósito, adaptación a los contornos del cuerpo lo que ofrece una mayor libertad de movimiento al paciente, alivio del dolor y efecto positivo en el proceso de cicatrización.

- **Indicaciones**

- Tratamiento de lesiones por úlceras por presión, úlceras de pierna
- Quemaduras dérmicas de grosor parcial superficial
- Abrasiones de la piel
- Heridas quirúrgicas
- Zonas donantes

- **Instrucciones de Uso**

1. Irrigue la herida y seque los bordes de ésta
2. Escoja el apósito que se ajuste al tamaño de la lesión

 Ordenes & Suministros	FICHA TÉCNICA COMFEEL PLUS	 Coloplast
--	---	--

3. Aplique el apósito suavemente sobre la lesión utilizando la técnica sin tocar que consiste en: retirar el papel protector colocar la cara adhesiva del apósito sobre la lesión y retirar las pestañas
4. Frote los bordes del mismo durante 30 segundos
5. Asegúrese de que el apósito mantenga un alto grado de flexibilidad después de la aplicación del mismo.

- **Presentaciones**

Apósitos de 10x10, 15x15 y 20x20 centímetros

Caja por 5, 10 (10x10) unidades

Empaque individual y estéril

- **Datos de Interés General**

- Fabricante: COLOPLAST A/S
- Importador: ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
- País origen: Hungría, Francia, Estados Unidos
- Registro Sanitario Invima No. 2014DM-0012249
- Tipo de Dispositivo: No invasivo
- Clasificación de Riesgo: IIB
- Vida útil: 3 años