



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

ALTERNA LONG WEAR



Coloplast

Alterna Long Wear

**Barrera de Ostomía absorbente
Para clima húmedo**



- **Descripción:**

El adhesivo especial CURAGARD garantiza una larga duración, alta seguridad y protección completa de la piel. Ajuste al cierre hermético con las Bolsas Alterna Free y Alterna Uro.

- **Composición del Producto:**

Curagard: Hidrocoloides (carboximetilcelulosa), polímeros de adhesión, polímeros absorbentes, pectina

Película de polietileno - poliuretano en su cara externa

Aro: Alterna flexible

- **Características y Acciones del Producto**

- El adhesivo Curagard es delgado y elástico lo que permite, en conjunto con los bordes biselados, seguir el contorno y los movimientos de la piel
- Actúa como una barrera para la piel previniendo que el contenido liberado por la ostomía entre en contacto con la piel, y así, reduce el riesgo de irritación
- Con su excelente fijación y habilidad única de absorción garantiza un tiempo de vida largo y un costo favorable para personas ostomizadas con alta sudoración de la piel, o que habiten en climas cálidos o húmedos
- Por su flexibilidad ofrece libertad de movimientos y sensación de seguridad lo que incrementa la calidad de vida



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

ALTERNA LONG WEAR



Coloplast

- La barrera se acopla con todas las bolsas Alterna
- Con guía de corte
- Lleva 2 orejas para poder adaptar un cinturón en aquellos casos en los que sea necesario

• Indicaciones

Diseñado para un tiempo de uso más largo, gracias a su capacidad de absorción de la humedad de la piel (diferencia de 48 horas entre adhesivos)

- Ileostomías
- Urostomías
- Colostomías

• Instrucciones de Uso

1. Limpie la piel con agua templada, evite usar jabón si no es absolutamente necesario
2. Seque la piel cuidadosamente
3. Mida el estoma (usando la guía) y calque esta medida en el disco adhesivo, a continuación recorte
4. Retire el papel protector de la barrera y colóquela en su sitio, es más fácil si empieza por adherirla por debajo del estoma y luego hacia arriba
5. Firmemente presione el adhesivo de la barrera a la piel que rodea el estoma, asegurándose que quede bien sellada
6. A continuación, coloque la bolsa

• Presentaciones

- Referencia 13171: barrera de diámetro 40 mm
- Referencia 13181: barrera de diámetro 50 mm
- Referencia 13191: barrera de diámetro 60 mm

 Ordenes & Suministros	FICHA TÉCNICA ALTERNA LONG WEAR	 Coloplast
--	--	--

- Cajas por 5 unidades

- **Almacenamiento**

- En lugar fresco, seco y limpio
- Protegido de la luz y con humedad relativa menor a 60%
- Temperatura entre 5 a 25 °C

- **Datos de Interés General**

- Fabricante: COLOPLAST A/S
- Importador: ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
- País origen: Hungría, Francia, China, Estados Unidos
- Registro Sanitario Invima No. 2017DM-0000362-R1
- Tipo de Dispositivo: No invasivo
- Clasificación de Riesgo: I
- Vida útil: 3 años