



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA


COMFEEL PLUS TRANSPARENTE



Coloplast

Comfeel Plus Transparente

Apósito Hidrocoloide Extradelado

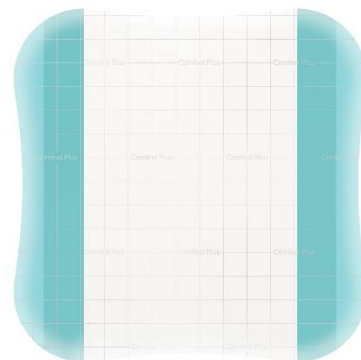

- **Descripción:**

El apósito contiene partículas de carboximetilcelulosa, que absorben la humedad, encapsuladas en una masa sintética, elástica y adhesiva. Impermeable a agua y bacterias, y semipermeable a la evaporación del exudado.

- **Composición del Producto:**

Carboximetilcelulosa sódica, elastómero artificial, adhesivo y plastificante artificiales. La capa superior está hecha de una película de poliuretano semipermeable.

- **Características y Acciones del Producto**

El apósito para úlceras **Transparente Comfeel plus** es una nueva generación de apósitos hidrocoloides.

Sus bordes biselados aseguran que el apósito se adhiera de forma segura sin tener que utilizar cintas adhesivas.

Manejo Superior del Exudado: Se mantiene la humedad en la herida durante la fase de cicatrización. Esto se logra a través de una interacción entre la absorción y la evaporación.

Superficie de Película Semipermeable e Inteligente: La inteligencia consiste en la capacidad de la película para regular la evaporación de acuerdo con el volumen del exudado. Durante los periodos de exudación



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA


COMFEEL PLUS TRANSPARENTE



Coloplast

fuerte los poros de la película se abren ampliamente, durante los periodos de exudación leve los poros se contraen.

Efecto Semáforo: Este efecto facilita conocer cuándo es el momento adecuado para el cambio del apósito, evitando desperdicios. Cuando la guía cambie a color blancuzco y éste a su vez alcance los bordes del apósito es hora de cambiarlo.

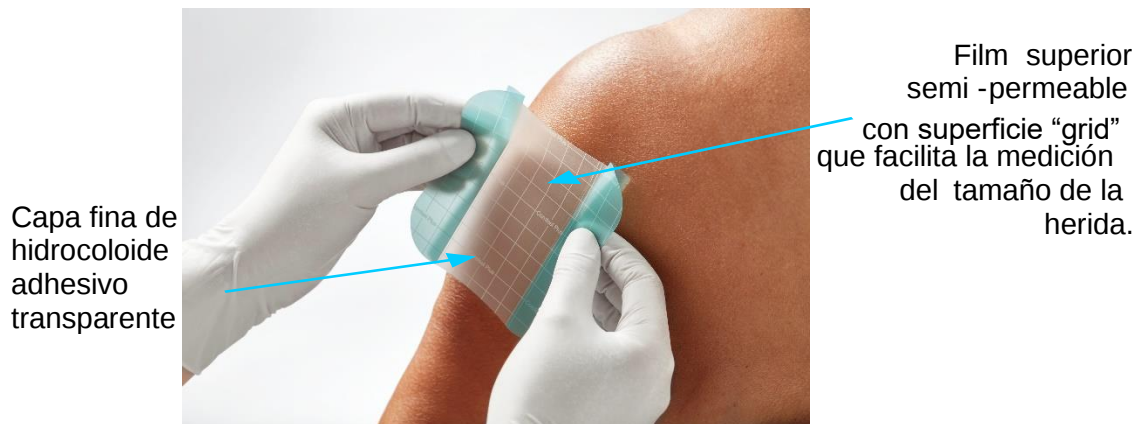

Fácil de Inspeccionar y Grid Cuadrulado: El apósito transparente facilita la inspección de la herida sin removerlo y permite medir el tamaño de la herida. Por consiguiente el proceso de cicatrización puede ser monitoreado muy de cerca.

Fácil de Aplicar y Remove: Una vez saturado, el apósito puede removerse de una sola vez sin dejar residuos en la herida.

Comodidad del paciente: El apósito es antialérgico, suave y flexible. El mejoramiento significa menos cambios de apósito, adaptación a los contornos del cuerpo lo que ofrece una mayor libertad de movimiento al paciente, alivio del dolor y efecto positivo en el proceso de cicatrización.

• Indicaciones

- Tratamiento de lesiones crónicas con exudado leve como úlceras por presión, úlceras de pierna • Quemaduras superficiales
- Heridas traumáticas
- Heridas quirúrgicas

 Ordenes & Suministros	FICHA TÉCNICA COMFEEL PLUS TRANSPARENTE	 Coloplast
--	--	--

- Zonas donantes
- Prevención de lesiones por presión leves.

- **Instrucciones de Uso**

1. Irrigue la herida y seque los bordes de ésta
2. Escoja el apósito que se ajuste al tamaño de la lesión
3. Aplique el apósito suavemente sobre la lesión utilizando la técnica sin tocar que consiste en: retirar el papel protector colocar la cara adhesiva del apósito sobre la lesión y retirar las pestañas
4. Frote los bordes del mismo durante 30 segundos
5. Asegúrese de que el apósito mantenga un alto grado de flexibilidad después de la aplicación del mismo.

- **Presentaciones**

Apósitos de 10x10cm, caja x 10 unidades
15x15, caja x 5 unidades
y 20x20cm, caja x 5 unidades

Empaque individual y estéril

- **Datos de Interés General**

- Fabricante: COLOPLAST A/S
- Importador: ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
- País origen: Hungría, Francia, Estados Unidos
- Registro Sanitario Invima No. 2014DM-0011350
- Vigente hasta: 10/06/2024
- Tipo de Dispositivo: No invasivo
- Clasificación de Riesgo: IIB
- Vida útil: 3 años