



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

ALTERNA SWISS ROLL



Coloplast

Alterna Swiss Roll

Barrera de Ostomía



- **Descripción:**

Barrera elaborada en hidrocoloide, el adhesivo Swiss Roll es una resina mixta de cuarta generación formada por dos resinas sintéticas dispuestas a modo de espiral concéntrica. Adherencia 100% a la piel, semi-rígida para máximo acople a la piel. Ajuste al cierre hermético no desechable con las Bolsas Alterna Free y Alterna Uro.

- **Composición del Producto:**

Barrera: Espiral marrón: Polisobutileno, polímeros adhesivos

Espiral blanca: Carboximetilcelulosa sódica, polímeros adhesivos

Película de polietileno - poliuretano en su cara externa

Aro: Alterna flexible

- **Características y Acciones del Producto**

- La resina marrón, con mayor concentración de polímeros, favorece la adhesividad y fijación
- La resina blanca, con mayor cantidad de hidrocoloides, tiene un elevado poder de absorción, aportando una elevada protección cutánea, astringente



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

ALTERNA SWISS ROLL



Coloplast

- El adhesivo es más grueso en el centro para una mayor capacidad de absorción y más fino en la periferia para una mayor adaptabilidad al relieve cutáneo
 - La cara externa del adhesivo tiene una estructura radial para aumentar la flexibilidad del mismo y la adaptabilidad
 - Bordes biselados y film protector con guía de corte
 - Incorpora una pestaña que favorece la retirada del film protector y del adhesivo sobre la piel con facilidad
 - Lleva 2 orejas para poder adaptar un cinturón en aquellos casos en los que sea necesario
- **Indicaciones**
 - Ileostomías, Colostomías, Urostomías
- **Instrucciones de Uso**
 1. Limpie la piel con agua templada, evite usar jabón si no es absolutamente necesario
 2. Seque la piel cuidadosamente
 3. Mida el estoma (usando la guía) y calque esta medida en el disco adhesivo, a continuación recorte
 4. Retire el papel protector de la barrera y colóquela en su sitio, es más fácil si empieza por adherirla por debajo del estoma y luego hacia arriba
 5. Firmemente presione el adhesivo de la barrera a la piel que rodea el estoma, asegurándose que quede bien sellada
 6. A continuación, coloque la bolsa



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

ALTERNA SWISS ROLL



Coloplast

- **Presentaciones**

- Referencia 1771: barrera de diámetro 40 mm
Referencia 1776: barrera de diámetro 50 mm
Referencia 1779: barrera de diámetro 60 mm
- Cajas por 5 unidades

- **Almacenamiento**

- En lugar fresco, seco y limpio
- Protegido de la luz y con humedad relativa menor a 60%
- Temperatura entre 5 a 25 °C

- **Datos de Interés General**

- Fabricante: COLOPLAST A/S
- Importador: ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
- País origen: Hungría, Francia, China, Estados Unidos
- Registro Sanitario Invima No. 2017DM-0000362-R1
- Tipo de Dispositivo: No invasivo
- Clasificación de Riesgo: I
- Vida útil: 3 años