



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

PURILON GEL



Coloplast

Purilon Gel

Hidrogel para desbridamiento autolítico



- **Descripción:**

Hidrogel Amorfo

- **Composición del Producto:**

Agua purificada 90%, Carboximetilcelulosa sódica y Alginato de calcio

- **Características y Acciones del Producto**

Desbridamiento rápido y efectivo: Para que la herida granule y cicatrice se requiere de una herida limpia por esto el tejido necrótico y la escara deben ser removidos.

El gel dérmico hidrata el tejido necrótico, disolviendo la necrosis manteniendo el ambiente húmedo en las heridas, promoviendo el proceso de granulación y cicatrización.



Absorción y rehidratación: Correspondencia entre las propiedades de hidratación y absorción, las cuales mejoran el desbridamiento autolítico natural y la humectación en la cicatrización de la herida. Hidratará cuando sea necesario y a la vez absorberá los restos y la exudación.



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

PURILON GEL




Coloplast

Reduce el riesgo de escapes y maceración: Absorbe la necrosis disuelta, la escara y el exceso de exudado.

Alta cohesión: Debido a su textura viscosa el gel incoloro e inoloro no se desliza, permanece en su lugar e impedirá escapes, previniendo la maceración de la piel.

Fácil de utilizar: El aplicador y la alta cohesión del gel hacen posible una aplicación controlada y visible con una sola mano.

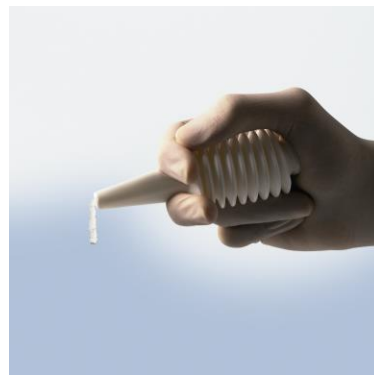

- **Indicaciones**

- Heridas necróticas secas y húmedas
- Heridas con una mezcla de tejido necrótico y granulado
- Suplemento para humectar la cicatrización de las heridas

- **Instrucciones de Uso**

1. Irrigue la herida y seque los bordes de ésta
2. Remueva la etiqueta del producto
3. Desprenda el tapón por debajo de la línea de corte
4. Aplique el gel en la cavidad de la herida
5. Cubra el purilón gel con un segundo apósito. Dependiendo de la cantidad de exudado, se recomienda utilizar un apósito semi-oclusivo o uno de moderado a alto exudado.

- **Presentaciones**

Frasco individual por 25 gramos

Caja por 10 frascos

Contenido estéril

 Ordenes & Suministros	FICHA TÉCNICA PURILON GEL	 Coloplast
--	--	--

- **Datos de Interés General**

- Fabricante: COLOPLAST A/S
- Importador: ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
- País origen: Hungría, Francia, China, Estados Unidos
- Registro Sanitario Invima No. 2019DM-0003895-R1
- Tipo de Dispositivo: Invasivo
- Clasificación de Riesgo: III
- Vida útil: 3 años