



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

ALTERNA SWISS ROLL PEDIÁTRICA



Coloplast

Alterna 3 Piezas Pediátrica

Bolsa para Ostomía Pediátrica



- **Descripción:**

Dispositivo de ostomía de 3 piezas, formado por una bolsa abierta, un clipper que asegura la unión entre la barrera y la bolsa, y la barrera con adhesivo Swiss Roll compatible

- **Composición del Producto:**

Bolsa Recolectora: Plástico, PVC y EVA

Clipper: Polipropileno

- **Características y Acciones del Producto**

- Cubierta suave y resistente, dispuesta en la cara interna que cubre las bolsas hasta el borde
- Cuatro capas de plástico diferentes que reducen el ruido, no hay sensación de calor o frío, ni hay sensación de humedad
- Diseño anatómico, que proporciona la máxima adaptabilidad al contorno corporal.
- La capacidad es máxima en la parte inferior de la bolsa sin que se desperdicien espacios inútiles en la parte superior de las bolsas, además, de un extremo amplio para el vaciado
- Cierre hermético entre la barrera y la bolsa, también cuenta con clip que proporciona doble seguridad en la unión entre la bolsa y el disco. Es muy cómodo y fácil de manejar
- Bolsas lavables y reutilizables

 Ordenes & Suministros	FICHA TÉCNICA ALTERNA SWISS ROLL PEDIÁTRICA	 Coloplast
--	--	--

- **Indicaciones**

Niños ostomizados, especialmente aquellos que manejan heces líquidas:

- Ileostomías
- Colostomías

- **Instrucciones de Uso**

1. Limpie la piel con agua templada, evite usar jabón si no es absolutamente necesario
2. Seque la piel cuidadosamente
3. Mida el estoma (usando la guía) y calque esta medida en el disco adhesivo, a continuación recorte
4. Retire el papel protector de la barrera y colóquela en su sitio
5. Firmemente presione el adhesivo de la barrera a la piel periestomal
6. Asegúrese que el clip de seguridad de la bolsa esté abierto. Presione juntos el aro de la bolsa con el reborde de la barrera, con los dedos haga movimientos de abajo para arriba hasta que escuche un pequeño clic
7. Encaje o cierre el clip de seguridad, cuando escuche el clic la bolsa estará firmemente unida a la barrera
8. Enrolle 4 a 5 veces en dirección anterior de la bolsa y por último aplique la pinza asegurándose de cerrar el extremo y la pestaña, en caso de usar la pinza adhesiva desechable retire el adhesivo y pliegue las extremidades de la pinza

 Ordenes & Suministros	FICHA TÉCNICA ALTERNA SWISS ROLL PEDIÁTRICA	 Coloplast
--	--	--

- **Presentaciones**

- Referencia 1781: Diámetro 40 milímetros
- Caja por 30 unidades de bolsas y 30 clips autoadhesivos para el cierre hermético del extremo abierto de las bolsas.

- **Almacenamiento**

- En lugar fresco, seco y limpio
- Protegido de la luz y con humedad relativa menor a 60%
- Temperatura entre 5 a 25 °C

- **Datos de Interés General**

- Fabricante: COLOPLAST A/S
- Importador: ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
- País origen: Hungría, Francia, China, Estados Unidos
- Registro Sanitario Invima No. 2017DM-0000362-R1 vigente hasta 02/11/27
- Tipo de Dispositivo: No invasivo
- Clasificación de Riesgo: I
- Vida útil: 5 años