



Ordenes &  
Suministros

## FICHA TÉCNICA

### BIATAIN ESPUMA



Coloplast

## Biatain Espuma

Apósito de espuma hidropolimérica  
No adhesivo, de absorción alveolar  
3D FIT.



- **Descripción:**

Los Apósitos de Espuma Biatain No adhesivo son estériles, de un solo uso, suaves, muy absorbentes y están fabricados con espuma hidropolimérica de poliuretano flexible que proporciona un entorno de cicatrización húmedo y un eficaz manejo del exudado.

- **Composición del Producto:**

La espuma Biatain está hecha de poliuretano y una cantidad muy pequeña de surfactante. No contiene látex, PVC o materiales derivados de animales. El poliuretano es una molécula orgánica que contiene enlaces uretano y se usa ampliamente en varios elastómeros, espumas, adhesivos, etc.

La película superior Biatain consiste en una película de poliuretano con impresión. No contiene látex, PVC o materiales derivados de animales.

- **Características y Acciones del Producto**

Modo de acción: cuando se aplica un apósito de espuma Biatain sobre una herida exudativa, la almohadilla de espuma hidrófila (que ama el agua) absorbe el exceso de exudado de la herida





Ordenes &  
Suministros

## FICHA TÉCNICA

### BIATAIN ESPUMA



Coloplast


localmente con una mínima dispersión lateral, gracias a una única estructura 3D (3D FIT).

La espuma se expande para llenar la cavidad de la herida y adaptarse al lecho de la herida, lo que permite un entorno de curación de heridas húmedo óptimo.

La película superior funciona como una membrana semipermeable, lo que permite la transmisión de gases, incluido el oxígeno y el vapor de agua, y al mismo tiempo proporciona una barrera a los fluidos y contaminantes de partículas (incluidas las bacterias).

Esta transmisión de vapor húmedo prolonga el tiempo de uso de los apósitos aumentando la capacidad total de manejo de fluidos. En

consecuencia, un apósito de espuma Biatain mantiene la herida húmeda de forma controlada, para crear el entorno óptimo para la cicatrización húmeda de heridas. Además, proporciona aislamiento térmico, protección mecánica y soporta la penetración del exudado.

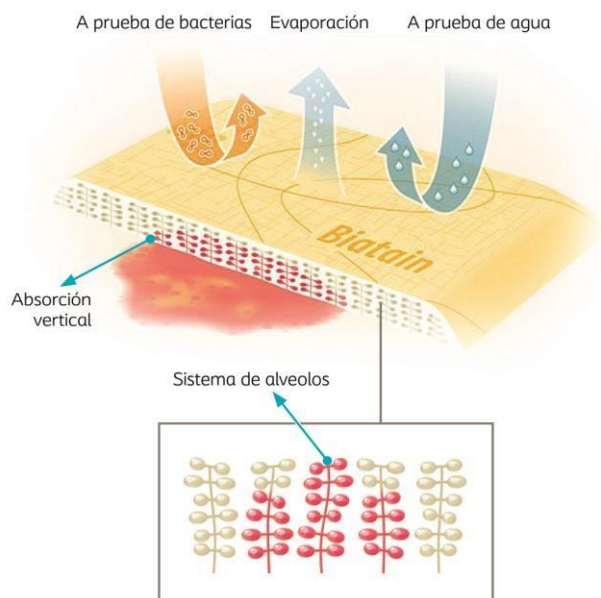

#### • Indicaciones

Los Apósitos de Espuma Biatain No Adhesivos están indicados para una amplia variedad de heridas con exudado, como:

- Úlceras vasculares de origen venoso, arterial o mixto
- Úlceras por presión / Lesiones por presión
- Quemaduras de segundo grado
- Heridas posoperatorias



Ordenes &  
Suministros

## FICHA TÉCNICA

### BIATAIN ESPUMA



Coloplast

- Excoriaciones de la piel.
- Úlceras del pie diabético no infectadas
- Zonas donantes
- Pueden utilizarse con pacientes que estén siendo tratados de una infección local o sistémica, según el criterio del médico
- Pueden ser utilizados durante el proceso de cicatrización para proteger los tipos de heridas indicadas
- Pueden utilizarse en combinación con tratamiento por compresión
- Pueden usarse conjuntamente con Purilon Gel para el desbridamiento autolítico efectivo del tejido necrótico

#### • Instrucciones de Uso

1. Lave la herida con agua estéril destilada o solución salina fisiológica. Seque cuidadosamente la piel alrededor de la herida. No se ha demostrado que el uso de otros productos de limpieza en combinación con los Apósitos de Espuma Biatain sea seguro.
2. Si utiliza una película, crema, pomada o producto similar, deje que la piel se seque antes de aplicar el apósito.
3. Saque el Apósito de Espuma Biatain de su envase siguiendo una técnica aséptica. No toque la parte lisa (no impresa) de la espuma.
4. Aplique los Apósitos de Espuma Biatain según las ilustraciones e instrucciones de aplicación. Elija un apósito cuya almohadilla de espuma sobresalga del borde de la herida al menos dos centímetros (en el caso de los apósitos pequeños, con que sobresalga un centímetro es suficiente).
5. Los Apósitos de Espuma No Adhesivos Biatain deben fijarse con un vendaje secundario o un vendaje compresivo.
6. Los Apósitos de Espuma Biatain deben cambiarse según las indicaciones clínicas o cuando el exudado se acerque visiblemente al borde del apósito.
7. Los Apósitos de Espuma Biatain pueden dejarse puestos durante un período de hasta 7 días, dependiendo de la cantidad de exudado, del estado del apósito y del tipo de herida.



Ordenes &  
Suministros

## FICHA TÉCNICA

### BIATAIN ESPUMA



Coloplast

- **Aplicación**



Apósitos de Espuma No Adhesivos Biatain El apósito debe aplicarse con la parte lisa (no impresa) en contacto con la herida.



Para retirar el apósito, levante con cuidado las esquinas y sepárelas de la herida.

- **Presentaciones**

Biatain: Apósito de 10x10, 15x15, 20x20,

Caja por 5 y 10 unidades, dispuestas en empaques individuales y estériles.

- **Almacenamiento**

- En lugar fresco, seco y limpio
- Protegido de la luz y con humedad relativa menor a 60% ○  
Temperatura entre 5 a 25 °C

- **Datos de Interés General**

- Fabricante: COLOPLAST A/S
- Importador: ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
- País origen: Hungría, Francia, China, Estados Unidos

|                                                                                                                        |                                                   |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Ordenes &amp;<br/>Suministros</b> | <b>FICHA TÉCNICA</b><br><br><b>BIATAIN ESPUMA</b> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

- Registro Sanitario Invima No. 2017DM-0016353 vigente hasta 30/05/2027
- Tipo de Dispositivo: No invasivo
- Clasificación de Riesgo: IIB
- Vida útil: 3 años
- Método de esterilización: se esterilizan mediante el uso de irradiación Beta.
- No reutilizar. Para un solo uso. La reutilización de este producto de un solo uso podría comportar riesgos para el usuario. El reprocesamiento, la limpieza, la desinfección y la esterilización pueden afectar a las características del producto y exponer al paciente a un riesgo adicional de lesión o infección.
- En caso de reacción alérgica, póngase en contacto con Coloplast para obtener información sobre los componentes.
- En condiciones de uso privado normal, el producto se puede eliminar junto con otros residuos domésticos, a menos que las reglamentaciones locales establezcan requisitos especiales. Este producto no debe descargarse al medio ambiente.