



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA
POLVOS COLOPLAST



Coloplast

Polvos Coloplast
Polvos Periestomales



- **Descripción:**

Polvo fino elaborado en hidocoloide para reparar lesiones periestomales de leves a moderadas, por drenajes y fugas. Tiene la capacidad de absorber la humedad de la piel, y se adhiere a la piel húmeda o lesionada. Hipoalergénico.

- **Composición del Producto:**

Carboximetilcelulosa sódica, Goma, Gelatina y Pectina

- **Características y Acciones del Producto**

- Los polvos periestomales tienen una excelente capacidad de absorción ○ Absorben efectivamente el exudado y las fugas que se puedan presentar ○ Por su composición sirven para regenerar y cicatrizar lesiones en la piel o para proteger pieles altamente sensible y predispuestas a éstas lesiones
- Permiten que la piel permanezca seca y reducen el riesgo de futuras irritaciones de la piel
- El producto viene estéril ○ Sirve para múltiples aplicaciones, la botella es reusable ○ Por su tamaño es fácil de llevar en un bolso de mano

- **Indicaciones**

Los polvos están indicados en lesiones de la piel periestomal: maceración, dermatitis, etc.

 Ordenes & Suministros	FICHA TÉCNICA POLVOS COLOPLAST	
--	---	---

- **Instrucciones de Uso**

1. Lavar y secar muy bien la piel
2. Aplicar una pequeña cantidad de polvo alrededor de la piel periestomal, cubriendo la zona que se encuentra afectada
3. Remover el exceso de polvo
4. Aplicar la barrera o dispositivo de ostomía

- **Presentaciones**

Frasco por 25 gramos, unidad.

Caja por 16 unidades

- **Almacenamiento**

- En lugar fresco, seco y limpio
- Protegido de la luz y con humedad relativa menor a 60% ○ Temperatura entre 5 a 25 °C

- **Datos de Interés General**

- Fabricante: COLOPLAST A/S
- Importador: ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
- País origen: Hungría, Francia, China, Estados Unidos
- Registro Sanitario Invima No. 2021DM-0005926-R1
- Vigente hasta 20/01/2031
- Tipo de Dispositivo: No invasivo
- Clasificación de Riesgo: IIB
- Vida útil: 2 años
- No estéril.