

MSD

3M™ Health Care Academy

Tegaderm™ Silicone Foam

Apósito de espuma suave y fuerza adhesiva

Descripción

3M presenta su innovadora tecnología de adhesivos de silicona, Apósito 3M™ Tegaderm™ Silicone Foam que brinda una adhesión significativamente mejor, sin perder la gentileza con la piel.

Características y Ventajas

- Respaldo de película de poliuretano combina un innovador adhesivo y que mantiene un nivel de adhesión constante
- Menor tensión superficial – adhesivo menos agresivos
- Disminuyen el riesgo de MARSÍ si se realizan múltiples cambios de apósito o en pieles frágiles
- Es reposicionable, se puede despegar y volver a adherir.
- El adhesivo de silicona mantiene el apósito en su lugar sin dañar el área de la herida permitiendo el pase del exudado.
- Mayor "transpirabilidad" Alta tasa de transmisión de vapor (MVTR), favorece la gestión del microclima.
- Sistema muy fácil de aplicar, incluso con guantes puestos, así tu otra manos queda libre para posicionar al paciente.
- Bordes permanecen adheridos por más tiempo- menor riesgo de pérdida
- Capa superabsorbente que provee rápida y mayor absorción,
- Capa de espuma fenestrada único diseño de múltiples capas que mejoran la flexibilidad y absorción de humedad para ayudar minimizar la interrupción de la cicatrización.
- Provee mayor retención de humedad y bloquea para minimizar el riesgo de maceración perilesional .
- Capacidad para acceder a áreas corporales con alto riesgo de Lesión por presión.
- Tamaño correcto del apósito para ubicaciones de alto riesgo.
- Sistema de colocación patentado y único.



Tegaderm™ Silicone Foam

Apósito de espuma suave y fuerza adhesiva

Composición

- Película de poliuretano transparente
- Una capa para control de la humedad
- Una capa superabsorbente
- una almohadilla de espuma fenestrada
- Adhesivo de silicona.

Indicaciones y usos

- Los apósitos de espuma de silicona 3M™ Tegaderm™ ofrecen un tiempo de uso significativamente más largo en comparación con otros del mercado, lo que ayuda a ahorrar tiempo y dinero en los cambios de vendajes no programados.
 - Prevención de lesiones por presión,
 - desgarros cutáneos,
- Las aplicaciones adicionales incluyen, usarlo como apósito secundario (cubierta) junto con rellenos para heridas (como apósitos de gasa o alginato) utilizar bajo sistemas de envoltura de compresión para el tratamiento de úlceras venosas de la pierna.
- Tiempo de uso hasta 7 días en piel y piel comprometida.

Precauciones y advertencias

1. No utilice el apósito adhesivo de espuma Tegaderm™ Foam Adhesive en combinación con agentes oxidantes como peróxido de hidrógeno o solución de hipoclorito. Estas soluciones pueden afectar la estructura y rendimiento de la capa de poliuretano del apósito hidrocélular.
2. En el momento del cambio, si el apósito está adherido a la superficie de la herida, sátele con solución salina normal y despegue suavemente.
3. Observe la úlcera por si tuviera signos de infección. Si se produce una infección, cuyos síntomas serían fiebre, aumento de dolor, rojez, hinchazón o un olor o supuración anormales, consultar con un profesional sanitario. El apósito adhesivo de espuma Tegaderm™ Foam Adhesive puede utilizarse en heridas infectadas sólo bajo el cuidado de un profesional sanitario.
4. Si la herida no comienza a mostrar señales de cicatrización o si se presenta algún otro síntoma inesperado, consulte con un profesional sanitario.

Almacenamiento y vida útil

Producto de único uso esterilizado con método de rayos gamma.

Para obtener los mejores resultados, almacenar a temperatura ambiente. Evitar exceso de calor y humedad.

Consultar la fecha de caducidad impresa en cada caja para verificar la validez del producto.

Presentación

Código	Descripción	Cantidad
90647	6 in. x 6.75 in. 15 cm x 17 cm	Caja x 10 apósitos
90616	5½ in. x 6¾ in. (14 cm x 17,1 cm) almohadilla 7½ in. x 8¾ in (19 x 22,2 cm)	Caja x 5 apósitos



División Soluciones Médicas

Canaval y Moreyra 641. Corpac San Isidro, Lima 15036
Teléfono: 0511-2242728