



Medical Care Well S.A.S.

SERVIMOS PARA
LA SALUD

ESPECIALIZADOS EN VÍA AÉREA

FICHA TECNICA

RESUCITADOR MANUAL REUSABLE PEDIATRICO



MARCA:	HSINER			
FABRICANTE:	HSINER Co. Ltd.			
PAIS DE ORIGEN	TAIWAN			
REFERENCIA:	60305			
REGISTRO SANITARIO INVIMA:	2019DM-0020020	FECHA DE VIGENCIA:	2/07/2029	
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO:	IIA	VIDA UTIL:	5 AÑOS	
NOMBRE COMERCIAL:	Resucitador Manual Reusable Pediátrico			
DESCRIPCIÓN	También conocido con el nombre de Ambu; dispositivo médico que se utiliza para ventilar manualmente a pacientes con problemas de respiración o en casos de paro cardiopulmonar. Se conecta directamente a la persona por medio de la mascarilla o tubo endotraqueal suministrando la cantidad de oxígeno necesaria.			
COMPOSICIÓN:	Reservorio: Policloruro de Vinilo Balón: Polisulfona - Silicona Válvulas (Peep y Pop Off) : Polisulfona- Silicona Máscaras Faciales: Silicona Tubo de Oxígeno: Policloruro de Vinilo. Longitud 2 mts.			
PRESENTACIÓN:	Unidad - Bolsa no estéril. Libre de Látex			
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	El dispositivo es reutilizable para autoclave, no debe exceder 134°C para series de 10 minutos (no incluye el tubo de Oxígeno y bolsa de reservorio (pvc). Desinfección con glutaraldehído al 2% de Cidex			
INDICACIONES DE USO:	Para proporcionar la ventilación de presión politiva a paciente pediátrico: Reservorio de 2.500 ml entra a funcionar cuando el resucitador se conecta a una fuente de oxígeno. Balón de 450 ml se presiona para proporcionar Oxígeno al paciente. Máscaras Fáciales: # 3 Pediátrica cubre boca y nariz. Válvula Peep: Mantiene una presión positiva. 5~20 cm H ₂ O. Válvula Pop Off: Se activa y descarga el aire a la atmósfera por exceso de presión. 40 cm H ₂ O.			
PRECAUCIONES:	Destinado a ser utilizado por personal médico calificado. Para obtener el mejor rendimiento, úselo dentro de los 5 años después de la fecha de fabricación.			
CONTRAINDICACIONES:	No utilizar si el envase presenta averías.			
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	Lugar limpio, fresco y seco. Sin exposición directa al sol. Rango de temperatura: De - 40°C a 60°C Rango de Humedad relativa: < 85%			
DISPOSICION FINAL:	Se debe realizar según el protocolo interno de cada institución			

Contacto: MEDICAL CARE WELL S.A.S
Carrera 25 No. 24B-35
Tel(601) 5163716
Bogotá - Colombia
Email:comercial@medicalcarewell.com