



Medical Care Well S.A.S.

SERVIMOS PARA
LA SALUD

FICHA TECNICA

ESPECIALIZADOS EN VÍA AÉREA

CIRCUITO COAXIAL PARA ANESTESIA

MARCA: NINGBO

FABRICANTE: NINGBO HUAKUN MEDICAL
EQUIPMENT Co. LTD.

PAIS DE ORIGEN: CHINA

REFERENCIA: A20010-2

REGISTRO SANITARIO INVIMA: 2014DM-0012091

FECHA DE VIGENCIA: 12/11/2024

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: IIA

VIDA UTIL: 5 AÑOS

NOMBRE COMERCIAL: CIRCUITO COAXIAL PARA ANESTESIA CON BALON DE 2 LITROS

DESCRIPCIÓN

Llamado comunmente tipo "F" ó Unilimb que significa que la rama inspiratoria y espiratoria van unidas en un solo tubo, anti-flexión, hermético diseño que reduce el volúmen y el peso del circuito. Este circuito adulto ayuda a mantener y conservar el calor corporal del paciente reduciendo la hipotermia transoperatoria, aumentando la temperatura y humedad de los gases inspirados.

COMPOSICIÓN:

Mangueras corrugadas de longitud 150 cm - diámetro 22 mm, Conector en codo con puerto para capnografía, linea interna para medición de CO2, un segundo tramo de manguera expandible libres de látex y balón de anestesia de 2 litros en látex. Elaborado en PE, PP, EVA.

PRESENTACIÓN: Unidad - Bolsa sellada no estéril

METODO DE ESTERILIZACIÓN: N/A - Uso único por paciente.

INDICACIONES DE USO:

Dispositivo médico indicado para anestesia y/o ventilación.
*Antes de la conexión del paciente, asegúrese de que todas la conexiones estén seguras y presurice el circuito para confirmar que no haya fugas u oclusión del circuito de respiración.
*Desecha el circuito después de un solo uso.
*Pruebe la interfaz antes de usar según las recomendaciones del fabricante del equipo y verifique el monitor.
*Para un mejor rendimiento, use dentro de los cinco años posteriores a la fecha de fabricación.

PRECAUCIONES:


Destinado a ser utilizado por personal cualificado y capacitado. El remojo, el enjuague, el lavado, la esterilización con gas o vapor de este circuito pueden provocar una retención dañina de gases residuales o un aumento peligroso de la resistencia respiratoria.

CONTRAINDICACIONES: No utilizar si el envase presenta averías.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Lugar limpio, fresco y seco. Sin exposición directa al sol.
Rango de temperatura: De - 15°C a 50°C
Rango de Humedad relativa: < 80%

DISPOSICION FINAL: Se debe realizar según el protocolo interno de cada institución

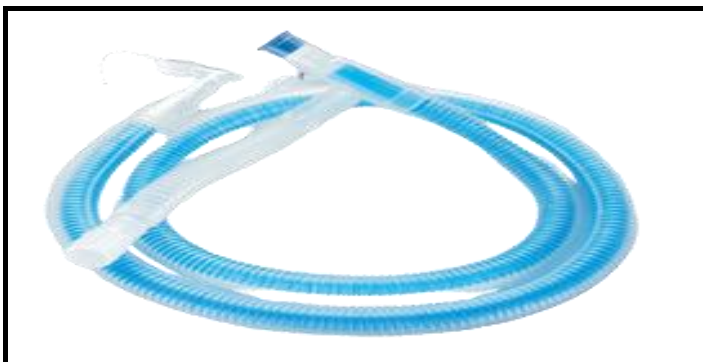

Contacto: MEDICAL CARE WELL S.A.S
Carrera 25 No. 24B-35
Tel(601) 5163716
Bogotá - Colombia
Email:comercial@medicalcarewell.com