



Medical Care Well S.A.S.

SERVIMOS PARA
LA SALUD

ESPECIALIZADOS EN VÍA AÉREA

FICHA TECNICA

CIRCUITO PARA ANESTESIA PEDIATRICO MANGUERA EXPANDIBLE - 3M-1L

MARCA: NINGBO

FABRICANTE: NINGBO HUAKUN MEDICAL
EQUIPMENT Co. LTD.

PAIS DE ORIGEN: CHINA

REFERENCIA: A10012-1

REGISTRO SANITARIO INVIMA: 2014DM-0012091

FECHA DE VIGENCIA: 12/11/2024

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: IIA

VIDA UTIL: 5 AÑOS

NOMBRE COMERCIAL: CIRCUITO PARA ANESTESIA PEDIATRICO MANGUERA EXPANDIBLE 3M CON BALON DE 1 LITRO

DESCRIPCIÓN: Dispositivo médico que permite la conexión entre la máquina de anestesia/ventilador y el paciente. Permitiendo la adecuada ventilación y administración de gases anestésicos.

COMPOSICIÓN: Mangueras expandibles de longitud 300 cm - diámetro 15 mm, Conector en codo con puerto para capnografía, Conector en Y, conectores universales de 22mm Ø (puños) libres de látex y balón de anestesia de 1 litro en látex. Elaborado en PE, PP, EVA.

PRESENTACIÓN: Unidad - Bolsa sellada no estéril

METODO DE ESTERILIZACIÓN: N/A - Uso único por paciente.

INDICACIONES DE USO: Dispositivo médico indicado para anestesia y/o ventilación.
*Antes de la conexión del paciente, asegúrese de que todas las conexiones estén seguras y presurice el circuito para confirmar que no haya fugas u oclusión del circuito de respiración.
*Desecha el circuito después de un solo uso.
*Pruebe la interfaz antes de usar según las recomendaciones del fabricante del equipo y verifique el monitor.
*Para un mejor rendimiento, use dentro de los cinco años posteriores a la fecha de fabricación.

PRECAUCIONES: Destinado a ser utilizado por personal cualificado y capacitado. El remojo, el enjuague, el lavado, la esterilización con gas o vapor de este circuito pueden provocar una retención dañina de gases residuales o un aumento peligroso de la resistencia respiratoria.

CONTRAINDICACIONES: No utilizar si el envase presenta averías.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Lugar limpio, fresco y seco. Sin exposición directa al sol.
Rango de temperatura: De - 15°C a 50°C
Rango de Humedad relativa: < 80%

DISPOSICION FINAL: Se debe realizar según el protocolo interno de cada institución



Contacto: MEDICAL CARE WELL S.A.S
Carrera 25 No. 24B-35
Tel(601) 5163716
Bogotá - Colombia
Email:comercial@medicalcarewell.com