


Ligador Hemorroidal desecable **LEM** **GAVORING** - Anillos elásticos para ligadura de hemorroides.

Ref A.5650 – A.5650.3 – A.5650.5

LEM ligador de bandas de hemorroides
para usar con succión

Ref A.5660 – A.5660.3 – A.5660.5

LEM ligador de bandas de hemorroides
Para usar con forceps

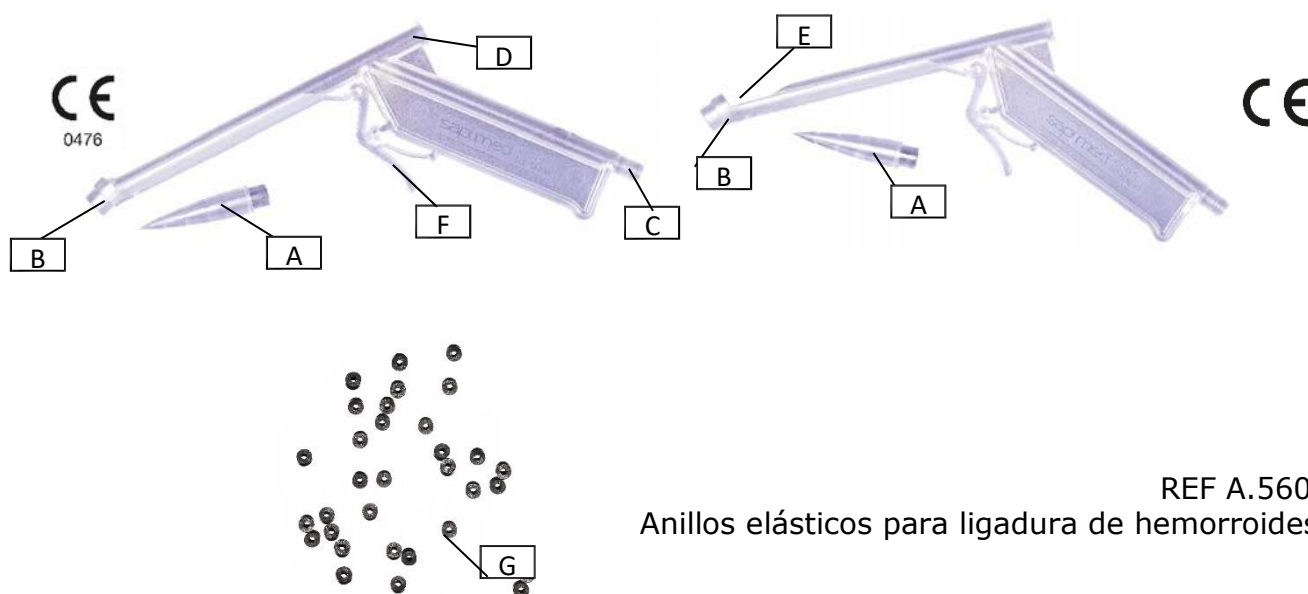

REF A.5600

Anillos elásticos para ligadura de hemorroides.

Indicaciones para el uso

Los ligadores de banda hemorroides desechables SAPI MED se utilizan **Rubber band ligation (RBL)**, un tratamiento ambulatorio para hemorroides internas de cualquier grado. Se aplica un anillo elástico a la base de la hemorroide, que detiene el suministro de sangre a la masa hemorroidal. La hemorroide se encogerá y morirá en unos pocos días con un tejido hemorroidal y una banda que se desprenden durante los movimientos intestinales normales, probablemente sin que el paciente se dé cuenta..

Descripción

Es un producto para un solo paciente disponible en dos variantes: para usar con pinzas de succión o de agarre. Ambas variantes se suministran con un cono cilíndrico escalonado (Ø 10 mm) para facilitar la carga de la banda.

1. LEM PARA USO CON SUCCION (REF A.5650 – A.5650.3 – A.5650.5)

- Abre los sobres y saca los dispositivos.
- Coloque el cono de carga (A) en el cilindro (B).
- Coloque el anillo (G) en el cilindro (B) utilizando el cono (A).
- Conecte el agarre (C), utilizando un tubo de succión, a un aspirador quirúrgico de baja presión (-5 / -10 cm H2O).
- La velocidad de succión se rige manualmente por el pulgar del operador sobre el regulador de aspiración agujero (D). El nódulo hemorroidal se introduce en el extremo cilíndrico del cono (B).
- Apretar el gatillo (F) y unir el nódulo.
- Deseche el dispositivo en los residuos plásticos del hospital.

2. LEM PARA USO CON FORCEPS (Ref A.5660 – A.5660.3 – A.5660.5)

- a. Abre los sobres y saca los dispositivos.
- b. Coloque el cono de carga (A) en el cilindro (B).
- c. Coloque el anillo (G) en el cilindro (B) utilizando el cono (A).
- d. Inserte las pinzas a través de la abertura de corte en el eje (E). Agarrar firmemente el nódulo y tirar en el extremo cilíndrico del cono (B).
- e. Apretar el gatillo (F) y unir el nódulo.
- F. Deseche el dispositivo en los residuos plásticos del hospital.

Suministrado: no estéril

De un solo uso

Precauciones: No utilice los instrumentos si el embalaje está dañado. SAPI MED se exime de toda responsabilidad por daños debidos al uso incorrecto o uso de personal no calificado

Fabricado por

SAPI MED S.p.A.

Via della Chimica, 6 – Z.I. D3, 15121 Alessandria – ITALY

Tel.: *39/0131/348109 - Fax: *39/0131/348383

E mail: info@sapimed.com

Web site: www.sapimed.com