

FICHA TÉCNICA

MÁSCARA ORONASAL NOVASTAR® PLUS CON CODO ESTÁNDAR (SE) PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA

Descripción	La máscara oronasal NovaStar® plus, con codo estándar (SE), está diseñada para terapia de ventilación no invasiva. Dado que la máscara cubre la nariz y la boca, facilita una terapia eficaz incluso si se respira por la boca. Arnés con clip magnético para una rápida colocación.
Imagen	
Referencias con codo estándar (SE)	Talla S (MP05051)
	Talla M (MP05052)
	Talla L (MP05053)
Unidad de empaque	Unidad
Incluye	Conformado por 1 máscara oronasal y un arnés
Limpieza y desinfección mecánicas	Para la limpieza automática de la máscara sólo se puede utilizar un producto de limpieza y ningún agente de aclarado. De lo contrario, existe el riesgo de que se formen grietas.
Recambio	Los productos con superficie pegajosa, quebradiza y que presenten fugas no deben volver a usarse.
Duración máxima de uso	No se deben utilizar los artículos que se hayan decolorado claramente o endurecido al cabo de un uso prolongado.
Especificaciones	Almohadilla en gel suave de silicona con revestimiento en poliuretano y anillo flexible incrustado, lo cual permite que la máscara sea doblada y ajustada a las características de la cara del paciente y reducir al mínimo las fugas; con soporte frontal ajustable y con gel de silicona. Libre de látex.

FICHA TÉCNICA

MÁSCARA ORONASAL NOVASTAR® PLUS CON CODO ESTÁNDAR (SE) PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA

DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

Limpieza	Separe el arnés de la máscara, ponga la máscara en remojo por 2 minutos en un producto de limpieza enzimática, enjuague con agua corriente templada y deje que se seque al aire, protegida de la luz solar directa. El arnés se debe lavar a mano con agua y jabón puro, enjuagar con abundante agua fría y deje secar al aire ambiente.
Desinfección Manual	La desinfección debe realizarse preferiblemente con desinfectantes en base a compuestos de amonio cuaternario y aldehídos. Coloque la máscara en remojo en la solución desinfectante seleccionada y enjuáguela luego. Siga las instrucciones del fabricante del desinfectante en todo el proceso de desinfección química. El arnés no se puede esterilizar ni desinfectar con productos químicos.
Recomendación	La máscara puede utilizarse varias veces en distintos pacientes, sin embargo se recomienda la reutilización siempre y cuando se conserve integridad en las partes que componen la misma.