

SUR-FIT®PLUS Durahesive®**Barrera cutánea convexa moldeable con reborde****DESCRIPCIÓN**

La barrera cutánea convexa moldeable con reborde Durahesive es una barrera cutánea con un adhesivo moldeable que permite que la abertura del estoma se moldee según la forma y el tamaño del estoma sin la necesidad de usar unas tijeras. La barrera cutánea convexa moldeable con reborde Durahesive debe usarse junto con las bolsas.

**Componentes**

- Adhesivo trilaminado de Durahesive® compuesta por carboximetilcelulosa, pectina y gelatina.
- Lámina de polietileno de soporte
- Anillo de soporte en polietileno de baja densidad y etilenvinilacetato con polietileno.
- Pestaña de resina de polietileno de baja densidad.
- Lámina desprendible de poliestireno – silicona – poliéster – polietileno
- Disco Convexo en anillo de copolímero de polietileno Vinil Acetato
- Collar de poliéster labrado con adhesivo acrílico

Uso previsto

- Para el manejo de las descargas del estoma

Características

- Acción enrolladora: El adhesivo moldeable suave de la barrera se enrolla
- hacia atrás para abrirse en forma justa al tamaño y forma de la estoma, por tanto, no se necesitan tijeras. La tecnología con Memoria de rebote: La barrera moldeable abraza independiente y suavemente al contorno de la estoma creando un ajuste seguro y personalizado evitando la filtración del contenido del estoma (efluente).
- Efecto de Cuello de tortuga: El Durahesive® en contacto con la humedad se expande arriba del estoma mejorando el ajuste y aportando una mejor protección evitando la filtración del contenido del estoma (efluente).
- Absorción: La capa de Durahesive® que está expuesta al efluente permite mayor absorción y distensión al ponerse en contacto con el efluente líquido o semilíquido de la estoma, mejorando su ajuste.
- Protección de la piel: El ajuste personalizado minimiza el riesgo de contacto del efluente con la piel periestomal.
- Adaptabilidad: Se contrae y expande con el estoma ayudando a mantener un ajuste preciso durante su uso.

Precauciones

- **PRECAUCIÓN:** Se debe tener cuidado al usar productos adhesivos alrededor de una urostomía de drenaje, especialmente si está asociada con megauréteres y no hay un receptáculo urinario. En raras ocasiones, se ha documentado en informes clínicos la presencia de adhesivo en el sistema colector renal de estos pacientes. Si se detecta una masa en las vías urinaria, se debe evaluar el uso continuado del producto adhesivo e iniciar las medidas clínicas apropiadas.
- **PRECAUCIÓN:** Se debe tener cuidado si existe evidencia de que esté afectada la circulación sanguínea en el estoma o en el área adyacente a la piel periestomal.

Nota: Si se observa irritación, se debe interrumpir su uso y consultar con un profesional médico.

SUR-FIT® PLUS Durahesive®**Barrera cutánea convexa moldeable con reborde****Instrucciones de uso****PREPARACIÓN DE LA BARRERA CUTÁNEA**

La piel periestomal debe estar limpia, seca, y sin sustancias disolventes o grasientas.

Antes de iniciar la preparación de la barrera cutánea, lea esta sección para familiarizarse con el procedimiento.

- Mida el estoma por medio de la guía de medidas del estoma adjunta, y seleccione el tamaño adecuado de la barrera cutánea moldeable convexa con reborde Durahesive.
- Abra el paquete individual de la barrera cutánea, guardando la bandeja transparente del paquete. Utilice una pluma o marcador para trazar el patrón del estoma sobre la bandeja transparente del paquete. Tal vez desee recortar el patrón y usar la bandeja transparente del paquete como plantilla para futuros usos. Revise la plantilla periódicamente, ya que la forma y el tamaño del estoma cambian. Se usará este patrón para trazar un contorno en la parte posterior de la barrera cutánea a fin de facilitar el moldeado de la abertura del estoma de la barrera cutánea.
- Trace el patrón del estoma (de su bandeja del paquete) en el refuerzo plástico de la barrera cutánea (el lado corporal de la barrera cutánea) de la barrera cutánea convexa moldeable con reborde Durahesive. A algunas personas les puede resultar fácil, con el tiempo, moldear la abertura del estoma sin trazar un patrón.
- Con la parte del reborde hacia usted (el lado opuesto del refuerzo plástico), presione la parte elevada central de la cubierta plástica en el orificio de entrada hasta que la parte central sobresalga hacia fuera. Este paso facilitará el moldeado de la barrera cutánea.
- Para adaptar individualmente la abertura del estoma, coloque las yemas de los dedos (o los pulgares) en el borde del orificio de entrada y comience a enrollar la barrera cutánea hacia atrás. Use las yemas de los dedos (o los pulgares) para seguir enrollando la barrera cutánea hacia atrás hasta que pueda ver el patrón del estoma en la cubierta plástica de refuerzo.
- Puesto que éste es un producto moldeable no se recomiendan las tijeras para adaptar individualmente la abertura del estoma.
- Después de moldear la abertura del estoma, retire la cubierta plástica de refuerzo de la barrera cutánea. No retire todavía la lámina de papel blanco desprendible del borde de la cinta del reborde.

COLOCACIÓN DE LA BARRERA CUTÁNEA

- Centre la abertura sobre el estoma y presione la barrera cutánea para que quede en su lugar.
- Alise con los dedos el borde interno más cercano al estoma (presionando durante 30 segundos) para asegurar que la barrera cutánea rodea bien al estoma.
- Retire la lámina de papel blanco desprendible del borde de la cinta del reborde y coloque esta última en su lugar; alise las arrugas del borde de la cinta del reborde.

COLOCACIÓN DE LA BOLSA

- Seleccione el tamaño de bolsa apropiado para la barrera cutánea.
- Antes de colocar la bolsa, deje que entre un poco de aire separando suavemente la bolsa, según la ilustración.
- Sujete la bolsa apropiada a la barrera cutánea tal y como se indica a continuación:
- Para verificar el cierre del reborde, presione en el fondo del reborde y alrededor hacia la parte superior del reborde. Se deberían oír varios "clic".

RETIRADA DE LA BOLSA: consultar manual de instrucciones

RETIRADA DE LA BARRERA CUTÁNEA

- Para retirar la barrera cutánea de la piel, ejerza presión en la piel con una mano y suavemente despegue de la piel la barrera cutánea.

INSTRUCCIONES PARA CERRAR LA BOLSA: de acuerdo con tipo de bolsa consultar manual de instrucciones

Esterilidad	Registros Sanitarios Región Andina	Vida Útil	Condiciones de almacenamiento
Producto no estéril	Colombia: 2018DM-0017961 Ecuador: 2173-DME-1116 Perú: DM14253E	5 años	Almacenar a temperatura ambiente (10°C – 25°C / 50°F – 77°F). Mantener en lugar seco.

SUR-FIT® PLUS Durahesive®

Barrera cutánea convexa moldeable con reborde

Empaque Primario

Material de empaque: Papel/PVC

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Alto]	Peso (g)
411449	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX13/45MM1X10PKINT	00768455186723	15 x 1 x 15	32,3
411450	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKINT	00768455186730		
411451	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	00768455186747		

- Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.

Empaque Secundario

Material de empaque: Caja plegadiza de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)	Unidades por caja
411449	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX13/45MM1X10PKINT	00768455105779	15,2 x 13,3 x 15,2	380	10
411450	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKINT	00768455105786			
411451	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	00768455105793			

Empaque Terciario

Material de empaque: Caja corrugada de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (kg)	Caja máster por
411449	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX13/45MM1X10PKINT	10768455105776	32,2 x 28,2 x 46,6	5,9	10
411450	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKINT	10768455105783			
411451	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	10768455105790			



Fabricantes:

ConvaTec Limited - Reino Unido

Convatec Dominican Republic – República Dominicana

*Consultar registro sanitario de cada país



Importadores:

CONVATEC COLOMBIA LTDA

CONVATEC ECUADOR S.A.

CONVATEC PERÚ S.A.C.



ConvaTec Limited

First avenue, Deeside Industrial Park

Deeside, Flintshire, CH5 2NJ, UK

www.convatec.com

Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.

Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.

Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec.

Material exclusivo para profesionales de la salud.

FUENTE: Datafile Convatec