

SUR-FIT PLUS®

Barreras protectoras de piel con Stomahesive®

DESCRIPCIÓN

Barrera con protector cutáneo Stomahesive elaborado a base de hidrocoloides (Carboximetilcelulosa Sódica, pectina, gelatina) suspendidos en una película de polietileno y provisto de un aro Sur-Fit Plus flexible.



Componentes

- La Barrera Protectora de Piel Stomahesive® está compuesta por hidrocoloides: Carboximetilcelulosa Sódica, pectina, gelatina y poliisobutieno.
- Una película de polietileno en su cara externa y un aro Sur-Fit Plus flexible.
- Adicional a lo anterior, las barreras flexibles cuentan con un Collar fabricado para los alrededores del disco Stomahesive® con material de respaldo adhesivo.

Características

- Protección de la Piel: las sustancias hidrocoloides absorben la humedad y tienen capacidad de regenerar la piel irritada.
- Adhesión seco a Húmedo: se adhieren a la piel seca y absorben la humedad producida por la transpiración, manteniendo la piel integra y protegida. Puede permanecer en su sitio hasta por siete días.
- Impermeabilidad: La película de polietileno que cubre la barrera impide el paso de líquidos permitiéndole al paciente tomar su ducha diaria e incluso entrar a una piscina. Prolonga su tiempo de uso.
- Barreras Protectoras 100% en hidrocoloides (Regulares) y con adhesivo microporoso (Flexibles): adaptables a los diferentes tipos de abdomen

Uso previsto

Las barreras están indicadas para el manejo de excreciones de:

Ostomías Digestivas:

- Ileostomías
- Yeyunostomías
- Colostomías

Ostomías Urinarias:

- Vesicostomías
- Ureterostomías
- derivaciones urinarias

Instrucciones de uso

Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación.

- Medir el diámetro del estoma y valorar las condiciones de la piel circundante
- Limpiar la piel circundante con agua limpia y jabón suave
- Remover las sustancias grasosas de la piel circundante y secar perfectamente el área periestomal
- Elegir la barrera de un tamaño de aro que sobrepase por lo menos 12mm el tamaño del diámetro del estoma
- Ampliar el orificio de la barrera protectora Stomahesive al tamaño del estoma
- Aplicar pasta Stomahesive o polvo Stomahesive según necesidad
- Aplicar la Barrera sobre la piel haciendo un masaje sobre ella para asegurar su fijación.

SUR-FIT PLUS®

Barreras protectoras de piel con Stomahesive®

Esterilidad	Registros Sanitarios Región Andina	Vida Útil	Condiciones de almacenamiento
Producto no estéril	Colombia: 2020DM-0022713 Ecuador: 2173-DME-1116 Perú: DM11705E	5 años	Almacenar a temperatura ambiente (10°C – 25°C / 50°F – 77°F). Mantener en lugar seco.

Empaque Primario Material de empaque: Papel/PVC				
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Alto]	Peso (g)
125143	SURFIT PLUS WFR 38MM (1X5PK) INT	00768455180295	15 x 1 x 15	36
125144	SURFIT PLUS WFR 45MM (1X5PK) INT	00768455180325		
125145	SURFIT PLUS WFR 57MM (1X5PK) INT	00768455180356		
125163	SURFIT PLUS WFR 100MM (1X5PK) INT	00768455180400		
400949	SURFIT PLUS WFR 70MM (1X5PK) INT	00768455181476		
401610	SURFIT PLUS WFR FLEX TAN 38MM (1X5PK)INT	00768455183029		
401611	SURFIT PLUS WFR FLEX TAN 45MM (1X5PK)INT	00768455183036		
401612	SURFIT PLUS WFR FLEX TAN 57MM (1X5PK)INT	00768455183043		
401613	SURFIT PLUS WFR FLEX TAN 70MM (1X5PK)INT	00768455183050		

- Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.

Empaque Secundario Material de empaque: Caja plegadiza de cartón					
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)	Unidades por caja
125143	SURFIT PLUS WFR 38MM (1X5PK) INT	00768455049127	12,7 x 5,2 x 12,7	200	5
125144	SURFIT PLUS WFR 45MM (1X5PK) INT	00768455049134			
125145	SURFIT PLUS WFR 57MM (1X5PK) INT	00768455049141			
125163	SURFIT PLUS WFR 100MM (1X5PK) INT	00768455049165			
400949	SURFIT PLUS WFR 70MM (1X5PK) INT	00768455049158			
401610	SURFIT PLUS WFR FLEX TAN 38MM (1X5PK)INT	00768455064762			
401611	SURFIT PLUS WFR FLEX TAN 45MM (1X5PK)INT	00768455064779			
401612	SURFIT PLUS WFR FLEX TAN 57MM (1X5PK)INT	00768455064786			
401613	SURFIT PLUS WFR FLEX TAN 70MM (1X5PK)INT	00768455064793			

SUR-FIT PLUS®

Barreras protectoras de piel con Stomahesive®

Empaque Terciario

Material de empaque: Caja corrugada de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (kg)	Caja máster por
125143	SURFIT PLUS WFR 38MM (1X5PK) INT	10768455049124	13,8 x 52,5 x 27,4	4,05	20
125144	SURFIT PLUS WFR 45MM (1X5PK) INT	10768455049131			
125145	SURFIT PLUS WFR 57MM (1X5PK) INT	10768455049148			
125163	SURFIT PLUS WFR 100MM (1X5PK) INT	10768455049162			
400949	SURFIT PLUS WFR 70MM (1X5PK) INT	10768455049155			
401610	SURFIT PLUS WFR FLEX TAN 38MM (1X5PK)INT	10768455064769			
401611	SURFIT PLUS WFR FLEX TAN 45MM (1X5PK)INT	10768455064776			
401612	SURFIT PLUS WFR FLEX TAN 57MM (1X5PK)INT	10768455064783			
401613	SURFIT PLUS WFR FLEX TAN 70MM (1X5PK)INT	10768455064790			



Fabricantes:

ConvaTec Limited - Reino Unido

Convatec Dominican Republic – República Dominicana



Importadores:

CONVATEC COLOMBIA LTDA

CONVATEC ECUADOR S.A.

CONVATEC PERÚ S.A.C.



ConvaTec Limited

First avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NJ, UK

*Consultar registro sanitario de cada país

www.convatec.com**Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.**

Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.

Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec.

Material exclusivo para profesionales de la salud.

FUENTE: Datafile Convatec