



FICHA TÉCNICA
SUR-FIT NATURA™ MOLDABLE DURAHESIVE™
BARRERA CON ANILLO FLEXIBLE DE HIDROCOLOIDE

PROVEEDOR: BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA.

PRODUCTO	
Nombre Genérico	Barrera Moldeable
Nombre Comercial	Sur-Fit Natura™ Moldable Durahesive™ Barrera con Anillo Flexible Hidrocoloide
Descripción	Las barreras cutáneas Durahesive están diseñadas para el manejo de descargas del estoma mayormente líquidas. A diferencia de otras barreras que se desintegran al contacto con descargas líquidas, las barreras Durahesive se expanden para proteger el estoma. Este efecto es llamado cuello de tortuga, ayuda a crear un sello más seguro sin lesionar la piel. Las barreras Durahesive también son fáciles de acoplar, de aplicar y retirar. Se adherirán de forma segura a la piel en actividades en las que el contacto con el agua es mayor, tales como tomar duchas y nadar.
Marca	Natura™, Durahesive™
Fabricante	ConvaTec Limited – Reino Unido ConvaTec, Inc. – Estados Unidos de América ConvaTec Dominican Republic, Inc. – República Dominicana
Composición del Producto	Consisten de un anillo de soporte plano delgado de plástico (LDPE, siglas en inglés de Polietileno de baja densidad), adherido a un disco Durahesive (del lado del cuerpo) / Durahesive (del lado de la pestaña) trilaminado o coextruido con una lámina de polietileno en relieve en el centro. Se posiciona un collar (fibra recubierta de adhesivo hidrocoloide/adhesivo acrílico de fibra de poliéster) sobre el anillo de soporte y posteriormente una pestaña del lado del cuerpo (LDPE con colorante beige), en la parte superior. La pestaña, el collar y el anillo están adheridos entre sí. Una fina capa de liberación removible (poliestireno) cubre totalmente el lado adhesivo de la barrera.
Características y Acciones del Producto	Las barreras Durahesive son ideales para aquellas personas cuyas descargas estomales son mayormente líquidas. • Adhesión: Las barreras Durahesive se mantienen firmemente adheridas a la piel mientras la protegen de las descargas irritantes; mantendrán su adhesión a la piel en actividades con una mayor exposición al agua como la ducha y la natación. • Protección de la piel: A diferencia de otras barreras que se pueden desintegrar al contacto con descargas líquidas, las barreras Durahesive se ensanchan para proteger el estoma. Este efecto especial llamado cuello de tortuga, ayuda a crear un sello más seguro sin lesionar la piel. • Aplicación: Las barreras Durahesive son fáciles de acoplar, aplicar y retirar debido a que cuentan con una pestaña que garantiza un cierre preciso mediante una serie de clics audibles.
Usos	Para el manejo de las descargas del estoma
Recomendaciones de Uso	Se recomienda consultar el instructivo de uso del sistema que es suministrado al interior del empaque, antes de la aplicación del mismo. La piel que rodea el estoma debe estar limpia, seca y libre de disolventes o sustancias grasosas. • Preparación del protector de la piel No retire la cubierta transparente ni el protector antiadhesivo del protector de la piel. El protector de la piel se debe amoldar a la forma y al tamaño del estoma sin necesidad de



	utilizar tijeras. Para personalizar la abertura del estoma, coloque sus pulgares (o dedos) en el borde del orificio de entrada y comience a enrollar el adhesivo. Use sus pulgares (o dedos) para seguir enrollando el adhesivo hasta crear una abertura del tamaño y la forma deseados para su estoma. El adhesivo debe enrollarse. No estire, no tire y tampoco corte el adhesivo para hacerlo más grande. Aplique de inmediato luego de moldear. • Aplicación del protector de la piel Retire el protector anti adhesivo del protector de la piel; Coloque la abertura del protector de la piel sobre el estoma; Aplique el protector de la piel presionando sobre la piel periestomal durante 30 segundos. En el caso de que haya algún borde de tela, retire el sobrante del protector antiadhesivo. Alíselo y elimine las arrugas; Con movimientos circulares, mantenga presionado el adhesivo contra el estoma durante 30 segundos. • Remoción Sostenga la piel con una mano y suavemente retire la barrera cutánea de la piel. Deseche la barrera
Registro Sanitario	INVIMA 2015DM-0012578 vigente hasta 10-Feb-2025
Presentaciones:	Caja x 10 barreras cutáneas. Están disponibles en los siguientes tamaños: Para estomas entre los 13-22mm (pequeños), pestañas de 45mm Para estomas entre los 22-33mm (medianos), pestañas de 45mm Para estomas entre los 33-45mm (grandes), pestañas de 57mm Para estomas desde 33-45mm hasta 45-56mm (extra grandes), pestañas de 70mm



**FORMATO DE CALIFICACIÓN
SUR-FIT NATURA™ MOLDABLE DURAHESIVE™
BARRERA CON ANILLO FLEXIBLE DE HIDROCOLOIDE**

Calificación de 1 a 5: 5= Excelente 1= Malo

PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LA INSTITUCIÓN

Concepto Técnico					
Facilidad de aplicación	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Adhesión	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Protección de la piel	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Resistencia al efluente	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Facilidad para amoldarse al estoma	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Facilidad de remoción	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Duración	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Comodidad para el paciente	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Empaques	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Claridad de las instrucciones de uso	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Presentación	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Servicio postventa: Asesoría educativa y servicio al cliente	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Otros:					
Observaciones:					
Calificación:					
Nombre del Calificador:					
Cargo:					
Fecha:					
Firma:					