

LITTLE ONES® EXTRA SMALL

BOLSA DRENABLE RECORTABLE DE UNA PIEZA
CON BARRERA STOMAHESIVE Y SISTEMA DE CIERRE INVISICLOSE®

DESCRIPCIÓN

La bolsa drenable Little Ones® de una pieza con sistema de cerrado InvisiClose® es un sistema de ostomía de una pieza que consta de una bolsa drenable con un sistema de cerrado de apéndice InvisiClose. El sistema de cerrado de apéndice InvisiClose está compuesto de una pestaña de seguridad, cierres de unión y cintas de cierre de la abertura.

Nota: Las bolsas Extra Pequeño Little Ones® no tienen una pestaña de seguridad y solo se deben doblar tres veces.



Características

- La barrera protectora Stomahesive® del sistema de una pieza Little Ones® Extra Small se adhiere a la piel seca y húmeda de una forma firme y delicada, mientras la protege de las descargas irritantes.
- Adaptación: Los sistemas recortables permiten que la barrera se adapte a diferentes tamaños y formas de estoma.
- Bolsa transparente: permite la observación del estoma y el efluente.
- Panel de confort: permite un contacto más suave de la bolsa con la piel, evitando irritaciones.

Componentes

La bolsa Little Ones® Extra Small es una bolsa drenable de forma simétrica. El collar adhesivo de la bolsa tiene una base de polietileno y una lámina para protección del adhesivo en silicona tratada. El collar adhesivo está unido sobre una abertura central en el panel que se encuentra hacia el lado del cuerpo. El collar está protegido con una cubierta de poliestireno, que tiene una lámina para protección de silicona, la cual va de cara al collar. El sistema de cierre del drenaje de la bolsa está conformado por tiras adhesivas de poliestireno, que se sellan al final con un par de sujetadores que se cierran sobre sí mismos.

Precauciones

PRECAUCIÓN: Se debe tener cuidado al usar productos adhesivos alrededor de una urostomía de drenaje, especialmente si está asociada con megauréteres y no hay un reservorio urinario. En raras ocasiones, se ha documentado en informes clínicos la presencia de adhesivo en el sistema colector renal de estos pacientes. Si se detecta una masa en las vías urinarias, se debe evaluar la continuación del uso del producto adhesivo e iniciar las medidas clínicas apropiadas.

Nota: En caso de irritación, consulte a un profesional de atención médica.

Se debe tener cuidado de ejercer sólo una suave presión en el abdomen del lactante al colocar cualquier sistema de bolsa.

Uso previsto

Para el manejo de desechos estomales.

LITTLE ONES® EXTRA SMALL

BOLSA DRENABLE RECORTABLE DE UNA PIEZA
CON BARRERA STOMAHESIVE Y SISTEMA DE CIERRE INVISICLOSE®

Instrucciones de uso

La piel periestomal debe estar limpia, seca y sin sustancias disolventes o grasientas.

PREPARACIÓN DE LA BOLSA PARA EL CORTE A LA MEDIDA

Antes de colocar la bolsa, deje que entre un poco de aire separando suavemente la bolsa según la ilustración.

Dejando en su lugar el papel desprendible, use la guía en el papel desprendible para trazar el contorno del estoma.

No corte más allá de la última línea indicada en el papel desprendible.

COLOCACIÓN

Centre la abertura cortada sobre el estoma y presione la barrera cutánea adhesiva en su lugar. Alise con cuidado el borde interno más próximo al estoma con un dedo, manteniéndolo presionado durante 30 segundos, para que quede ajustado alrededor del estoma.

INSTRUCCIONES PARA CERRAR LA BOLSA:

Nota: Las bolsas Extra Pequeños Little Ones® no tienen una pestaña de seguridad y sólo se deben doblar tres veces.

El sistema de cerrado del apéndice InvisiClose (1) está compuesto de una pestaña de seguridad, cierres de unión y cintas de cierre de la abertura.

Sujete la pestaña de seguridad contra la parte delantera de la bolsa dejando al descubierto los cierres de unión. (2)

Doble el borde final del apéndice hacia usted cuatro veces y asegúrese de que los cierres de unión están sobrepuestos. (3)

Presione los cierres de unión hasta que oiga un CLIC de cerrado en toda su longitud. (4)

Rodee con la pestaña de seguridad la parte trasera de la bolsa (lado corporal) y presione los cierres de unión hasta que oiga un CLIC de cerrado. (5)

INSTRUCCIONES PARA VACIAR LA BOLSA:

Levante el apéndice de la bolsa para que quede hacia arriba. Levante con cuidado la pestaña de seguridad hacia usted para abrirla. (6)

Mientras sujeta la pestaña de seguridad contra la parte frontal de la bolsa, abra los cierres de unión levantando la esquina (7) y desenrollando los pliegues. (8)

Para facilitar el vaciado y(o) la limpieza, puede abrir el extremo del apéndice presionando en ambos extremos de las cintas de cierre de la abertura con su pulgar e índice. (9)

Si lo desea, puede lavar el apéndice de la bolsa con agua y jabón suave. Séquela suavemente, sin frotar.

RETIRO

Drene la bolsa antes de retirarse.

Para remover la barrera adhesiva de la piel, presione la piel con una mano y suavemente levante la barrera adhesiva de la piel.

DISPOSICIÓN

De acuerdo a los requisitos/regulaciones locales.

Esterilidad	Registros Sanitarios Región Andina	Vida Útil	Condiciones de almacenamiento
Producto no estéril	Colombia: INVIMA 2022DM- 0025148 Ecuador: 2703-DME-0717 Perú: DM12383E	5 años	Almacenar a temperatura entre 10°C - 30°C/50°F - 86°F. Mantener en lugar seco.

Empaque Primario** Material de empaque: bolsa de polietileno				
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Alto]	Peso (g)
411633	EST INVISI PAED XSMLCLR PTDBSF23MM	N/A	15 x 21	16

** Aplica solo para Colombia.

LITTLE ONES® EXTRA SMALL

BOLSA DRENABLE RECORTABLE DE UNA PIEZA
CON BARRERA STOMAHESIVE Y SISTEMA DE CIERRE INVISICLOSE®

- Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.

Empaque Secundario

Material de empaque: Caja plegadiza de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)	Unidades por caja
411633	EST INVISI PAED XSMLCLR PTDBSF23MM	768455105878	18 x 12 x 4,5	100	10

Empaque Terciario

Material de empaque: Caja corrugada de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (kg)	Caja máster por
411633	EST INVISI PAED XSMLCLR PTDBSF23MM	10768455105875	37,5 x 24 x 25	2,7	20



Fabricantes:

ConvaTec Limited – Reino Unido
ConvaTec Dominican Republic, Inc –
República Dominicana



Importadores:

CONVATEC COLOMBIA LTDA
CONVATEC ECUADOR S.A.
CONVATEC PERÚ S.A.C.



ConvaTec Limited
First avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NJ, UK

www.convatec.com

*Consultar registro sanitario de cada país

Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.

Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.

Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec. Material exclusivo para profesionales de la salud. FUENTE: Datafile ConvaTec