## Ficha Técnica

AND-FIC-GCR-034 V.01 23/ago/2023

## **SUR-FIT PLUS®**

Barreras moldeables protectoras de piel con collar hidrocoloide flexible

#### **DESCRIPCIÓN**

Barreras plana constituidas por un anillo de soporte plano y delgado, el cual es adherido a un disco adhesivo tri-laminado. El disco adhesivo tri-laminado tiene masa adhesiva Stomahesive® en el lado que va unido al cuerpo y masa adhesiva Durahesive® en el lado de la barrera en que va unida la pestaña o aro de acople. El disco adhesivo tiene una película de polietileno en relieve en el centro. El collar de tela no tejida y la pestaña de la barrera están unidos al anillo de soporte. Adicionalmente, cuenta con un recubrimiento delgado de liberación que cubre el lado adhesivo de la barrera.



## **Componentes**

Los componentes de la Barreras Moldeables protectoras de Piel con collar Hidrocoloide Flexible son:

- Adhesivo tri-laminado (gelatina, perctina y carboximetilcelulosa) constituido por adhesivo Stomahesive®, Durahesive® 177A y polietileno en relieve.
- Pestaña o Aro en polietileno
- Borde en tela no tejido en Poliéster
- Carátula de Liberación constituida por un papel de liberación en silicona multi-capa y una carátula de liberación en poliéster/polietileno con una capa dura de liberación en silicona.
- Anillo de Soporte Moldeable

## Uso previsto

Las barreras están indicadas para el manejo de excreciones de: Ostomías Digestivas:

- Ileostomías
- Yeyunostomías
- Colostomías

#### Ostomías Urinarias:

- Vesicostomias
- Ureterostomías
- derivaciones urinarias

#### Características

- Acción enrolladora: El adhesivo moldeable suave de la barrera se enrolla hacia atrás para abrirse en forma justa al tamaño y forma del estoma, por tanto, no se necesitan tijeras.
- La tecnología con Memoria de rebote: La barrera moldeable abraza independiente y suavemente al contorno del estoma creando un ajuste seguro y personalizado evitando la filtración del contenido del estoma (efluente).
- Efecto de Cuello de tortuga: El Durahesive® en contacto con la humedad se expande arriba del estoma mejorando el ajuste y aportando una mejor protección evitando la filtración del contenido del estoma (efluente).
- Absorción: La capa de Durahesive® que está expuesta al efluente permite mayor absorción y distensión al ponerse en contacto con el efluente líquido o semilíquido del estoma, mejorando su ajuste.
- Protección de la piel: El ajuste personalizado minimiza el riesgo de contacto del efluente con la piel periostomal.
- Adaptabilidad: Se contrae y expande con el estoma ayudando a mantener un ajuste preciso durante su uso.

## Instrucciones de uso

Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación:

- Inicie limpiando la piel periestomal con jabón suave y agua.
- Remueva la barrera del empaque.
- Inicie el proceso de moldeo colocando sus pulgares (o dedos) en el centro del orificio de arranque y comience a deslizar hacia atrás el adhesivo.
- Después de moldear la apertura del estoma, retire la cubierta transparente de la barrera de piel e inmediatamente aplique la barrera en el área periestomal.
- Una vez que haya logrado el ajuste deseado, presione la porción deslizada de adhesivo para asegurar un ajuste confiable y seguro.
- Después, sostenga la barrera en su lugar por al menos 30 segundos para asegurar su adhesividad a la piel.
- Retire el papel blanco del Collar de hidrocoloide externo y presión contra la piel, alisando cualquier arruga.
- Alineé el aro Sur-Fit Plus de la bolsa con el aro de la barrera de piel Sur-Fit Plus, ajuste los dos aros iniciando desde abajo y en circulo, hasta lograr un acople perfecto de los dos aros.
- Para remover la barrera sostenga la piel con una mano y suavemente retire la barrera de piel.

# Ficha Técnica

AND-FIC-GCR-034 v.01 23/ago/2023

# **SUR-FIT PLUS®**

Barreras moldeables protectoras de piel con collar hidrocoloide flexible

Esterilidad	Registros Sanitarios Región Andina	Vida Útil	Condiciones de almacenamiento
Producto no estéril	Colombia: 2018DM-0017961 Ecuador: 2173-DME-1116 Perú: DM14253E	5 años	Almacenar a temperatura ambiente (10°C – 25°C / 50°F – 77°F). Mantener en lugar seco.

	Empaque Primario Material de empaque: Papel/PVC			
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Alto]	Peso (g)
411817	SURFIT + FLAT MOLD SM 45MM (1X10PK) INT	00768455187164		
411819	SURFIT + FLAT MOLD MED 45MM (1X10PK) INT	00768455187171	45445	36
411821	SURFIT + FLAT MOLD LG 57MM (1X10PK) INT	00768455187188	15 x 1 x 15	
411823	SURFIT + FLAT MOLD XLG 70MM (1X10PK)INT	00768455187195		

• Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.

Ma	Empaque Secundario aterial de empaque: Caja plegadiza de cartón				
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)	Unidades por caja
411817	SURFIT + FLAT MOLD SM 45MM (1X10PK) INT	00768455101337			
411819	SURFIT + FLAT MOLD MED 45MM (1X10PK) INT	00768455101344	45 2 40 2 45 2	300	10
411821	SURFIT + FLAT MOLD LG 57MM (1X10PK) INT	00768455101351	15,2 x 10,2 x 15,2		
411823	SURFIT + FLAT MOLD XLG 70MM (1X10PK)INT	00768455101368			

Ma	Empaque Terciario Iterial de empaque: Caja corrugada de cartón				
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (kg)	Caja máster por
411817	SURFIT + FLAT MOLD SM 45MM (1X10PK) INT	10768455101334			
411819	SURFIT + FLAT MOLD MED 45MM (1X10PK) INT	10768455101341	42 54 5 20 5	2.7	40
411821	SURFIT + FLAT MOLD LG 57MM (1X10PK) INT	10768455101358	13 x 51,5 x 28,5	3,7	10
411823	SURFIT + FLAT MOLD XLG 70MM (1X10PK)INT	10768455101365			

# Ficha Técnica

AND-FIC-GCR-034 V.01 23/ago/2023

# **SUR-FIT PLUS®**

Barreras moldeables protectoras de piel con collar hidrocoloide flexible





### **Fabricantes:**

ConvaTec Limited - Reino Unido Convatec Dominican Republic – República Dominicana Importadores:

CONVATEC COLOMBIA LTDA CONVATEC ECUADOR S.A. CONVATEC PERÚ S.A.C. ConvaTec Limited
First avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NJ, UK

www.convatec.com

\*Consultar registro sanitario de cada país

Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.

Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.

Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec.

Material exclusivo para profesionales de la salud.

FUENTE: Datafile Convatec