



**FICHA TÉCNICA
ESTEEM +**

**Bolsa Drenable de Una Pieza con Barrera Recortable Stomahesive ® y
Sistema de Cierre InvisiClose ®**

Proveedor: Boston Medical Devices Colombia Ltda.

PRODUCTO	
Nombre Genérico	Sistema de Ostomía Drenable de Una Pieza
Nombre Comercial	Esteem + One-Piece Drainable Pouch with Stomahesive ® Cut-to-Fit Skin Barrier and InvisiClose Tail Closure
Descripción	Esteem + es una bolsa de recolección de una pieza. Están indicadas para ser usadas para el manejo de las descargas del estoma para ostomizados. La bolsa drenable Esteem+ con mecanismo de cierre InvisiClose está fabricado de una película transparente o beige con un panel de confort. Tiene un collar adhesivo que se adhiere a la piel del paciente centrado en la parte superior de la bolsa con una apertura de estoma y un filtro de carbón situado en la parte superior de esta abertura. Estas bolsas tienen un drenaje en forma de cola y una salida InvisiClose, que está compuesta de dos mecanismos de cierre distintos, como sigue: • Dos juegos de broches de cierre de autosujeción que se aseguran una vez el drenaje en forma de cola se enrolla cuatro veces sobre sí mismo (Cierre de velcro "broche a broche". • Un bolsillo localizado en la parte delantera de la bolsa (Bolsillo "lock-it"). Esta característica permite a los usuarios de bolsas drenables doblar sus bolsas hasta que alcancen el tamaño de una bolsa cerrada típica para discreción adicional y adicionalmente, reduce la posibilidad de una apertura accidental del sistema y asegura el drenaje en forma de cola.
Marca	Esteem® +, Stomahesive®, Invisiclose®, ConvaTec®
Fabricante	ConvaTec Dominican Republic, Inc. – República Dominicana
Composición del Producto	Panel externo: Película 5 Ply con la estructura: Etilenvinil acetato (EVA) / EVA / Cloruro de Polivinilideno (PVDC) / EVA / EVA. Puede contener 2 a 4% de carbonato de calcio con el pigmento para reducir el brillo. Panel de confort: Polietileno / polietileno tereftalato (PE/PET) hidrofóbico no tejido Bolsillo de la cola de drenaje de la bolsa: Cinta del gancho: polipropileno color natural; adhesivo: adhesivo con base en caucho (velcro); capa de liberación: capa de PET/Silicona Material adhesivo de la pieza de la cola de drenaje: tira de poliestireno adhesivo que consiste en: lámina de poliestireno, adhesivo con base en caucho (velcro), revestimiento desprendible de silicona en película de poliéster color claro con una cubierta desprendible de silicona Capa protectora preformada: Película azul de Polietileno tereftalato (PETG) Protector adhesivo del collar: Papel de liberación de silicona Collares hidrocoloides adhesivos: el collar es ovalado con esquinas redondeadas y tiene un agujero en el centro. Un lado del collar está laminado con una capa de papel de liberación de silicona. El otro lado del collar está laminado con una lámina de polietileno labrado. Entre el papel y la película el collar está compuesto de una capa de hidrocoloide Stomahesive laminado a una capa de hidrocoloide Duraheive.
Características y Acciones del Producto	• La barrera protectora Stomahesive ® del sistema de una pieza Esteem ® + se adhiere a la piel seca y húmeda de una forma firme y delicada, mientras la protege de las descargas irritantes. • Adaptación: Los sistemas recortables permiten que la barrera se adaptable a diferentes tamaños y formas de estoma • Bolsa transparente: permite la observación del estoma y el efluente. • Panel de confort: permite un contacto más suave de la bolsa con la piel, evitando irritaciones.



Usos	Para el manejo de las descargas del estoma en pacientes ostomizados
Recomendaciones de Uso	Se recomienda consultar el instructivo de uso del sistema que es suministrado al interior del empaque, antes de la aplicación del mismo. Preparación de la piel Antes de colocar la bolsa, sus manos y la piel que rodea el estoma debe estar limpia, seca y libre de sustancias grasosas. Preparación de la bolsa Marque el contorno del estoma por las líneas del protector antiadhesivo del protector de la piel. Corte el protector de la piel por fuera del trazo marcado, teniendo cuidado de no cortar la película de la bolsa. No recorte por fuera de la última línea. Alise la abertura del corte con sus dedos. Aplicación de la bolsa Separe las películas de la bolsa para que pueda pasar el aire. Retire el protector antiadhesivo. Coloque la abertura del protector de la piel sobre el estoma. Aplique el protector de la piel presionando sobre la piel periestomal durante 30 segundos. En el caso de que haya algún borde de tela, retire el sobrante del protector antiadhesivo. Alíselo y elimine las arrugas. Use el producto mientras le resulte cómodo y lo sienta seguro. El tiempo de uso puede variar. Instrucciones para cerrar la bolsa Doble el extremo de la bolsa desde la tira blanca en el extremo de salida hasta que los cierres se superpongan. Presione los cierres de encastre en todo el ancho del extremo de la bolsa y apriete hasta que se hayan cerrado. Si lo desea, dé vuelta el bolsillo de adentro hacia afuera para ocultar el cierre del extremo de la bolsa, o envuelva el cierre con la solapa. Instrucciones para vaciar la bolsa Destrabe el cierre de la bolsa y abra el extremo presionando con los dedos en ambos lados de las tiras blancas en el extremo de salida. Vacíe la bolsa. Información sobre bolsas con filtro Al bañarse, nadar o realizar actividades en las que esté en contacto con el agua, cubra el filtro con la etiqueta adhesiva que trae la bolsa. Retire la etiqueta adhesiva después de realizar este tipo de actividades.
Registro Sanitario	INVIMA 2015DM-0013357 vigente hasta 6-Ago-2025
Presentaciones:	Caja x 10



**FORMATO DE CALIFICACIÓN
ESTEEM +**

**Bolsa Drenable de Una Pieza con Barrera Recortable Stomahesive® y
Sistema de Cierre InvisiClose®**

Calificación de 1 a 5:

5= Excelente

1= Malo

PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LA INSTITUCIÓN

Concepto Técnico					
Facilidad de aplicación	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Adhesión	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Protección de la piel	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Resistencia al efluente	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Facilidad de remoción	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Duración	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Comodidad para el paciente	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Empaques	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Claridad de las instrucciones de uso	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Presentación	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Servicio postventa: Asesoría educativa y servicio al cliente	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Otros:					
Observaciones:					
Calificación:					
Nombre del Calificador:					
Cargo:					
Fecha:					
Firma:					